

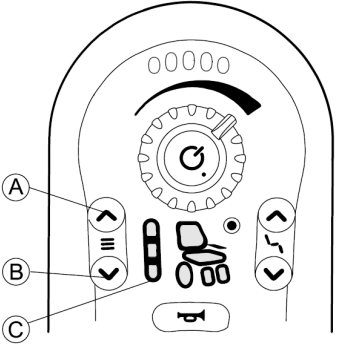



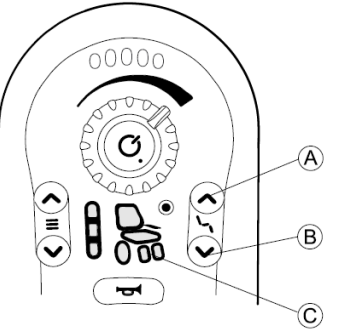


Yes, you can.®

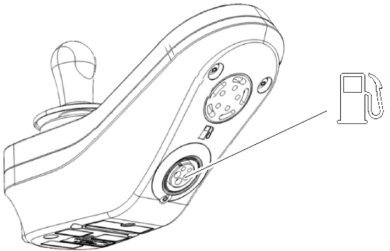

Quick betjeningsvejledning for Invacare LiNX DLX-REM216 styreboks

	Aktivering af kørefunktioner: Kørefunktioner vælges med tryk på A eller B. Når man har valgt kørefunktioner, kan man med tryk på A eller B, bladre op eller ned gennem køreprogrammerne, der hver har forskellig maks. hastighed. Køreprogram 1: Indendørs kørsel Køreprogram 2: Inde/ude kørsel Køreprogram 3: Udendørs kørsel LED indikatoren (C) viser, hvilket køreprogram man har valgt.
	Aktivering af el-funktioner: El-funktioner vælges med tryk på A eller B. Når man har valgt el-funktioner, kan man med tryk på A eller B, bladre op eller ned gennem de el-funktioner, der er tilgængelige fx hejs, tilt, ryg og benstøtte. Den valgte el-funktion vises ved at der kommer lys i symbolet for den valgte funktion på LED indikatoren (C).
	Opladning af batterierne: Benzinpumpe-symbolet på bagsiden af styreboksen angiver, hvor batteriladeren skal tilsluttes. Ladestikket er kodet og kan ikke vendes forkert.

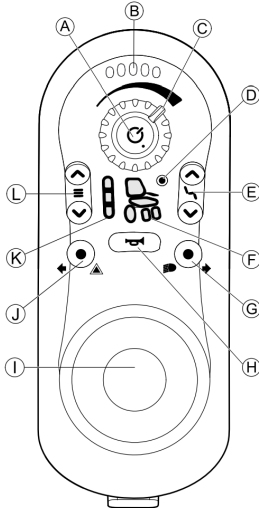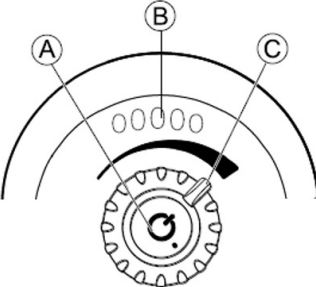	LiNX DLX-REM216 funktioner: A: Tænd/Sluk-knap/statusindikator B: Batterimåler C: Hastighedshjul D: Forbindelsesindikator E: Siddefunktionsvælger F: Køre-/aktuator-status G Lys og højre blinklys H: Horn I: Joystick J: Advarselslamper og venstre blinklys K: Kørefunktionsindikator L: Kørefunktionsvælger
	Tænd/sluk, batteriindikator og max. hastighed: A: Med tryk på A kan man tænde og slukke el-kørestolen. Jo mindre antal lysende LED's, jo mindre batterikapacitet er der tilbage. B: Batteriindikatoren viser den resterende batterikapacitet, samt fejl på styresystemet i form af et antal blink. C: Men C kan man indstille den ønskede max hastighed i det valgte køreprogram.

Dette er en kortfattet produktvejledning. For yderligere information om indstilling og betjening af **Invacare LiNX DLX-REM216** se venligst brugermanualen.

Brugermanualen medfølger altid ved levering og kan ligesom øvrig dokumentation downloades på Invacares hjemmeside: www.invacare.dk