

Raizer® II

Løftestol



Løfter en person som har falt, på 30 sekunder

Trygg og verdig forflytning fra gulv til stol - betjenes enkelt av én person.




Opplev trygghet og komfort med Raizer II

Raizer II er batteridrevet, mobil løftestol som hjelper personer som har falt, opp fra gulvet til nesten stående stilling på bare 20-30 sekunder.

Raizer II kan enkelt monteres og betjenes av én person, og krever ingen fysisk anstrengelse utover en støttende hånd.

Raizers design gjør den enkel å montere, bruke og rengjøre.

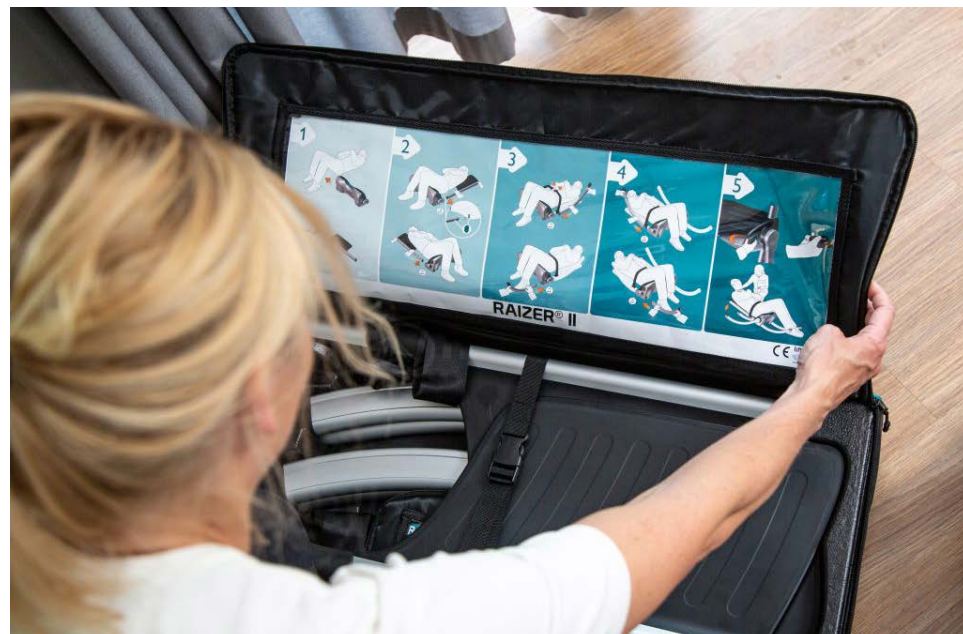

80 løft på én lading

Opptil 80 løft på én lading. Kun 10-15 minutters lading gir kapasitet til ett ekstra løft.



4 identiske ben og 2 identiske ryggstøtter

Enkel montering - alle delene er utformet slik at riktig montering sikres hver gang.




> Alle **overflatematerialer er valgt** ut for å være enkle å rengjøre og desinfisere.

> Ved behov kan **ekstra sikkerhetsbelte** monteres for å øke stabiliteten til personen som har falt.


> **Intuitive lyd** - og LED indikatorer sikrer korrekt montering

> **Håndkontrollen** oppbevares på seteenheten

> **Engangstrekk for hygiene** er tilgjengelig som tilbehør (ekstrautstyr).

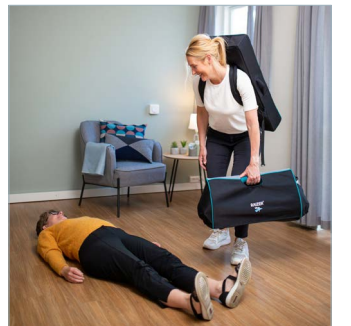

Steg 1 - Plasser seteenheten ved personen som har falt

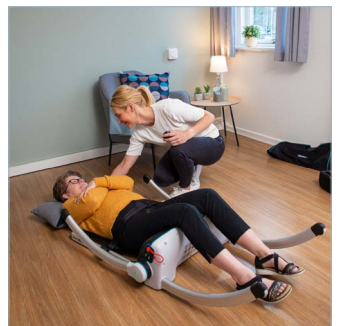

Steg 2 - Monter sammen ben og ryggstøtte rundt personen



Steg 3 - Sikre personen og start løftet



Steg 4 - Personen er løftet til nesten stående stilling og kan forflyttes til stol

Tekniske data ▼



Løftekapasitet ▼

Maks 150 kg



Løftetid ▼

20-30 sekunder



Vekt ▼

Sete: 8,5 kg
Ben og
ryggstøtte: 4,5 kg
Totalt: 13 kg



Antall løft ved full lading ▼

40 løft ved
maksimal
belastning
Omtrent
80 løft ved
gjennomsnittlig
belastning



Ladetid ▼

Opptil 6 timer
