

Enhet nr: E \_\_\_\_\_

Leverantör: \_\_\_\_\_



Ulrich Alber GmbH  
 Vor dem Weissen Stein 21  
 72461 Albstadt  
 Telefon 07432/2006-0  
 Telefax 07432/2006-299

**Arbete**

**Markera**

**Kommentar**

**Hjul och bromsar**

- Rengör hjul. Efter rengöring låt produkten torka i rum eller på plats med god ventilation
- Kontrollera att navkåpan är hel och sitter på korrekt plats
- Kontrollera drivringarnas ytskikt och byt ut om skadat
- Kontrollera att hjulen inte är skeva
- Kontrollera bromsverkan
- Lyssna efter missljud vid framdrivning
- Rengör och smörj lätt hjulaxeln vid behov
- Kontrollera att låskulorna på quick-release axeln är rörliga
- Kontrollera att navkåpan går att röra och systemet går att frikoppla
- Kontrollera att den elektromagnetiska bromsen fungerar
- Kontrollera däckens profildjup
- Kontrollera parkeringsbromsen

**Manöverenheten**

- Kontrollera att LCD displayens funktioner är rättvisande
- Kontrollera strömbrytaren
- Kontrollera omkopplaren för inomhus/ utomhus
- Kontrollera potentiometern
- Kontrollera batteriindikatorn
- Kontrollera att det inte finns sprickor i höljet
- Kontrollera att joystick styrningen fungerar och att bälgen är hel
- Kontrollera körparametrar, ändra vid behov
- Kontrollera kablage

**Batteripaketet**

- Rengör kontakter
- Kontrollera låsning
- Kontrollera LED displayen (batteriindikeringen)

## Slutkontroll

- Kontrollera generell funktion av hela systemet med brukare i
- Kontrollera montering av tippskydden
- Kontrollera monteringsatser
- Kontrollera att drivhjulen lätt går att ta av och sätt i
- Kontrollera lufttryck i däcken vid behov
- Kontrollera länkhjulens lodinställning, följ den manuella rullstolstillverkarens instruktioner
- Kontrollera manöverboxfäste
- Kontrollera att manöverboxen går att ställa in
- Kontrollera batteriets laddningsfunktion
- Fäll ihop stolen och kontrollera att inga sladdar kommer i kläm

## Dokumentation

- Byt ut etiketten "Teknisk säkerhetskontroll" på produkten
- Märk etiketten med en vattenfast filtpenna.
- Skriv in datum i fältet för nästa kontroll (24 månaders intervall)

Tekniska säkerhetskontroller av e-fix skall endast utföras av person med ändamålsenlig relevant teknisk bakgrund.