

Enhet nr: M_____

Leverantör: _____



Ulrich Alber GmbH
Vor dem Weissen Stein 21
72461 Albstadt
Telefon 07432/2006-0
Telefax 07432/2006-299

Arbete	Markera	Kommentar
Köregenskaper		
Kontrollera däckens profildjup	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera drivringarnas ytskikt och byt ut om skadat	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera att hjulen avaktiveras då de inte används	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera att körprogram kan väljas med mobility plus paket	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera drivringssensorn	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera att hjulen inte är skeva och generella köregenskaper	<input type="checkbox"/>	
Generell rengöring och underhåll. Efter rengöring låt produkten torka i rum eller på plats med god ventilation	<input type="checkbox"/>	
Batteripaketet		
Rengör kontakter	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera LED displayen (batteriindikeringen)	<input type="checkbox"/>	
Laddaren		
Kontrollera att höljet inte är skadat eller har sprickor	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera kablage (isolering, kontakter)	<input type="checkbox"/>	
Funktionstest	<input type="checkbox"/>	
Slutkontroll		
Kontrollera generell funktion av hela systemet med brukare i	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera montering av tippskydden	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera monteringsatser	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera parkeringsbromsarna	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera lufttryck i däcken vid behov	<input type="checkbox"/>	
Kontrollera länkhjulens lodinställning, följ den manuella rullstolstillverkarens instruktioner	<input type="checkbox"/>	
Dokumentation		
Byt ut etiketten "Teknisk säkerhetskontroll" på produkten	<input type="checkbox"/>	
Märk etiketten med en vattenfast filtpenna.	<input type="checkbox"/>	
Skriv in datum i fältet för nästa kontroll (24 månaders intervall)	<input type="checkbox"/>	

Tekniska säkerhetskontroller av Twion skall endast utföras av person med ändamålsenlig relevant teknisk bakgrund.