

### GARDEZ CES INSTRUCTIONS

REMARQUE : Vérifiez que toutes les pièces n'ont subi aucun dommage pendant le transport. En cas de dommage, NE PAS utiliser un appareil endommagé. Contacter le transporteur/Invacare pour obtenir des instructions complémentaires.

### Sommaire de Sécurité

Pour assurer le montage sûr et approprié du chariot, ces instructions et ces mises en garde DOIVENT être suivies :

#### MISE EN GARDE

N'utilisez PAS ce produit ou tout autre produit optionnel sans avoir lu et compris au préalable ces instructions ainsi que toute autre instruction complémentaire comme le manuel d'utilisation, les manuels d'entretien et les fiches d'instruction fournies avec ce produit ou avec tout équipement optionnel. Si vous ne comprenez pas les mises en garde, les messages d'avertissement ou les instructions, veuillez contacter un professionnel de la santé, le distributeur ou le personnel technique avant de tenter d'utiliser cet appareil pour ne pas risquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Après tout réglage, réparation ou entretien et avant utilisation, assurez-vous que toute la visserie de fixation est bien serrée - sinon il pourrait y avoir un risque de blessure ou de dommage matériel.

#### AVERTISSEMENT À PROPOS DES ACCESSOIRES

Les produits Invacare ont été spécifiquement conçus et fabriqués pour être utilisés avec d'autres accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Invacare et il est déconseillé de les utiliser avec les produits Invacare.

## Assemblage du chariot

REMARQUE : Les outils suivants sont exigés pour exécuter cette procédure :


- Tournevis à lame cruciforme Phillips n3
- Clé plate de 10 mm

1. Retirez la base, la poignée et la visserie de son emballage.

REMARQUE : L'emballage de la visserie doit contenir deux vis à tête bouton, les écrous frein, les rondelles de retenue, et les vis à serrage à main.

2. Insérez les tubes carrés de la poignée dans les empreintes carrées de la base. Voir FIGURE 1 (Detail « A »).
3. Ajustez la poignée et la base jusqu'à ce que les trous de vis soient directement alignés. Voir FIGURE 1 (Detail « B »).


Pour de plus amples informations concernant les produits Invacare, pièces, et services, veuillez vous rendre sur la page [www.invacare.com](http://www.invacare.com)

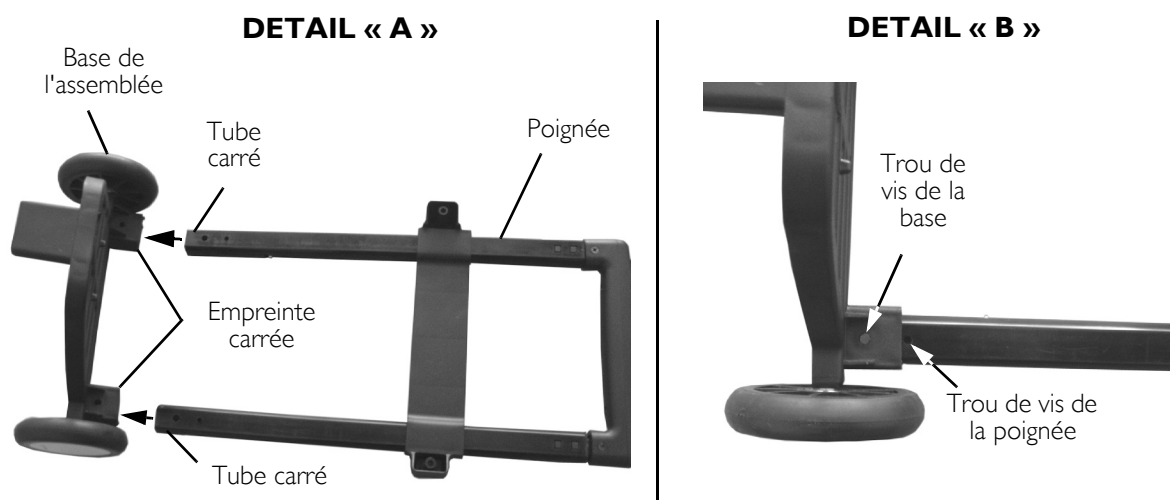

**FIGURE 1** Insertion de la poignée dans la base


4. Insérez la vis dans l'empreinte carrée de la base, en vous assurant que la vis sorte par l'autre côté de l'empreinte tournée vers la plate-forme de la base (FIGURE 2).
5. Vissez l'écrous sur la vis et serrez en fixant la poignée à la base (FIGURE 2).

*REMARQUE : Répétez ETAPE 4 à ETAPE 5 sur l'autre côté de la base.*

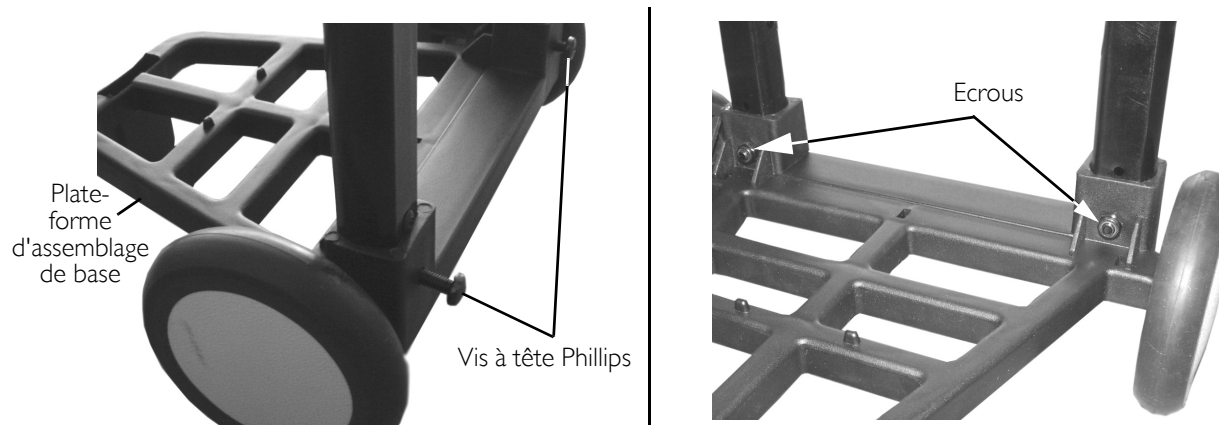


**FIGURE 2** Fixation de la poignée à l'ensemble de base

6. Insérez les deux vis à serrage à main dans la bride située sur l'ensemble de poignée (FIGURE 3).
7. Fixez les vis avec les rondelles de retenue (FIGURE 3).

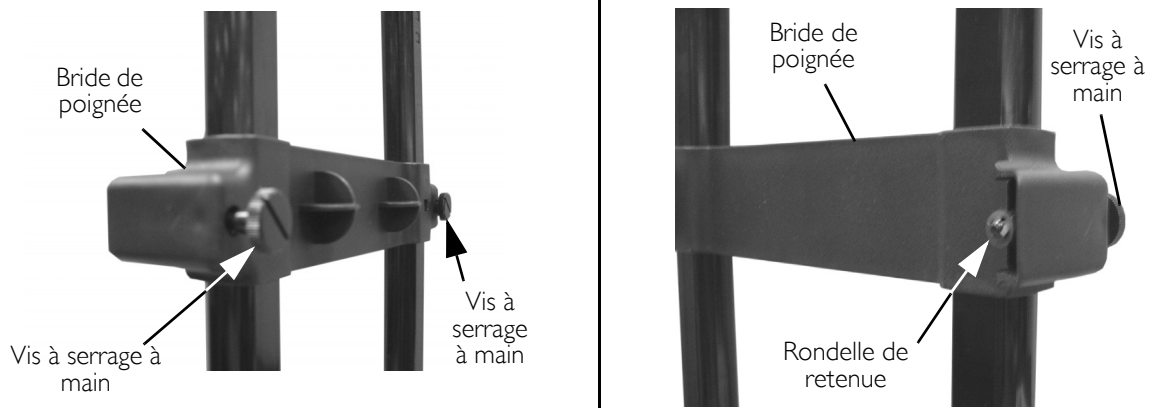


**FIGURE 3** Fixation de la bride de poignée

8. Positionnez le concentrateur sur la base en alignant des trous sur la partie inférieure du concentrateur avec les ergots de la base du chariot (FIGURE 4).

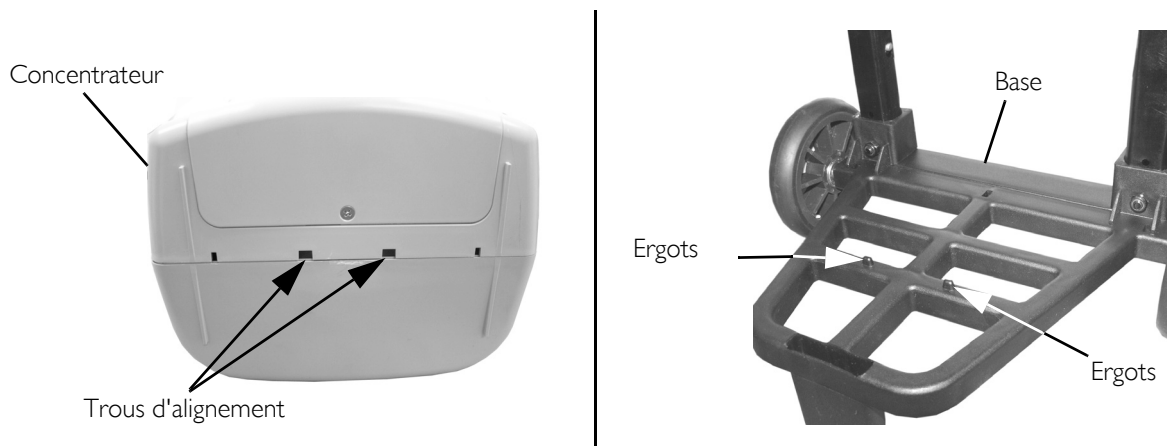

**FIGURE 4** Positionnement du concentrateur sur le chariot

9. Alignez les vis à serrage à main avec des trous situés à l'arrière du concentrateur, serrez les vis à la main pour fixer l'unité au chariot (FIGURE 5).

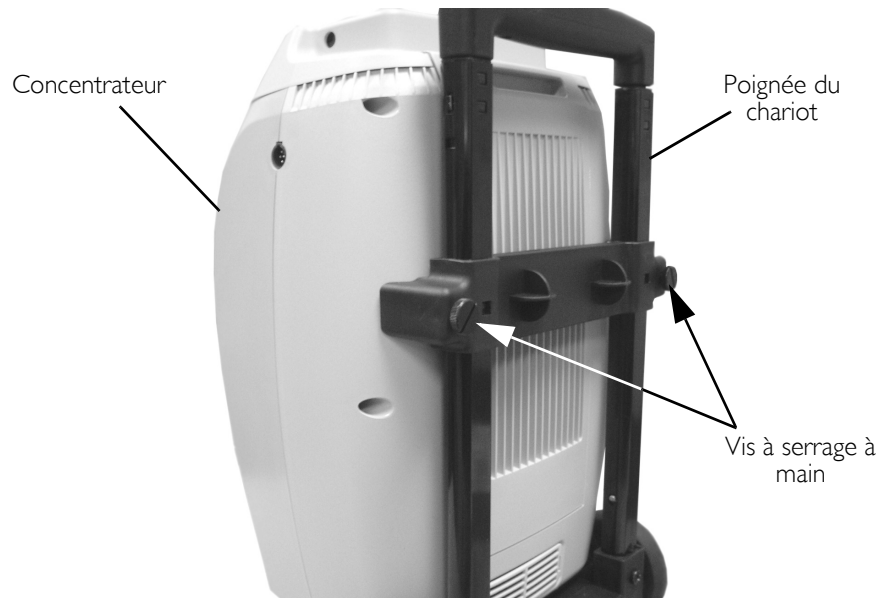

**FIGURE 5** Fixation du concentrateur au chariot