


	HYGIÈNE
<i>Hygiène corporelle</i>	Suivre les conseils de votre infirmière
<i>Hygiène d'utilisation</i>	En cas d'incontinence, nettoyer la housse. Il est conseillé d'acquiescer un second drap housse : protection de rechange lors de lavages afin d'éviter le contact di-

	NETTOYAGE
	Nettoyage à l'eau ou désinfection à l'aide de solutions désinfectantes conformes aux normes NF (ne pas utiliser de solvant ou produit chlorés). 
<i>- De la housse</i>	Entretien : la housse du matelas POLYMOUSSE est amovible et lavable en machine à 90°C désinfection à l'aide de solutions désinfectantes conformes aux normes NF (ne pas utiliser de solvant). Attention pas de séchage en machine. Pour des raisons d'hygiène, un nettoyage de surface quotidien de la housse est préconisé. Cette procédure s'effectue rapidement (utiliser une éponge propre imprégnée
<i>Stockage</i>	Le matelas et son emballage doivent être stockés dans un endroit propre et sec, à
<i>Remplacement de la housse</i>	Si la housse est déchirée ou percée la remplacer par la référence homologuée BIOPLAST FR 10.

	ÉLIMINATION
<i>- Du matelas</i>	Ne pas brûler ou jeter dans la nature
<i>- De la housse</i>	Ne pas brûler ou jeter dans la nature

Date de révision de la notice : Décembre 2008

CERTIFICAT DE GARANTIE
Le support POLYMOUSSE est garanti 2 ans contre toutes détériorations anormales, eu égard aux conditions habituelles d'utilisation courante, et sous réserve des applications préconisées.
La garantie ne pourra s'appliquer en cas d'utilisation de produits contenant des solvants chlorés ou non, ou de détérioration de la mousse.
Elle ne porte, en tout état de cause, que sur le remplacement du produit et sous réserve de la preuve de la date de livraison.

Date :
Cachet du revendeur :

En cas de vice de fabrication, veuillez contacter votre revendeur en lui présentant ce certificat complété par le numéro se trouvant sur les éléments mousse.
N° de fabrication :

INVACARE POIRIER S.A.S. – Rte de St-Roch – 37230 FONDETTES
www.invacare.fr



CE

POLYMOUSSE

Matelas d'aide à la prévention des escarres

S/classe IB

**NOTICE D'UTILISATION ET
CERTIFICAT DE GARANTIE**



1232468

Escarres sur matelas en mousse structuree
8/51444 10, ARTOIS, POLYMOUSSE

« La première prévention de l'escarre au lit consiste à changer les points d'appui du corps sur le matelas en moyenne toutes les trois heures pour limiter la compression trop prolongée des vaisseaux en regard des saillies osseuses et pour permettre l'irrigation des tissus ».

DATE DE MISE EN SERVICE

POLYMOUSSE

Matelas d'aide à la prévention des escarres

N° de conformité à la LPPR : 1232468

Avertissement : avant toute mise en œuvre lire attentivement la notice

<p>Pourquoi vous a-t-on prescrit ce dispositif</p>	<p>Votre état de santé réduit votre mobilité et vous expose au risque d'escarres.</p>
<p>Qu'est-ce qu'une escarre ?</p>	<p>Une escarre est une lésion plus ou moins profonde de la peau, liée à une compression excessive et prolongée des tissus, entre le corps et un plan d'appui. Cette pression excessive peut supprimer la circulation sanguine et entraîner l'escarre.</p> <p>L'escarre peut prendre plusieurs formes : une simple rougeur persistant plus d'une journée, une induration de la peau, une plaie plus ou moins profonde pouvant dans les cas graves atteindre les muscles ou l'os sous-jacent.</p> <p>L'apparition de l'escarre peut être liée à un manque de mobilité et/ou à une maladie chronique.</p>
<p>Conseils d'utilisation et précaution d'emploi</p>	<p>ATTENTION : UN SUPPORT À LUI SEUL NE SUFFIT PAS À PRÉVENIR L'ESCARRE.</p> <p>D'AUTRES MESURES DE PRÉVENTION SONT ÉGALEMENT INDISPENSABLES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> changer de position fréquemment (au moins toutes les 2 à 3 heures) <input type="checkbox"/> maintenir l'hygiène de la peau et éviter le macération <input type="checkbox"/> en cas d'incontinence, changer régulièrement les protections <input type="checkbox"/> observer ou faire observer quotidiennement l'état cutané <input type="checkbox"/> s'assurer que l'alimentation est suffisante et adaptée <input type="checkbox"/> boire régulièrement et en quantité suffisante <p>SI UNE DE CES MESURES NE PEUT ÊTRE SUIVIE, IL EST INDISPENSABLE D'EN AVERTIR AU PLUS TÔT VOTRE MÉDECIN OU VOTRE INFIRMIÈRE</p> <p>Signalez au plus tôt à votre médecin ou à votre infirmière tout ÉVÈNEMENT ANORMAL comme par exemple de la FIÈVRE, des DOULEURS ou encore des ROUGEURS ou le BLANCHIMENT des points d'appui (tête, épaule, dos, hanche, omoplate, bassin, talon, etc....)</p> <p>Il est important de limiter au maximum les surépaisseurs entre le corps et le support, à l'exception du drap pour un support de lit, du vêtement de corps et d'un éventuel change complet. Préférer des vêtements de corps en coton peu serrés et si possible sans couture en zone d'appui. Ne pas intercaler : serviette ou drap pliés, coussin surajouté, etc... Veiller à l'absence de tout corps étranger comme : tubulures, miettes, corps gras, etc...</p> <p>Pour des raisons d'hygiène chaque support d'aide à la prévention des escarres doit être réservé à une seule personne. Lire attentivement le livret utilisateur fourni</p>

<p>Descriptif du produit</p>	<p>Matelas POLYMOUSSE. Dimensions : 1950x850x180 mm</p> <p>Densité moyenne des plots : 36 kg/m³</p> <p>Le poids minimum permettant de maintenir l'efficacité du matelas est de 40 kg.</p> <p>Le poids maximum susceptible d'être supporté par le matelas est de 100 kg.</p> <p>Pressions maximales avant vieillissement pour une charge de 100 kg</p> <p>Occupat. 127 g/cm² - Sacrum : 77 g/cm² - Talons : 82 g/cm²</p>
<p>Sur quel support ?</p>	<p>Le matelas s'utilise de préférence sur un sommier médical adapté. Il convient de vérifier, le cas échéant, que la hauteur des barrières de lit est compatible avec l'épaisseur du matelas.</p>
<p>Conseils d'installation</p>	<p>Afin de garantir l'efficacité du matelas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ne pas installer sur un autre support d'aide à la prévention des escarres. - le linge de lit ne doit pas être bordé serré. <p>Pour être efficace, le matelas doit être utilisé uniquement dans des conditions normales de température, pression atmosphérique et humidité.</p> <p>Ce matelas est composé d'un socle de couleur verte et de 9 modules amovibles de trois couleurs différentes : jaune, rose et beige fixés. Chaque couleur correspond à une fermeté différente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'efficacité en matière de prévention des escarres est assurée par les plots de couleur jaune positionnés au niveau des points d'appui du corps, à savoir fessier et talons. - Le confort du malade est quant à lui assuré au niveau de la tête par les plots de couleur beige (mousse formulation bien être) et au niveau du dos et des jambes par les plots de couleur rose (mousse formulation literte) <p>Le matelas doit être positionné sur le lit de la façon suivante pour un résultat optimal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - plots coloris beige à la tête du lit - plots coloris rose aux jambes et au dos - plots coloris jaune aux pieds
<p>Précautions d'emploi</p>	<p>Ne pas utiliser une autre housse que celle qui est préconisée.</p> <p>Ne pas intercaler de corps étrangers entre le patient et le matelas en dehors du vêtement et d'un éventuel change complet.</p>
<p>Confort de l'utilisateur</p>	<p>Pour améliorer le confort de l'utilisateur, utilisez de préférence des vêtements et linges en coton. Proscrire l'utilisation de tissus et vêtements synthétiques qui pourraient par friction provoquer des échauffements.</p>
<p>Transport et déplacement</p>	<p>Protéger le matelas lors d'un transport (transfert dans un autre lieu), vous risqueriez d'endommager la mousse (non couvert par la garantie).</p> <p>Afin d'éviter une déchirure de la mousse, ne pas manipuler le matelas pas les</p>
<p>Que faire en cas d'incident</p>	<p>Prévenir votre revendeur</p>
<p>Date limite d'utilisation</p>	<p>Utiliser le matelas dans les deux années qui suivent la date d'achat. Dans tous les cas, utiliser le matelas dans les 30 mois qui suivent la date de fabrication notée sur</p>