
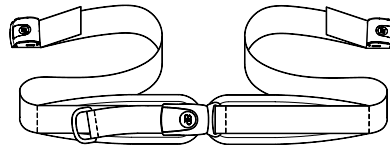


# Ceinture de Soutien Pelvien

INSTALLATION ET CONSIGNES UTILISATEUR

ART NOS. HB2, HB4, LB2, LB4, NB2 & SB2

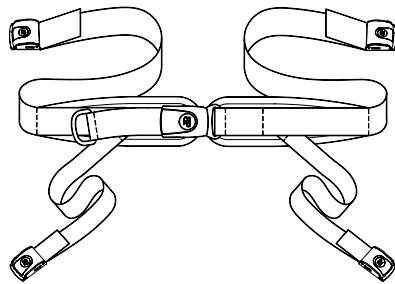

Ces consignes fournissent des renseignements importants quant à la sécurité et l'entretien de toutes les ceintures de soutien pelvien Bodypoint. Remettre ces consignes à l'utilisateur ou au soignant. Les passer en revue attentivement afin de s'assurer qu'elles sont bien comprises.

**⚠ ATTENTION !** Ce produit doit être installé et ajusté par un technicien qualifié en réadaptation. Pour son installation, ce produit doit être monté avec :

Des embouts de montage plats  
Des embouts de montage en sangle  
Boucle à came (2,5 cm (1") pour les utilisateurs pesant jusqu'à 75 kg, 3,8 cm (1-1/2") et 5,08 cm (2") adapté à tous les utilisateurs"

Des matériels de montage à sangles Bodypoint facultatifs peuvent être employés pour le montage sur les fauteuils roulants et des systèmes de sièges.

#### UTILISATION :

**⚠ ATTENTION !** Ce produit doit servir uniquement à placer une personne dans un fauteuil roulant ou un fauteuil de travail. Il n'est pas conçu pour servir de ceinture de sécurité pour le transport ou de dispositif personnel de retenue, ou pour toute autre application où ses limites pourraient causer un préjudice corporel. Une mauvaise utilisation de ce produit est interdite et dangereuse.

**⚠ ATTENTION !** Cette ceinture de soutien pelvien doit être bien ajustée le long du pelvis inférieur ou des cuisses à tout moment. Une ceinture lâche comporte un risque pour l'utilisateur qui peut glisser dans l'ouverture et s'étrangler. Demandez à votre spécialiste de faire une démonstration du réglage et de l'utilisation. (Remarque : Les ceintures à quatre points peuvent être portées le long du pelvis si des sangles secondaires sont arrimées pour empêcher un changement de position.

**⚠ ATTENTION !** L'ouverture accidentelle de la ceinture de soutien pelvien comporte un risque pour l'utilisateur qui peut glisser et tomber du fauteuil roulant. Si les mouvements ou l'aptitude mentale de l'utilisateur impliquent un risque d'ouverture accidentelle du baudrier, un soignant devra toujours être présent lors de l'utilisation. S'assurer que tout le personnel soignant sait comment détacher le

produit. Dans le cas contraire, cela pourrait occasionner une perte de temps en cas d'urgence.

**⚠ ATTENTION !** Comme tout nouveau support de la posture assise, ce dispositif peut modifier la posture assise de l'utilisateur. Les utilisateurs doivent continuer à pratiquer des exercices réguliers de soulagement de pression et veiller à la santé de la peau, non pas seulement dans les zones de contact, mais aussi sur les zones essentielles de pression comme le sacrum, les jambes et les fesses. En cas d'irritation ou de rougeur du derme, interrompre l'utilisation et consulter un médecin ou un spécialiste de la posture. Le non respect de cette mise en garde peut occasionner des blessures graves comme des ulcères de pression.

**ENTRETIEN :** Rechercher périodiquement des traces d'usure au niveau des coutures, des sangles et des coussinets. En cas d'usure importante, contacter le fournisseur pour obtenir une réparation par du personnel qualifié ou un remplacement par Bodypoint. En aucune circonstance ce produit ne doit être modifié ou réparé par des personnes non qualifiées. La santé et la sécurité de l'utilisateur en dépendent !

**NETTOYAGE :** Lavage en machine à 60 °C (140 °F). Ne pas utiliser d'eau de Javel. Séchage à la machine à basse température, ou bien étendre et égoutter. Ne pas repasser. (Pour éviter de rayer le produit et la machine, placer le produit dans un sac en toile lors du lavage.)

**GARANTIE :** Ce dispositif est assorti d'une garantie limitée à vie contre les défauts d'exécution ou de fabrication, dans le cadre d'utilisation normale par le consommateur initial. Contacter le fournisseur ou Bodypoint pour faire valoir la garantie.


Pour plus d'information sur ce produit ou d'autres produits Bodypoint, et consulter la liste des distributeurs en dehors des États-Unis, rendez-vous sur [www.bodypoint.com](http://www.bodypoint.com)

 **Bodypoint**®

**EC REP**


MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Germany

**CE**

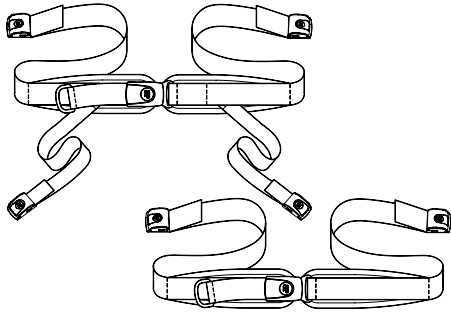

### CONTENU

- Ceinture de soutien pelvien
- Boucles Cinch-Mount™ ou Flat-Mount™
- Fixations FrameSaver™ (en option)


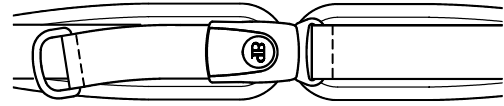


### INSTALLATION

Dans le cas de ceintures de soutien rembourrées, conserver les sangles de réglage serrées de sorte que les coussinets se touchent. Avec les ceintures de soutien non rembourrées, tirer 13 à 15 cm de sangle à travers la boucle.


### CEINTURES DE SOUTIEN PELVIEN A DEUX POINTS

1. Situer le point d'appui souhaité.
2. Fixer FrameSaver et Cinch-Mount au cadre du fauteuil roulant.
3. Centrer la ceinture sur le pelvis et passer l'extrémité de la sangle dans le Cinch-Mount.
4. Sangler au corps et fermer le Cinch-Mount.

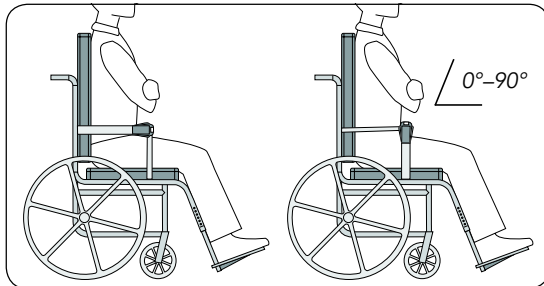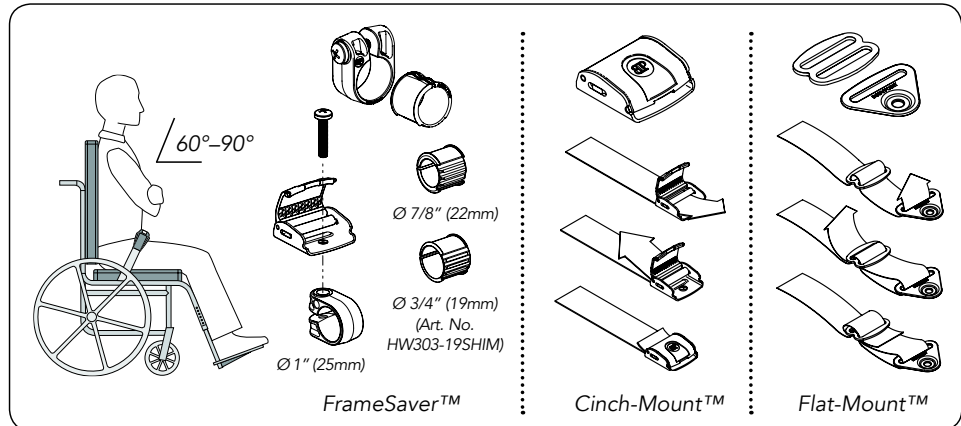

### CEINTURES DE SOUTIEN PELVIEN A QUATRE POINTS

1. Situer les points d'appui souhaités.
2. Suivre les consignes d'installation ci-dessus pour ajuster les sangles principales.
3. Fixer les sangles secondaires au fauteuil de sorte qu'elles arrentent les sangles primaires.
4. Serrer les sangles secondaires pour empêcher tout mouvement des sangles primaires.

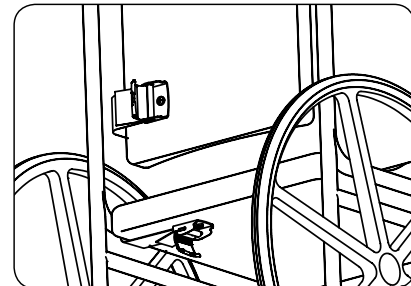

### MONTAGE DIRECT

Les raccordements peuvent être attachés directement aux surfaces solides du siège. Les vis de montage doivent avoir une résistance à l'arrachement de 90kg/200lbs au minimum. (Non incluses.)

### REGLAGE

Une fois bien réglée et serrée, la ceinture doit bien s'ajuster au corps de l'utilisateur et maintenir le pelvis. Dans le cas de ceintures rembourrées, bien tirer sur le filet à anneaux en D jusqu'à éliminer le mou dans la ceinture et jusqu'à ce que les coussinets de la partie intérieure de la boucle se touchent. S'il est nécessaire de modifier la longueur pour obtenir un meilleur ajustement ou d'enlever la ceinture pour la nettoyer, il convient d'utiliser les boucles de la ceinture.

### CONTROLE DE SECURITE

Demander à l'utilisateur, correctement installé dans son fauteuil roulant, de se pencher en avant et latéralement d'un côté et de l'autre pour vérifier l'ajustement. Contrôler :

1. Bon fonctionnement des boucles et des sangles de réglage.
2. Confort – Rechercher des zones d'irritation éventuelle.
3. Position – Si trop haut ou trop bas, régler les points d'appui
4. Interférence avec d'autres dispositifs – Déplacer les points d'appui comme il convient.
5. Faire décrire au fauteuil toute sa gamme de mouvements : incliner, replier et rouler. S'assurer qu'il n'y a pas d'interférence.

