


# CONSIGNES D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DU Harnais De Jambe

ART NOS. LH600S, LH600M & LH600L

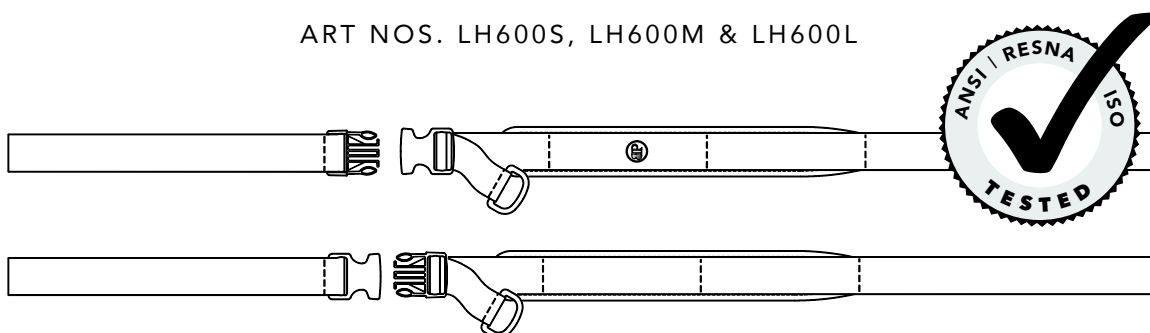

Ces consignes fournissent des informations importantes quant à la sécurité et l'entretien de tous les harnais de jambe Bodypoint. Les remettre à l'utilisateur ou au soignant et lui demander de s'assurer qu'il les a comprises.

**ATTENTION !** Ce produit doit être installé et ajusté par un technicien qualifié en réadaptation. Pour son installation, ce produit doit être monté avec :

- Des embouts de montage plats
- Des embouts de montage en sangle
- Boucle à came (2,5 cm (1") pour les utilisateurs pesant jusqu'à 75 kg, 3,8 cm (1-1/2") et 5,08 cm (2") adapté à tous les utilisateurs)

Des matériels de montage à sangles Bodypoint facultatifs peuvent être employés pour le montage sur les fauteuils roulants et des systèmes de sièges.

## UTILISATION :

**⚠ ATTENTION !** Ce produit doit servir uniquement à placer une personne dans un fauteuil roulant ou un fauteuil de travail. Il n'est pas conçu pour servir de ceinture de sécurité pour le transport ou de dispositif personnel de retenue, ou pour toute autre application où ses limites pourraient causer un préjudice corporel. Une mauvaise utilisation de ce produit est interdite et dangereuse.

**⚠ ATTENTION !** L'ouverture accidentelle de ce produit risque de faire glisser ou tomber l'utilisateur hors du fauteuil de douche ou garde-robe. Si les mouvements ou l'aptitude mentale de l'utilisateur impliquent un risque d'ouverture accidentelle, un thérapeute devra toujours être présent lors de l'utilisation. S'assurer que tout le personnel soignant sait comment détacher le produit. Dans le cas contraire, cela pourrait occasionner une perte de temps en cas d'urgence.

**⚠ ATTENTION !** Comme tout nouveau support de positionnement, ce dispositif peut modifier la posture assise de l'utilisateur. Les utilisateurs

doivent continuer à pratiquer des exercices réguliers de soulagement de pression et veiller à la santé de la peau, non seulement en ce qui concerne les zones de contact, mais aussi les zones essentielles de pression comme le sacrum, les jambes et les fesses. En cas d'irritation ou de rougeur du derme, interrompre l'utilisation et consulter un médecin ou un spécialiste de la posture. Le non respect de cette mise en garde peut occasionner des blessures graves comme des escarres.

**ENTRETIEN :** Suveiller régulièrement les traces d'usure au niveau des coutures, des sangles et des coussinets. En cas d'usure importante, contacter le fournisseur pour obtenir une réparation par du personnel qualifié ou un remplacement par Bodypoint. En aucune circonstance ce produit ne doit être modifié ou réparé par des personnes non qualifiées. La santé et la sécurité de l'utilisateur en dépendent !

**🧺🌟🚫 NETTOYAGE :** Lavage en machine à 60 °C (140 °F). Ne pas utiliser d'eau de Javel. Séchage à la machine à basse température, ou bien étendre et égoutter. Ne pas repasser. (Pour éviter de rayer le produit et la machine, placer le produit dans un sac en toile lors du lavage.)



**GARANTIE :** Ce dispositif est assorti d'une garantie limitée à vie contre les défauts d'exécution ou de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale par le consommateur initial. Contacter le fournisseur ou Bodypoint pour faire valoir la garantie.

Pour plus d'information sur ce produit ou d'autres produits Bodypoint, ou pour consulter la liste des distributeurs en dehors des États-Unis, rendez-vous sur [www.bodypoint.com](http://www.bodypoint.com)




MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Germany



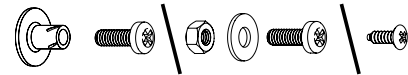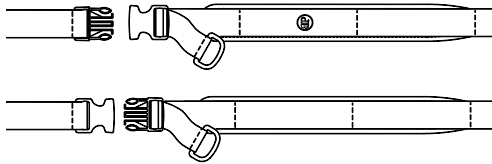

Ø 3/16-1/4" (5-6mm)

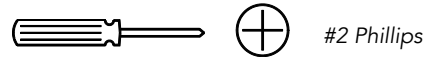


#2 Phillips

### CONTENU DU PAQUET

- Harnais de jambe
- Boucles Cinch-Mount™ ou Flat-Mount™
- Clamps FrameSaver™ (Optionnel – Art n°, FS032-2)


### EXIGENCES D'INSTALLATION

- Tournevis à pointe cruciforme n° 2.
- Vis de montage ayant une résistance à l'arrachement minimum de 90kg/210lbs. (Non incluses.)

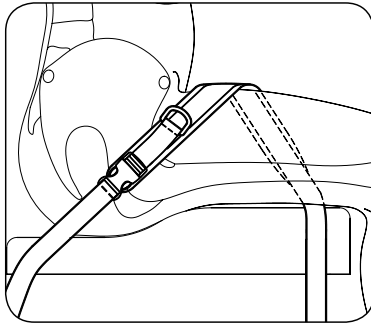

### INSTALLATION

Asseoir l'utilisateur dans le fauteuil roulant et définir la bonne posture. Placer le harnais de jambe contre la cuisse intérieure en faisant passer l'extrémité de la sangle arrière à côté du bassin et de l'articulation de la hanche. Le coussinet doit toucher le siège, mais ne doit pas aller sous la jambe ni toucher l'aîne.

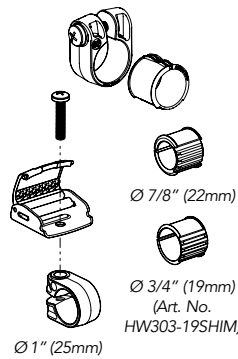


Ø 1" (25mm)

FrameSaver™


Ø 7/8" (22mm)

Ø 3/4" (19mm)


(Art. No. HW303-19SHIM)

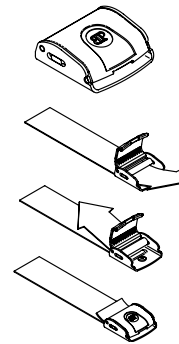

Cinch-Mount™

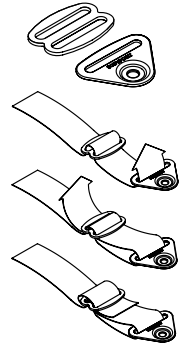


Flat-Mount™

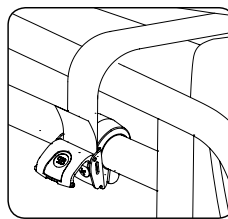


### SANGLE AVANT

1. Passer la sangle sous la cuisse et placer le point d'ancrage voulu sur l'avant du rail du siège ou sous le siège.
2. Attacher les raccords au cadre du fauteuil roulant.

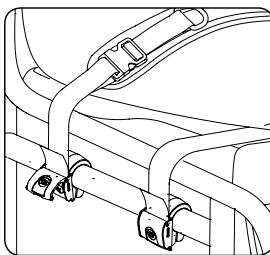


### SANGLE ARRIÈRE

1. Les sangles arrière doivent être attachées à l'arrière du rail du siège.
2. Définir le point d'ancrage voulu et attacher les raccords au cadre du fauteuil roulant.

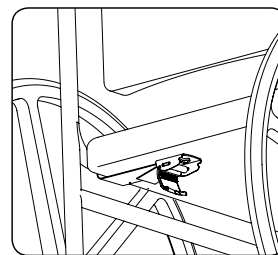


### MONTAGE DIRECT

Les raccords peuvent être attachés directement aux surfaces solides du siège. Les vis de montage doivent avoir une résistance à l'arrachement de 90kg/210lbs au minimum. (Non incluses.)

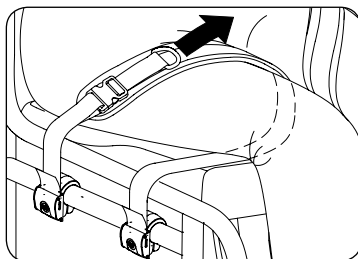

### RÉGLAGE

Serrer le harnais de jambe sur l'utilisateur avec la sangle à anneau en D. Éliminer le jeu au niveau du raccordement arrière. Une fois bien réglées et serrées, les sangles doivent bien s'ajuster aux jambes de l'utilisateur.

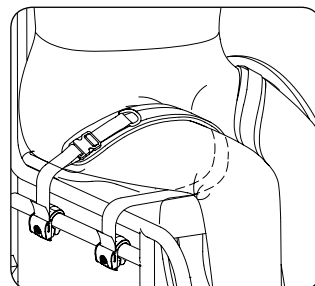

### CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

Demander à l'utilisateur, correctement installé dans son fauteuil roulant, de se pencher en avant et latéralement d'un côté et de l'autre pour vérifier l'ajustage.

Contrôler :

1. Bon fonctionnement des boucles et des sangles de réglage.
2. Confort – Rechercher des zones d'irritation éventuelle.
3. Interférence avec d'autres dispositifs – Déplacer les points d'appui comme il convient.
4. Faire décrire au fauteuil toute sa gamme de mouvements : incliner, replier et rouler. S'assurer qu'il n'y a pas d'interférence.