

## GARANZIA

Ogni cuscino/base Matrix-Vi viene accuratamente ispezionato e testato per dare una prestazione ottimale. Ogni cuscino/base viene garantito, per un utilizzo normale, per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Nel caso un difetto nei materiali o nella fabbricazione dovesse essere riscontrato entro 24 mesi dall'acquisto, Motion Concept, a propria discrezione, provvederà alla riparazione od alla sostituzione gratuitamente. Questa garanzia non è applicabile a forature, strappi o bruciature e nemmeno alla fodera rimovibile.

Il cuscino/base rigida originale deve essere reso al distributore e diventerà proprietà di Motion Concept come condizione per la procedura di gestione della garanzia. Tutti i reclami per la garanzia devono essere fatti attraverso il rivenditore dal quale il cuscino è stato acquistato. Fatta eccezione per le garanzie espressamente sopraccitate, tutte le altre garanzie di adattabilità o utilizzo per scopi particolari sono escluse. Non ci sono garanzie che si estendano oltre il periodo dichiarato sopra. La gestione della garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del prodotto. In nessun caso i danni coperti dalla garanzia includono qualsiasi danno consequenziale o che ecceda il costo originale del cuscino.



**U.S.:** 700 Ensminger Rd., Suite 112, Tonawanda, NY 14150  
Tel: 716-447-0050 Fax: 1.888.433.6834

**Canada:** 84 Citation Dr., Concord, Unit 1, ON L4K 3C1  
Tel: 905.695.0138 Fax: 905.695.0134  
info@motionconcepts.com



TRD0165-I, Rev-3.0

[www.motionconcepts.com](http://www.motionconcepts.com)



**matrix-vi**

**Kidabra-Vi**



**Manuale d'uso**

[www.motionconcepts.com](http://www.motionconcepts.com)

## Presentazione

# matrx-Vi Kid-ab-ra-Vi

CUSHION or BASE

**P**resentazione della serie MaTrx-Vi da Motion Concept. Il MaTrx-Vi e Kid-ab-ra-Vi - studiati per una protezione cutanea e stabilità superiori – sono stati sviluppati per quei clienti che hanno un rischio di problematiche cutanee da moderato a alto.



Il design abbina un efficace ed affidabile riduzione delle pressioni ad un cuscino sagomato anatomicamente, facile da pulire e con nessuna manutenzione e che è anche disponibile con una base rigida.

### SISTEMAZIONE DEL CUSCINO/BASE MATRx-VI

Quando sistemato correttamente, il cuscino MaTrx-Vi / Kid-a-bra-Vi è studiato per aiutare la prevenzione dello slittamento e riduzione dello sfregamento ma anche per offrire un supporto stabile e mantenere una buona postura. Tuttavia, la sistemazione dovrebbe essere eseguita solamente da un terapeuta o tecnico specializzato.

Nel caso aveste delle domande riguardanti specifiche limitazioni o necessità, è consigliato consultare il vostro terapeuta o fisiatra. La seduta dovrebbe sempre essere scelta e sistemata attentamente.

In posizione seduta, selezionare il cuscino che più si adatta alla larghezza dei fianchi. La lunghezza del cuscino dovrebbe essere uguale alla distanza dai glutei al cavo plopiteo.

- 1 Posizionare il cuscino verso il posteriore della carrozzina con l'etichetta identificativa rivolta verso il retro. Quando sistemato correttamente, i fianchi dovrebbero trovarsi verso il posteriore della carrozzina. Gli ischi (le ossa di seduta) dovrebbero essere centrati nella conca del cuscino.
- 2 Le fasce a strappo dovrebbero essere allineate con quelle della seduta della carrozzina. Attaccare tali fasce in modo da mantenere fermo il cuscino.
- 3 La distanza pedana dovrebbe essere regolata in modo tale che le gambe siano appoggiate stabilmente e confortevolmente sul cuscino. Una regolazione adeguata della distanza pedana incrementa il confort di seduta ed aiuta a diminuire il picchi di pressione di seduta.

### PORTATA

	MaTRx-Vi	Kid-ab-ra-Vi
Cuscini (fino a larghezza 22")	136 kg	68 kg
Cuscini bariatrici	272 kg	n/a
Basi rigide	113 kg	68 kg

### CURA E PULIZIA

Il vostro cuscino/base MaTrx-Vi e Kid-ab-ra-Vi hanno un esclusivo tessuto estensibile per la fodera che garantisce un accurato adattamento senza formare pieghe. Può essere facilmente pulito con un panno umido o lavato in lavatrice con ciclo delicato ed appeso ad asciugare. La fodera antiscivolo a tre strati è specialmente studiata per eliminare l'umidità mantenendovi freschi ed asciutti. La fodera interna anti-umidità dovrebbe sempre rimanere al suo posto sul cuscino in modo da proteggere la schiuma. Se la superficie della fodera interna si sporca, è sufficiente pulirla con un panno umido.

Il cuscino/base rigida è studiato per essere utilizzato solamente a temperatura ambiente. Se dovesse essere lasciato a temperature più basse, portarlo a temperatura ambiente prima dell'utilizzo. Sedersi sul cuscino a temperatura molto alta o molto bassa potrebbe causare danni alla cute.

Evitare oggetti contundenti o l'esposizione a fonti di calore eccessive o fiamme vive.

### RIASSEMBLAGGIO DOPO LA PULIZIA

Seguire le istruzioni di pulizia e manutenzione descritte sopra. Poi, riassemblare cuscino o base rigida e fodera rispettando le indicazioni di sistemazione con l'etichetta verso il posteriore ed assicurarsi che le fasce di fissaggio a strappo sul cuscino siano allineate con quelle della seduta della carrozzina.

### CAUZIONI

Il vostro cuscino/base rigida MaTRx-Vi è studiato per aiutare a ridurre la formazione di piaghe da pressione. Tuttavia, nessun cuscino può eliminare completamente le pressioni di seduta o prevenire le piaghe da pressione. È sempre meglio provare il vostro cuscino per qualche ora prima di un utilizzo prolungato ed avere un clinico che controlli che sulla la vostra cute non si stiano formando degli arrossamenti. Dovreste anche continuare a controllare regolarmente la presenza o meno di tali arrossamenti che sono il campanello d'allarme di problematiche cutanee. Se la vostra cute dovesse sviluppare degli arrossamenti, interrompere immediatamente l'utilizzo del cuscino e consultare il vostro medico o terapeuta.

Il miglior modo per evitare problemi legati alle piaghe da pressione è quello di capire le loro cause ed il vostro ruolo nel programma di gestione della cute. I cuscini MaTrx-Vi e Kid-ab-ra-Vi non sono un sostituto per una buona cura della cute che include una dieta appropriata, pulizia cambi di peso regolari.

Fare attenzione che il posizionamento di un cuscino su di una carrozzina può influire sul baricentro della stessa che potrebbe diventare instabile con il rischio potenziale di ferite. Bisogna perciò accessorizzare la carrozzina con un sistema anti-ribaltamento in modo da renderla più stabile.