

**VICAIR<sup>®</sup>**

the best in body support



# ACADEMY MATTRESS 415

DK

Brugermanual

CE

## AVAILABLE SIZES

	CM	INCH
Adult	80x200	32x80
	90x200	36x80
Paediatric	68x140	27x56

\* Width x Length

Special sizes and custom made products on request.

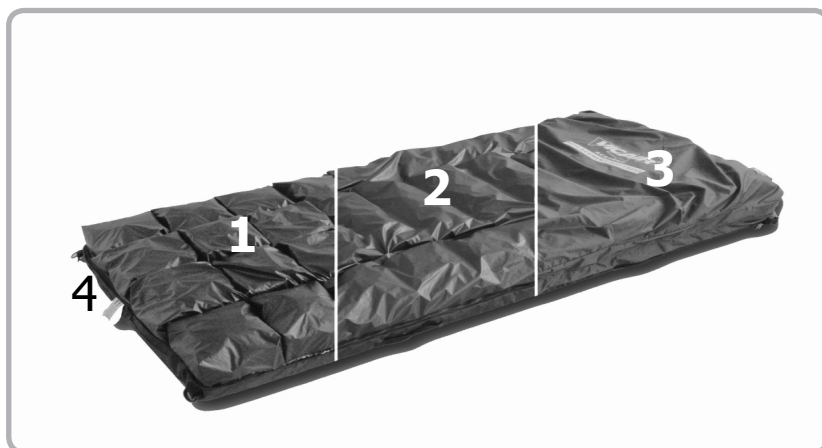


fig. A



fig. B



fig. C

## INTRODUKTION

Vicair® Academy Replacement Madras 415 er designet til patienter, der er i høj risiko for at udvikle tryksår samt for patienter, der har tryksår i stadie 1-4, men som er relative mobile.

Før du tager din nye Vicair® Academy madras i brug, bør du læse og sætte dig ind i følgende enkle, men vigtige anvisninger, så du kan få fuldt udbytte af madrassen.

For en skematisk oversigt af madrassen, se venligst det opdeltte billede (A) samt figur B og C.

### **Inderste madras**

Indermadrassen er opdelt i kamre (fig. A-1). Hvert kammer er fyldt med et specielt antal af trekantede luftfyldte SmartCells™, der tillader optimal trykfordeling. For at reducere shearkræfter er der monteret et glat lag stof (fig. A-2) over madrassen. For at gøre madrassen ekstra stabil er der nederst et underlag i skum. Gennem lynlåse på undersiden af madrassen er der adgang til alle kamre (fig. B).

### **Yderste betræk**

Det yderste betræk (fig. A-3) er fremstillet af et lavfriktions vandtæt materiale. Betrækket sidder løst over det inderste betræk for at undgå et stramt og ueftergiveligt betræk, og for at tillade nedsynkning i madrassen. Brug altid madrassen med dette yderste betræk lynet på madrassen.

### **Hoved- og benende**

Madrassen har en hoved- og en benende. Dette er indikeret ved en label (fig. A-4) og ved pictogram på betrækket.

### **Informationslabel**

I benenden findes en informationslabel, der viser madrastype og vigtig brugerinformation (fig. C). Denne er specielt nyttig til institutionsbrug.

### **Håndtag**

På hver side af madrassen er der monteret håndtag, der er kraftige nok til at holde til forflytninger med brugeren liggende på madrassen.

### **Fikseringsringe og spænder**

Hjørnerne på madrassen har fastmonterede dobbelte ringe, så man løst kan fæstne lagnet. To spænder sidder fast ved hovedenden til fastgørelse af forlængerstykke.

## IBRUGTAGNING OG TILPASNING

Vicair® Academy Replacement madrassen er klar til brug. Vi anbefaler at gennemføre følgende tjek inden ibrugtagning, helst sammen med plejepersonale eller terapeut.

### **Tjek korrekt størrelse**

Sørg for, at madrassen passer i sengens mål. Madrassen følger liggefladens indstillinger.

### **Tjek, at brugeren ikke "ligger igennem"**

Kroppen skal understøttes og må ikke ligge nede på bunden af madrassen. Det bør tjekkes, at brugeren ikke ligger igennem madrassen ved ibrugtagning første gang og hvis der ændres på fyldningsgraden i madrassen kamre. Brug ikke madrassen, hvis brugeren ligger igennem. Problemet kan dog i de fleste tilfælde løses ved at ændre på fyldningsgraden.

### **Ændring af fyldningsgraden**

Om nødvendigt kan hårdhedsgraden i madrassen ændres ved at fjerne eller ilægge celler i kamrene på madrassen.

## BRUG

### **Sørg for, der ikke opstår rødmen i huden**

Tjek jævnligt, at der ikke opstår rødmen i huden – især efter de første par dage på en ny madras. Hvis der opstår kraftig rødmen, bør madrassen ikke længere benyttes. Kontakt da terapeuten eller din lokale konsulent.

### **Forflytninger**

Sørg for at have god støtte ved forflytninger til og fra madrassen. Lav forflytningen med sengen i den laveste position og helst let tilbagelænet (knæene højere end hofterne). Undgå at glide på lavfriktions betrækket, når der sidder på kanten af madrassen.

### **Brug af madrassen i højder**

Eftersom hver SmartCell™ er fyldt med luft, kan det forekomme, at madrassen bliver hård eller ikke fungerer som normalt, hvis denne medbringes i fly. Dette kan afhjælpes ved at fjerne enkelte celler i madrassens kamre.

Vicair anbefaler ikke, at madrassen benyttes ved over 2400 m over havets overflade.

### **Genbrug af madrassen til anden bruger**

Før madrassen genbruges til en anden bruger, er det vigtigt, at denne rengøres og betrækket vaskes. Begge dele bør desinficeres. Sørg for, at mængden af celler i madrassen tilpasses den nye bruger.

## Udskiftning af betræk

Ved normalt brug anbefaler Vicair, at betrækket udskiftes én gang årligt. Betræk til madrassen kan købes separat hos forhandleren.

## Brandsikring

Udsæt ikke madrassen for åben ild eller høje temperaturer.

## Brugervægt

Max brugervægt 250kg.

## VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



Bemærk: Madrassen må ikke autoklaveres og kan ikke modstå ekstrem varme eller tryk.

## Eftersyn

Hver 3. måned bør madrassen efterses for slidtage eller ødelagte celler. I tilfælde af skade eller et større antal ødelagte celler, bør madrassen ikke længere benyttes. Kontakt da forhandleren.

## Rengøring af madrassen

- Aftør madrassen med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Vanskelige pletter klares ved først at fugte pletten og dernæst bruge en blød børste.
- Brug ikke hårde eller slibende midler eller skarpe genstande til at rengøre madrassen med.
- Læg ikke madrassen i blød.
- Vask ikke madras eller celler i vaskemaskine.

## Rengøring af betræk

Betrækket kan maskinvaskes. Se venligst vaskeanvisningen på mærkaten på indersiden af betrækket.

## Disinficering af madrassen

For at undgå smitte fra en bruger til en anden og i tilfælde af inkontinens, bør madrassen disinficeres.

- Fjern alle celler fra madrassens kamre. Noter det korrekte antal celler for hvert kammer.
- Fjern skumunderlaget.
- Maskinvask den tomme madras på 60°.
- Brug et mildt rengøringsmiddel til at rengøre cellerne og spray dem med et disinficerende middel.
- Maskinvask betrækket med antibakterielt middel.
- Lad begge dele tørre og »saml« madrassen igen.
- Spray begge dele med disinficerende middel.

## GARANTI

Vicair tilbyder 5 års garanti mod fabrikations- og materialefejl regnet fra den oprindelige købsdato, forudsat at produktet udelukkende er anvendt efter sit formål. Ved skade opstået på baggrund af unormalt brug, eksempelvis forkert håndtering, uhensigtsmæssig rengøring eller skødesløshed frafalder garantien. Skulle en fabrikations- og materialefejl opstå inden for 5 år regnet fra den oprindelige købsdato, vil Vicair efter eget valg reparere eller bytte produktet uden beregning. Garantien omfatter ikke punktering, revner eller brandmærker. Betrækket er ligeledes ikke omfattet af garantien, men nyt betræk kan købes separat.

For yderligere produktinformation henvises til vores hjemmeside [www.vicair.com](http://www.vicair.com) eller [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).

**WWW.VICAIR.COM**

**VICAIR BV  
Koetserstraat 10  
1531 NX Wormer  
The Netherlands**

**T +31(0)75 642 9999  
F +31(0)75 642 9990**

**E [info@vicair.com](mailto:info@vicair.com)**

[www.vicair.com](http://www.vicair.com)

