



NOVITA'

Ancora più facile da usare - con l'unità di comando ergonomica

La nuova unità di comando ergonomica di via go, studiata per il massimo comfort delle articolazioni.

Se soffri di artrite, hai una forza ridotta nelle mani o dita rigide, anche una breve camminata può diventare realmente faticosa - sia durante le uscite che nella vita quotidiana a casa.

La nuova unità di controllo ergonomica per via go risponde proprio a questa esigenza. I comandi già familiari rimangono invariati e vengono semplicemente integrati con un modulo di controllo ergonomico per il pollice, facilmente installabile anche in un secondo momento. In questo modo si riduce significativamente la forza necessaria, si rilassano le dita e la spinta risulta sensibilmente più facile.

L'unità di controllo è stata sviluppata per persone le cui dita o i cui polsi non sono più pienamente funzionali, ad esempio a causa di reumatismi, patologie neurologiche, osteoporosi o indebolimento legato all'età.

Grazie all'unità di comando ergonomica, la mano rimane rilassata e il controllo è sempre garantito. Comfort, sicurezza e facilità di movimento migliorano sensibilmente - senza necessità di modifiche importanti o installazioni complesse.

I vantaggi in sintesi:

- ✓ **Sollievo per dita** e articolazioni grazie al design ergonomico
- ✓ **Maggiore comfort**, soprattutto durante gli spostamenti più lunghi
- ✓ **Installazione semplice**: fissaggio all'unità di comando in soli tre passaggi

Trovi qui maggiori informazioni



Invacare Mecc San s.r.l.
Via Marco Corner, 19
36016 THIENE (VI) - Italy
www.invacare.it

via go®

Il propulsore di spinta compatto per le carrozzine manuali.



Aggancialo e parti

Semplice e senza sforzo: questa nuova unità di comando ergonomica può essere facilmente installata anche successivamente, in soli tre passaggi.



Per prima cosa, rimuovere l'unità di comando, quindi inserire l'unità di comando ergonomica dal basso.



Chiudere il coperchio superiore dell'unità di comando ergonomica in modo che il modulo aggiuntivo e l'unità di comando siano saldamente collegati tra loro (CLICK).



Ricollegare quindi l'unità di comando al supporto insieme all'unità di comando ergonomica.

L'unità di comando può essere ora attivata come di consueto e la velocità desiderata può essere selezionata.

www.alber.de

28.0006.6.02.01 Stand 01/2020 ©Alber GmbH, Albstadt. Soggetto a modifiche tecniche. Le immagini e le informazioni relative ai prodotti sono destinate esclusivamente agli operatori professionali del settore e non hanno finalità pubblicitarie. Beni informatici. All rights reserved. Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.