

HET MEEST STABIELE ROLSTOELKUSSEN

Ondersteuning trochanters

voor laterale stabiliteit | herverdeling van druk, om een lagedrukzone te creëren

Lagedrukzone - Twee compartimenten

voor superieure ontlasting van staartbeen en zitbeenknobbels & extra positioneer mogelijkheden



Ritssluiting halverwege en rondom voor gemakkelijke aanpassing met de gebruiker op het kussen | kussen behoudt haar vorm, waardoor de gebruiker beter beschermd is

Voorcompartimenten voor bovenbeengeleiding en stabiliteit | eenvoudig individueel aanpasbaar

DECUBITUS BEHANDEL PLAN

100% ADEMEND

VORM VAST

MACHINE WASBAAR

READY FOR USE

145 STANDAARD MATEN

- ▲ Negen aanpasbare compartimenten voor optimale stabiliteit
- ▲ Meer reikwijdte voor de gebruiker
- ▲ Extra bovenbeenpositionering

De Vicair Vector 02 is een voorgevormd kussen dat bestaat uit 9 individuele compartimenten. Het ontwerp van de compartimenten maakt het mogelijk specifieke delen van het bekken te beïnvloeden. Dit zorgt voor een unieke balans tussen het beschermen van de huid door herverdeling van druk rondom zitbeenknobbels en staartbeen, het stabiliseren van het bekken én het positioneren van de dijbenen. Voor specifieke behoeften kan de SmartCell vulling van elk van de 9 compartimenten gemakkelijk worden aangepast. Dit maakt het mogelijk de dichtheid van elk compartiment individueel te veranderen, wat ten goede komt aan gebruikers die: (1) een correctie of aanpassing voor een asymmetrisch bekken nodig hebben; (2) een (gedeeltelijke) ontlasting van het zitbeenknobbels en staartbeengebied wensen; (3) een correctie of aanpassing nodig hebben voor een betere uitlijning van de bovenbenen. (Bv. abductie, eenzijdig trippelen, opening van bekken-dijbeen hoek).

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus

Herverdeling van druk ▲▲▲▲▲
 Vermindering schuifkrachten ▲▲▲▲▲
 Microklimaatbeheersing ▲▲▲▲▲
 Schok- en trildemping ▲▲▲▲▲

Positioneren

Laterale stabiliteit ▲▲▲▲▲
 Frontale stabiliteit ▲▲▲▲▲
 Beperkt onderuit schuiven ▲▲▲▲▲
 Manuele aanpassing mogelijk ▲▲▲▲▲
 Uithoudingsvermogen verhogen ▲▲▲▲▲

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid ▲▲▲▲▲
 Betrouwbaarheid ▲▲▲▲▲
 Functiebehoud bij verkeerd gebruik ▲▲▲▲△
 Makkelijk in onderhoud ▲▲▲▲▲
 Hygiëne ▲▲▲▲▲

Functionaliteit & Toepassing

Comfort ▲▲▲▲▲
 Ultra lichtgewicht ▲▲▲▲▲
 Gemakkelijke transfers ▲▲▲▲△
 Beschikbare maten ▲▲▲▲▲
 Maximum gebruikersgewicht ▲▲▲▲△

BESCHIKBARE HOEZEN


Vicair O2 Top Cover, Comfair Cover, Incotec Cover en Reversible Cover.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte 6 en 10 cm
 Gemiddeld gewicht 725 gram
 Max. gebruikersgewicht 250 kg
 Machinewasbaar 60°C max.

KUSSEN MATEN

■ Standaard (Maat >53 cm altijd dikte 10cm)
 ■ Op aanvraag

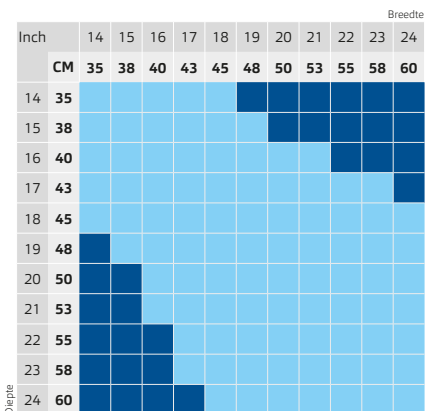

070069-OVR-NL-REV01/2024