



OBS! Läs följande instruktioner noga före montering.

Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information som måste överlämnas till brukaren vid leverans.

Montering av Flo-tech PT Positioneringsbälte

Placera remmen under den undre, främre höftkammen (ASIS) och fäst den i rullstolen i önskad vinkel. Bästa resultat erhålls om remmen monteras i 45-60 graders vinkel mot sitsen.

Om bäckenbältet monteras över låren framför stora lårmuskeln förhindrar du att brukaren glider.

TRANSPORT I FORDON

Invacares bälten för bäckenpositionering är endast lämpliga vid transport om de fästs i en säker punkt på rullstolens ram. Ett separat bälte för brukaren ska alltid användas. Se till avsnittet om transport i rullstolens bruksanvisning.

UNDERHÅLL

Före varje användning:

Leta efter sprucket tyg/sömmar samt lösa eller slitna skruvar.

Vartannat år:

Kontrollera att selen inte har lösa eller slitna infästningar och att momentinställningarna kontrolleras av en kvalificerad person. Kontrollerna bör ske oftare om en tyngre, då det kann medföra större belastning.

Denna produkts förväntade livslängd är 30 månader.

ANVÄNDNINGSBEGRENSNINGAR

Invacares bälten för bäckenpositionering är endast lämpliga vid transport om de fästs i en säker punkt på rullstolens ram. Se avsnitt 2 ovan om "Transport".

UTBILDNING

Om du av behöver ytterligare utbildning för montering av denna utrustning ber vi dig att kontakta oss på något av numren nedan, där du erbjuds rådgivning och support.

KOMPATIBILITET

Invacares bäckenbälten passar rullstolar som har en ram av rör med diameter 19 mm, 22 mm eller 25 mm.

KVALITET

Vi förbehåller oss rätten att ändra konstruktioner utan att meddela detta i förväg, för att kunna infria vår policy om ständig förbättring. Alla rättigheter reserverade.



RENGÖRING OCH VÅRD

Bältessortimentet kan rengöras med ett neutralt rengöringsmedel (t.ex. varmt tvålatten) och/eller våtservetter för engångsbruk. Alla Invacares bälten med klämspanne av plast kan tvättas i maskin vid 60°C. Låt dem lufttorka. Torktumling är inte lämplig. Läs tvättinstruktionen på etiketten.

OBS! Bälten med spanne av biltyp ska handtvättas försiktigt och lufttorka.

Monteringsbeslagen kan rengöras med vanliga hushållsrengöringsmedel och en mjuk trasa. Be den infekitionsansvarige personen på din arbetsplats om råd om produkten skulle bli smittad. Förvaras torrt.



VARNING!



- Om ett bäckenbälte monteras över den nedre delen av buken kan diafragman blockeras och orsaka andningssvårigheter.

SÄKERHET

- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att positioneringsbältet justeras vid varje användning. Positioneringsbältet ska dras åt så hårt att användaren inte kan glida ner mellan bältet och sitsen.
- Det positioneringsbälte som levereras med din rullstol är avsett för att stödja kroppspositionen och inte för att hålla brukaren på plats vid transport. Om brukaren sitter kvar i rullstolen vid transport ska ett separat, lämpligt bälte användas.
- Denna produkt får inte användas som fastsättningsrem.

A



Bilspanne

B



Klämspanne av plast

C



Spanne med dubbellås

D



Monteringsats
Antal: 2

MONTERINGSANVISNING

STEG 1 — Packa upp positioneringsbältet och övriga komponenter ur förpackningen.

STEG 2 — Kontakta leverantören om produkten levereras i oönskat skick.

STEG 3 — Fäst spännena med de tre spåren (se bild 1) på önskad plats i rullstolens ram med hjälp av universalklämmorna. De passar runda rörramar med 19 mm, 22 mm och 25 mm tjocklek (se bild 2).

Det rekommenderas att alla skruvar dras åt till 8,5 Nm.

Bild 1



Bild 2



BRUKSANVISNING

Justering

1. Se till att brukaren sitter riktigt med rumpan så långt bak på sitsen som möjligt.
2. Placera bältet i önskad position och tryck ihop spännets två sidor. Dra för att kontrollera att spännet är låst.
3. Justera bältets remlängd med dragremmarna på spännets sida/sidor (se bild 3). Bältet ska sitta ordentligt men bekvämt. Det ska finnas plats för två fingrar mellan brukaren och bältet. Det är smidigast om spännet sitter i mitten.

Knäppa upp bältet

Instruktioner för att knäppa upp bältet finns i tabellen nedan.

Bild 3



Typ av bäckenbälte	Mekanism
Klämspänne	Använd tummen och pekfingeret och kläm in de två "knapparna" av plast högst upp och längst ner på spännet.
Bilspänne	Tryck på knappen i spännets mitt.
Plastspänne med dubbellås	Använd tummen och pekfingeret och kläm in de två "knapparna" av plast högst upp och längst ner på spännet samtidigt som du trycker på knappen i mitten.

GARANTI

Flo-tech PT Positioneringsbälten har en garanti på 12 månader.