


CE



DSL-105 induktiv huvudstyrning

DXTM DEN
OPTIMALA
KÖELEKTRONIKEN
FÖR ELRULLSTOLAR

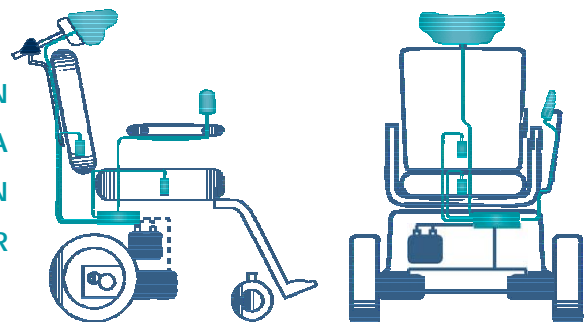

dynamic™ 

DSL-105

BRUKSANVISNING

Instruktioner för slutanvändare

För att du och andra ska vara säkra när du använder DSL-105 induktiv huvudstyrning ska du observera följande försiktighetsanmärkingar:



Induktiv huvudstyrningen kan inte användas som ett huvudstöd när kontrollen är inställd på att köra rullstolen eftersom rullstolen kan åka iväg om huvudet kommer nära dynorna.

- **Om du vill använda det som ett huvudstöd måste du stänga av rullstolen först.**



Sensorerna i huvudstyrningen är känsliga för vatten. Det innebär att om det finns tillräckligt med vatten nära sensorerna kan de aktiveras och rullstolen kan börja åka iväg.

- **Använd inte huvudstyrningen med blött hår** eller om du har något blött på huvudet eller kring halsen, när det regnar ute eller i situationer där vatten kan komma nära sensorerna.



Sensordynorna är tillverkade av vattentät vinyl. Detta material gör att vatten och svett snabbt rinner av dynorna innan sensorerna hinner aktiveras.

- **Täck inte sensordynorna** med något material (t.ex. tyg för ökad komfort). Om dynorna täcks med material som kan absorbera vatten rinner inte vattnet av dynorna och rullstolen kan börja åka iväg och stannar inte förrän vattnet har torkat.
- Kontrollera regelbundet om det finns sprickor, skador eller någon form av slitage på huvudstyrningens vinyldynor. **Om vinylskyddet skadas ska huvudstyrningen inte användas** och skydden ska omedelbart bytas ut. Hål i vinylen kan ge vatten möjlighet att tränga in i dynorna, vilket kan aktivera sensorerna och göra att rullstolen börjar åka iväg.



Avståndssensorerna är känsliga för elektriska vågor, till exempel från bärbar kommunikationsutrustning och elektroniska säkerhetsspärrar.

- Använd inte DSL-105 nära utrustning som skickar ut starka elektriska vågor eftersom det kan leda till att rullstolen plötsligt börjar köra iväg.



Om rullstolen plötsligt kör iväg **stoppar du den genom att trycka på**

- **på/av-knappen** eller
- "Lägesknappen" (endast i 3Q-läge).

Obs! Denna bruksanvisning är endast för vägledning och är inte avsedd att ersätta den obligatoriska produkträningen för brukaren.