

Bruksanvisning



ÅTERFÖRSÄLJARE: Den här bruksanvisningen MÅSTE ges till brukaren.

BRUKARE: INNAN du använder produkten ska du läsa denna bruksanvisning och spara den för framtida behov.

Yes, you can.



Invacare® Matrix® PB

I Allmänt

I.1 Symboler

I den här bruksanvisningen används symboler som gäller risker eller osäker användning som kan orsaka skada på person eller egendom. Symbolerna definieras nedan.



VARNING

En varning informerar om en riskfylld situation som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.

FÖRSIKTIGT

Försiktigt informerar om en riskfylld situation som kan leda till skada på egendom och/eller lättare personskada om den inte undviks.



Ger användbara råd, rekommendationer och information för en effektiv och problemfri användning.

I.2 Översikt

Viktig information

Det bästa sättet att undvika problem med trycksår är att förstå vad som orsakar dem och din roll i ett hudvårdsprogram.

Du bör konsultera din terapeut och läkare om du har några frågor angående individuella begränsningar och behov.

Alla dynor bör väljas noggrant. Det bästa är att arbeta tillsammans med din terapeut och din läkare för att se till att valet av dynor passar dina individuella behov.

När individens behov blir mer komplicerade blir det ännu viktigare att välja rätt dynor.

Matrix PB

Ryggstödet Matrix PB är konstruerat i formgjutna skumdynor som sträcker sig runt backstycket i ABS för att ge maximal komfort. Backstycket är format för att ge utmärkt stöd och läge. Till ryggstödet Matrix PB kan du även välja till ett ländryggsstöd som kan installeras bakom den formade skumdynan för att ge ytterligare möjligheter att justera läget

Yttre klädsel

Den yttre klädseln är tillverkad i ett nätmaterial som andas och är fuktbeständigt. Du bör göra rent och inspektera den yttre klädseln regelbundet. Se Skötsel och underhåll på sida 103.

2 Säkerhet

i Kontrollera ALLA delar för att se om de har skadats under leveransen. Om någon del är skadad ska den INTE användas. Kontakta återförsäljaren för mer information.

2.1 Transport av en brukare i en rullstol som utrustats med ett Matrix-ryggstöd i ett motorfordon

Följande riktlinjer ska göras tillgängliga för alla parter som ansvarar för transport av användaren, t.ex. skolor och transportföretag.

När det är praktiskt möjligt ska brukaren överföras från rullstolen till en plats i fordonet och använda ett säkerhetsbälte över höften och diagonalt över bröstet eller en lämplig bilbarnstol.

Matrix-ryggstödet har testats dynamiskt och uppfyller kraven i ISO 16840-4 och avsnitt 20, ANSI/RESNA WC/volym 4 "Sittsystem för rullstolar för användning i motorfordon". En ersättningsrullstolsbas (SWCB) och en Hybrid III antropomorfisk testenhet av medelstorlek-vuxen man användes vid framåtriktade frontala krocktester. Ersättningsrullstolsbasen sattes fast på fyra ställen med ett fastspänningsbälte och fastspänning av brukaren skedde med ett fastspänningssystem över höft och diagonalt över bröstet som förankrats i fordonet.

Matrix-ryggstöd ska endast användas tillsammans med rullstolar som uppfyller prestandakraven i ANSI WC19 eller ISO 7176-19.

Före transport i fordonet ska du kontrollera följande:

Matrix-ryggstöd - måste sitta fast ordentligt på rullstolen enligt beskrivningen i bruksanvisningen.

Bälten och selar för att bibehålla kroppsställningen - ska sitta kvar under transport. De är emellertid endast utformade för att ge stöd av kroppsställningen och är inte avsedda att ge transportsäkerhet.

Huvudstöd - måste sättas fast ordentligt och justeras korrekt nära patientens bakhuvud under transport för att minska risken för whiplashskada.

System för fastspänning av rullstol och fastspänning av brukaren (WTORS)

Fastspänning av rullstolen - Rullstolen måste spännas fast ordentligt i fordonet i framåtriktad position, i enlighet med anvisningar från tillverkare av rullstolen och fastspänningssystemet.

Brukarfastspänning - Ett lämpligt system för fastspänning av brukaren måste också monteras i enlighet med tillverkarens anvisningar. Minst ett bälte över höften och ett diagonalt bälte (endast bälte över höften räcker inte). Bälten som går över axeln och fäster på fordonets golv ska undvikas om möjligt, eftersom de kan orsaka stor belastning nedåt genom brukaren vid en stöt. Rekommenderad typ fäster ovanför och bakom axeln som ett säkerhetsbälte. Den del av bältet som går över höften ska sitta åt ordentligt över brukarens bäcken och det ska inte kunna åka upp över bukområdet. Den del av bältet som sitter över den övre bröstkorgen ska vara i kontakt med brukarens bröstorg och gå över axeln/axlarna, utan att skära in i nacken eller glida av axeln/axlarna.

i Om rullstolen och Matrix-ryggstödet ska transporteras utan brukaren i ska rullstolen spännas fast med lämplig utrustning enligt tillverkarens anvisningar. Om utrustningen ska tas isär för transport ska du se till att alla delar är säkert fastspända i fordonet.

2.2 Användning

Matrix PB är format för att ge mittstöd och läge. Den stora mängden storlekar innebär utmärkt stöd och komfort för många olika behov hos brukarna.

2.3 Allmänna varningar



VARNING

ANVÄND INTE DENNA PRODUKT ELLER NÅGON TILLVALSUTRUSTNING INNAN DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DESSA INSTRUKTIONER OCH EVENTUELLT YTTERLIGARE INSTRUKTIONSMATERIAL, SÅSOM ÄGARHANDBÖCKER, SERVICEHANDBÖCKER ELLER INSTRUKTIONSBLAD SOM MEDFÖLJER PRODUKTEN ELLER TILLVALSUTRUSTNING. OM DU INTE KAN FÖRSTÅ VARNINGARNA ELLER INSTRUKTIONERNA SKA DU KONTAKTA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDPERSONAL, ÅTERFÖRSÄLJAREN ELLER TEKNISK PERSONAL INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN – ANNARS KAN DET ORSAKA SKADA PÅ PERSON ELLER EGENDOM.

VARNING FÖR TILLBEHÖR

Invacares produkter är särskilt utformade och tillverkade för att användas med tillbehör från Invacare. Tillbehör från andra tillverkare har inte testats av Invacare och vi rekommenderar inte att sådana används tillsammans med Invacares produkter.

MONTERINGSVARNING

Se till att alla tillbehör är monterade och sitter fast ordentligt efter alla justeringar, reparationer eller service och före användning.

MONTERA INTE Matrx PB-anordningen på ryggstödsrör med en utvändig diameter som överstiger 2,5 cm eller understiger 1,9 cm. Om den används kan personskador eller skador på utrustningen inträffa.

Monteringspositionen för Matrx PB är direkt kopplad till rullstolens stabilitet. När Matrx PB läggs till en VINKLINGSBAR och/eller TILTBAR rullstol kan detta leda till sämre stabilitet. Det kan bli nödvändigt att positionera om FRAMHJUL, BAKHJUL, RYGGSTÖDSVINKEL, TILTUTRYMME, TILTNINGSLÄGE och/eller SITTDJUP före användning. Iaktta stor försiktighet när du använder en ny sittposition.

När Matrx PB läggs till en VINKLINGSBAR och/eller TILTBAR rullstol måste en STABILISERARSTAG eller HORIZONTELL STABILISERINGSSTAG finnas på plats för att stabilisera ryggstödsrören.

Kontrollera att Matrx PB är korrekt säkrat på rullstolen före användning. Annars kan personskador eller skador på utrustningen inträffa.

VARNING

Huden bör undersökas ofta efter att en ny sits har monterats.

Du bör konsultera din terapeut och läkare om du har några frågor angående individuella begränsningar och behov.

Det bästa är att arbeta tillsammans med din terapeut, läkare och utrustningsleverantör för att se till att sitsvalet passar dina individuella behov.

När individens behov blir mer komplicerade blir det ännu viktigare att välja rätt sits.

2.4 Max brukarvikt och modellnummer



Se tabellen för maxvikt och modellnummer.

MPB = Posture Back (Ställningsryggstöd), PBD = Posture Back Deep (Djupt ställningsryggstöd)

HDB = Posture Back Heavy Duty (Kraftigt ställningsryggstöd), DHD = Posture Back Deep Heavy

Duty (Kraftigt djupt ställningsryggstöd)

Fetstil = Grundmodeller, Grå = Storlekar som ej finns tillgängliga.

BREDD	HÖJD			FORMDJUP	MAXVIKT
	30 CM	41 CM	51 CM		
36 cm	MPB3631-NH	MPB3641-NH		13 cm	136 kg
	PBD3631-NH	PBD3641-NH		18 cm	
41 cm	MPB4131-NH	MPB4141-NH	MPB4151-NH	13 cm	
	PBD4131-NH	PBD4141-NH	PBD4151-NH	18 cm	
43 cm	MPB4331-NH	MPB4341-NH	MPB4351-NH	13 cm	
	PBD4331-NH	PBD4341-NH	PBD4351-NH	18 cm	
46 cm	MPB4631-NH	MPB4641-NH	MPB4651-NH	13 cm	
	PBD4631-NH	PBD4641-NH	PBD4651-NH	18 cm	
51 cm	MPB5131-NH	MPB5141-NH	MPB5151-NH	13 cm	
	PBD5131-NH	PBD5141-NH	PBD5151-NH	18 cm	
56 cm		HDB5141-NH	HDB5151-NH	13 cm	227 kg
		DHD5141-NH	DHD5151-NH	18 cm	
		HDB5641-NH	HDB5651-NH	13 cm	
61 cm		DHD5641-NH	DHD5651-NH	18 cm	
		HDB6141-NH	HDB6151-NH	13 cm	
		DHD6141-NH	DHD6151-NH	18 cm	

3 Förberedelser

3.1 Innehåll i sats med monteringsmaterial



Maskinvara säljs separat.

Om något av monteringsmaterialet saknas eller har förlorats ska du kontakta kundserviceavdelningen för att vi ska kunna skicka nödvändiga ersättningsdelar till dig. Se **Kontaktinformation** på sida 119.

ST	BESKRIVNING
2	Monteringsplattor för ryggstöd
2	Rörklämmor
2	Rörmellanlägg (25 mm (1"))
2	Rörmellanlägg (22 mm (7/8"))
6	Justeringskruvar för djup/lutning
6	Skrubar till rörklämmor
2	Mutterplattor till rörklämmor
4	Långa monteringsstift (tillval)

3.2 Verktyg som behövs

Skiftnycklar: 7/8" (22 mm)

Insexnycklar: (tillhandahålls)

Kökskniv/sax

Stjärnskruvmejsel

Måttband/linjal

3.3 Före montering

Monteringskonfiguration



VARNING

När monteringspositionen för Matrx PB fastställs ska du se till att rullstolens stabilitet inte påverkas.


När ryggstödet positioneras framåt och bakåt ändras brukarens tyngdpunkt i rullstolen. En position långt bak kan minska rullstolens stabilitet bakåt betydligt. Likaså kan en position längre fram minska rullstolens stabilitet framåt.

Monteringsplattorna levereras hopmonterade på rörklämmorna i den bakre monteringskonfigurationen. Detta ger maximalt sittdjup för rullstolens sits (upp till maximalt 64 mm (2,5") förskjutning bakåt - se bild A).

Genom att ändra riktning på monteringsplattorna på rörklämmorna kan anordningen konfigureras om* för att ge en monteringsposition längre fram för ryggstödet, om så önskas (upp till maximalt 64 mm (2,5") förskjutning framåt - se bild B).




Varje monteringsplatta är också utformad så att den möjliggör en justering på 38 mm (1,5") framåt och bakåt i förhållande till rörklämmen

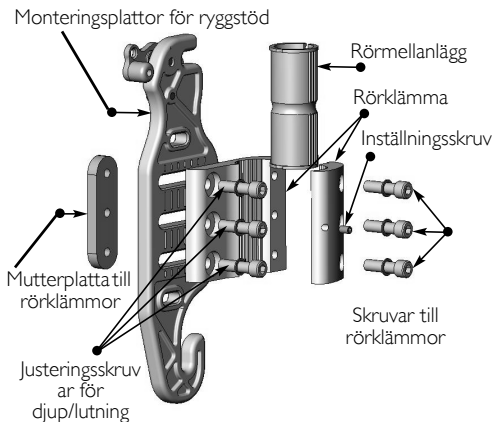

*Gör så här för att konfigurera om en monteringsplatta/rörklämma för placeringen av ryggstödet så långt fram som möjligt:

1. Ta loss monteringsplattan från rörklämma (3 skruvar),
2. Roterera rörklämma 180° och sätt fast den igen på monteringsplattan,
3. Montera rörklämma enligt illustrationen i bild B.

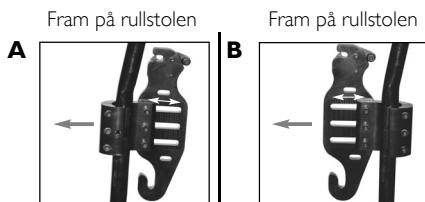

Monteringsplattan placerad så att ryggstödet hamnar så långt bak som möjligt

Monteringsplattan placerad så att ryggstödet hamnar så


Anpassning efter ryggstödsrörets storlek




På vissa rullstolar kan det finnas en ojämn skarv i ryggstödsröret där ett rör med mindre diameter har förts in i ett rör med större diameter. Om rörklämma måste monteras över skarven kan plastmellanläggen kapas på mitten, så att klämmorna kan fästas ordentligt på ryggstödsrören (se bild B).

För rullstolar med korta ryggstödsrör kan det bli nödvändigt att montera Matrix PB ersättningsrör (PBCR). De är utformade för att ersätta befintliga handtag för påskjutning eller rörflängningar på standardryggstödsrör på 25mm(1"). Rörklämmorna kan monteras direkt på ersättningsryggstödsrören så att Matrix PB kan monteras ordentligt. Ersättningsrör kan erhållas från Motion Concepts (artikelnr TRX2810).

- 25 mm (1") ryggstödsrör - rörklämmor monteras utan plastmellanlägg.
- 22 mm (7/8") ryggstödsrör - kräver 22 mm (7/8") plastmellanlägg (medföljer)
- 19 mm (3/4") ryggstödsrör - krävs 19 mm (3/4") plastmellanlägg.

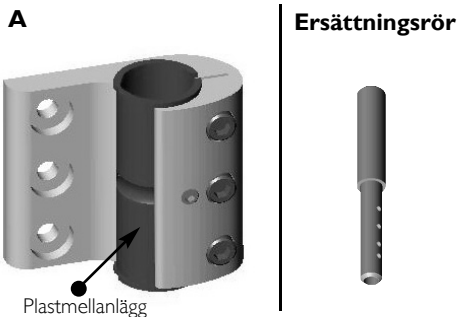

B

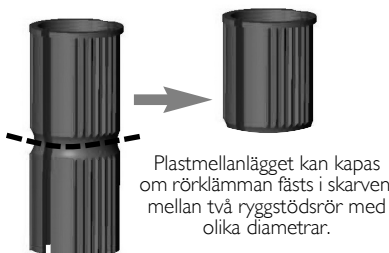

Plastmellanlägget kan kapas om rörklämma fästs i skarven mellan två ryggstödsrör med olika diametrar.

3.4 Montera Matrx PB

Montera monteringsplattorna



VARNING

Monteringsmaterialet som tillhandahålls har hög hållfasthet som har testats. ANVÄND INTE annat material. Använd endast det material som tillhandahålls.



1. Ta bort befintlig ryggstödsklädsel (om tillämpligt).
2. Se till att du har önskat monteringsmaterial för montering av monteringsplattan för brukaren. Se Före montering på sida 96.
3. Lossa rörklämskruvarna (3 st) och montera provisoriskt rörklämmorna (med monteringsfästen) på ryggstödsrören. (Montera plastmellanlägg om sådana behövs).
4. Med början på ena sidan ska du placera rörklämman på önskad höjd på ryggstödsröret och dra åt skruvarna på klämman tillräckligt hårt för att den ska sitta på plats. Klämmorna och inställningsskruvarna dras åt fullständigt när ryggstödet har monterats och alla sista justeringar har gjorts.
5. Mät den exakta höjden som rörklämsanordningen har monterats på från en fast punkt (t.ex. sittramen) och montera den andra rörklämman på samma höjd på det andra ryggstödsröret – se bild A. Se till att rörklämmorna/monteringsplattorna har monterats parallellt till varandra.



Ytterligare övre och nedre justeringshål finns på monteringsplattan för att montering ska kunna ske på olika höjd om det finns hinder. Om dessa alternativa justeringshål används höjs eller sänks ryggstödet med 22 mm (7/8"). Dessa alternativa hål begränsar inställningen av djup och/eller lutningsvinkel.

6. Gör så här för att montera Matrx PB på monteringsplattorna:
 - A. Skjut in de nedre monteringsstiften i de böjda spåren längst ned på monteringsplattorna (se bild B).
 - B. När de nedre stiften är på plats ska du låsa/knäppa fast de övre monteringsstiften i låsmekanismen längst upp på monteringsplattorna.

A Rullstolen framifrån med ryggstödet borttaget

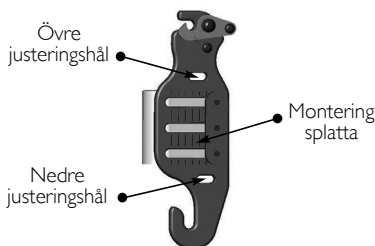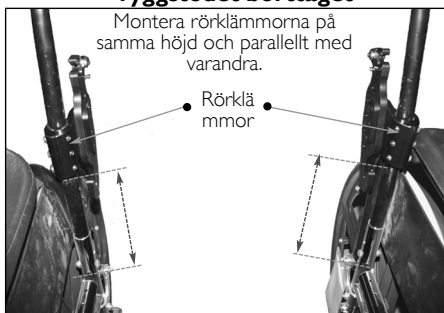

B Övre monteringsstift



Nedre monteringsstift

Konfiguration/inställning av monteringsstift



Standardmodellerna av MatrX PB ryggstöd finns i flera olika breddar (36 cm (14"), 41 cm (16"), 43 cm (17"), 46 (18") och 51 cm (20")). Två uppsättningar monteringsstift tillhandahålls med varje MatrX PB (standardstift och långa stift). Ryggstöden har monterats på fabriken med standardmonteringsstiften.

Standardstiften ger tillräcklig justerbarhet för att MatrX PB ska kunna monteras på de flesta vanliga ryggstödsrör på rullstolar och kompenserar för bredder på ryggstödsrören som är upp till 25 mm (1") smalare än ryggstödet's bredd. Långa stift kan emellertid krävas i situationer där rullstolens sittram (även ryggstödsramen) är bredare än MatrX PB ryggstödsbredd. De långa stiften gör att ryggstödet kan användas med en bredare sitsstorlek som är upp till 25 mm (1") bredare än ryggstödet.

Exempel: För en 41 cm (16") MatrX PB:

38 cm (15") bredd på rullstolens sittram (ryggstödsrör) = standardstift

41 cm (16") bredd på rullstolens sittram (ryggstödsrör) = standardstift

43 cm (17") bredd på rullstolens sittram (ryggstödsrör) = långa stift

När den smalaste inställningen för ryggstödet används, kan djup-/lutningsjusteringar inte göras i lika stor mån som för bredare positioner.

Förlängda monteringsstift* (EMP) finns tillgängliga (säljs separat) för att MatrX PB-ryggstöden ska kunna monteras på sittramar som är upp till 5 cm (2") bredare än ryggstödet.

**MatrX PB
bakifrån**

Monteringsstift (4 st)

Justerbart stiftdjup



FÖRSIKTIGT

Förlängda monteringsstift är endast för användning med ryggstöd i standardstorlekarna (en viktkapacitet på upp till 136 kg (300 pund)). Förlängda stift rekommenderas inte för användning vid vinkling.

Justering av monteringsstift



FÖRSIKTIGT

Om stiftet monteras fel kan det orsaka skada på bakstycket och/eller monteringsplattorna. Se till att det är tillräckligt mellanrum mellan monteringsplattan och monteringsstiften (ett minsta mellanrum på 3 mm (1/8") rekommenderas).

Se till att fläsmuttrarna har dragits åt fullständigt. Om detta inte görs kan det orsaka skada/sprickor i bakstycket.

Se till att stiften inte roterar när fläsmuttrarna dras åt. Använd ALDRIG Loctite® på monteringsmaterial.

1. Bestäm hur mycket varje monteringsstift måste justeras med ryggstödet ordentligt fastsatt på rullstolen (se figuren).
2. Ta bort ryggstödet från rullstolen och använd en skiftnyckel för att lossa fläsmuttern på de stift som måste justeras. Ersätt vid behov standarmonteringsstiften med långa monteringsstift.
3. Justera monteringsstiftens djup (medurs för att förkorta/moturs för att förlänga) så att det blir ett minsta mellanrum på 3 mm (1/8") mellan stiftets överdel och monteringsplattan.
4. Dra åt alla fläsmuttrar igen så att stiften sitter ordentligt på plats.




Montera ryggstödet

1. Kontrollera att den allmänna passformen och inriktningen av ryggstödet är korrekt (justera efter behov).
2. Sätt fast rörklämmorna ordentligt på båda ryggstödsrören och dra åt inställningskruvarna så att monteringsplattan inte glider eller vrider sig.
3. Brukaren ska sitta i rullstolen så att optimala inställningar för djup och lutning för ryggstödet ska kunna fastställas. Lossa på djup-/lutningskruvarna på monteringsplattorna och justera ryggstödet till önskat djup och önskad lutningsvinkel, medan brukaren sitter i stolen. Dra åt alla skruvar för att låsa fast ryggstödet på plats.



Se till att justeringen av ryggstödet djup/lutning görs symmetriskt* på höger och vänster monteringsplattor.

De vertikala skårorna på monteringsplattorna är utformade som referenspunkter för att underlätta symmetrisk montering (se bilden). Eftersom ryggstödet kan monteras i en lutad position, om så önskas, monteras det inte alltid parallellt med de vertikala skårorna.

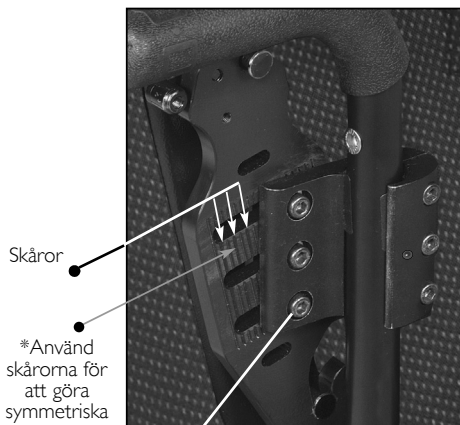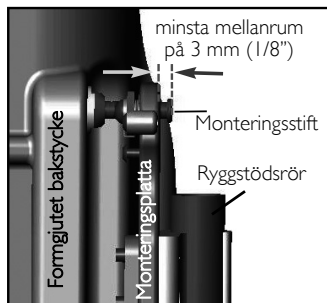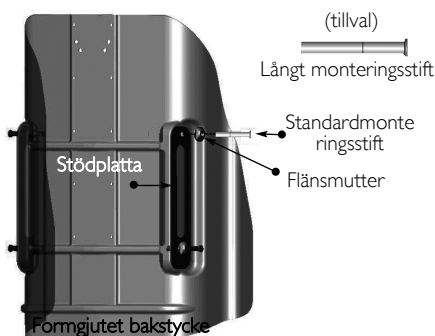

*Använd skårorna för att göra symmetriska justeringar på vänster och höger monteringsplattor.

4 Användning

4.1 Ta loss ryggsätet från rullstolen


- Utför något av följande:
 - Lossningsmekanism utan snöre - Lyft på båda låsspakarna samtidigt (vänster och höger) för att låsa upp låsmekanismen och frigöra de övre stiften från monteringsplattorna. Se bilden.
 - Mekanism för att lossa med snöret - Lyft snöret för att låsa upp/öppna låsspakarna. Se Mekanism för att lossa snöret med en hand på sida 102.
- Lyft hela ryggsätet uppåt och framåt för att lossa de nedre stiften från de nedre spåren i monteringsplattorna.



4.2 Tillbehör för huvud-/nackstöd (tillval)

Alla Matrix PB ryggstöd innehåller en inbyggd huvudstödsplatta som kan användas för att fästa tillbehör för huvud- och nackstöd.

Två uppsättningar monteringshål för huvudstödsklämmor tillhandahålls för att kunna montera de flesta standardtyper av huvudstöd (se bilden). Vid behov kan ytterligare hål borras i bakstycket och huvudstödsplattan för att montera nödvändigt monteringsmaterial.

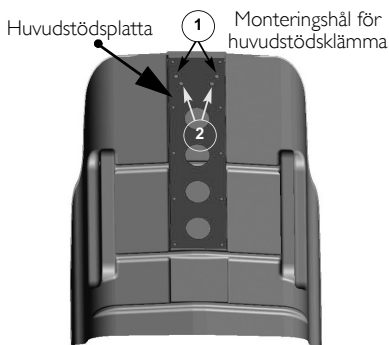

Montera huvudstödsklämma




VARNING

Huvudstöd som har monterats på Matrix PB ryggstöd är inte avsedda att användas under transport och ger inte tillräckligt stöd vid en eventuell krock. Brukare av rullstolar ska överföras till lämplig sittplats i transportfordonet och lämpliga fastspänningsdon som tillhandahålls av bilindustrin ska användas.

Huvudstödsplattan ligger insänkt i bakstycket för att förhindra att monteringsmaterial sticker ut genom ryggstödsdynan. Se till att monteringsmaterial från huvudstödsklämman inte sticker ut utanför det insänkta området.

1. Öppna (dra ned) klädseln för att komma åt lämpliga monteringshål för huvudstödsplattan (borra upp nya hål vid behov).
2. Stäng klädseln och gör försiktigt hål genom tyget motsvarande monteringshålen som ska användas för huvudstödsklämma.
3. Öppna och dra ned den främre halvan av klädseln (tillräckligt för att komma åt lämpliga monteringshål på huvudstödsplattan).
4. Placera huvudstödsklämman på utsidan av ryggstödsklädseln och tryck monteringskruvarna inåt genom tyget och genom huvudstödsplattan.
5. Sätt fast (skruva fast) huvudstödsklämman på plats och stäng klädseln.

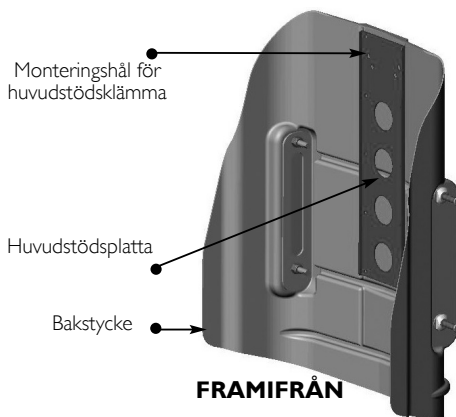

4.3 Mekanism för att lossa snöret med en hand


1. Trä nylonsnöret genom hålen i fastlåsningsmekanismen längst upp på vänster och höger monteringsplattor (se bild A)
2. Montera snörlåsmekanismen på snöret (se bild B). Tryck på knappen för att öppna låsmekanismen och föra in nylonsnörets två ändrar genom öppningen.
3. När ryggstödet har monterats ordenligt på rullstolen ska snörenas längd justeras så att de hänger i ungefär 35-45° vinkel längs bakstycket (då fungerar frisläppningsmekanismen effektivare). Vid behov ska överskott av snöre kapas/tas bort för att minska risken för att det trasslar in sig i något. När det har justerats ska de lösa snörändarna knyts ihop i en knut för att förhindra att snörlåset glider.



Om snörets längd har ändrats ska ändarna smältas försiktigt för att förhindra att de fransar sig.



Trä snöret genom låsmekanismen.

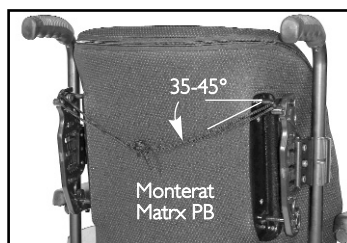

Lyft på snöret för att ta loss ryggstödsdynan.



5 Skötsel och underhåll

5.1 Rengöring

Klädseln kan vid behov lätt torkas av med en fuktig trasa.

Klädseln kan tas bort och tvättas eller för att du ska komma åt ryggstödet insida för att göra ändringar.

Öppna blixtlåset längst upp och ta försiktigt bort klädseln genom att lossa på kardborrbanden längs sidorna på bakstycket. Blixtlåset ska vara stängt vid tvätt.

Om klädseln blir kontaminerad ber du den ansvarige för infektionsbekämpning om råd. Du kan även kontakta Invacare för information om deras saneringsrutiner.

5.2 Inspektion



VARNING

Kontrollera alla fästen varje vecka för att se till att mekaniska anslutningar och tillbehör sitter fast säkert - annars kan personsador eller materialsador uppstå.

FORTSÄTT INTE använda produkten om problem har upptäckts. Underhåll kan utföras hos eller arrangeras via din utrustningsleverantör.

Inspektera visuellt metalldelar, byglar, stoppningsmaterial, skum (om tillgängligt) och plastdelar och se om de är deformerade, rostiga, trasiga, slitna eller ihoptryckta.

6 Efter användning

6.1 Återanvändning



VARNING: Risk för skada

Låt alltid en återförsäljare kontrollera produkten för att se om den är skadad innan du överlämnar den till någon annan brukare. Om produkten är skadad ska den INTE användas. Om den används kan det orsaka personskada.

Ryggstödsdynan kan återanvändas. Följande åtgärder ska vidtas:

- Rengöring och desinfektion enligt Rengöring på sida 103.
- Inspektion enligt Inspektion på sida 103.
- Ryggstödsdynan ska justeras efter den nya användaren i enlighet med Montera ryggstödet på sida 100.

7 Garanti

Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen/brukaren av vår produkt.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter utöver de som varierar mellan stater.

Invacare/Motion Concepts garanterar att det inte uppstår materialdefekter eller konstruktionsdefekter för denna produkt inom två års användning av den ursprungliga köparen. Denna garanti gäller inte för stickhål, revor eller brännskador. Den gäller inte heller den avtagbara dynklädseln. Om produkten skulle visa sig defekt inom denna garantiperiod väljer Invacare/Motions Concepts om den ska repareras eller bytas ut, med nya eller renoverade delar. Denna garanti inkluderar inte arbete eller fraktkostnader som uppstår vid utbyte av delar eller reparationer av produkten. Produktreparationer förlänger inte denna garanti - garantin för den reparerade produkten upphör när denna begränsade garanti tar slut. Invacares/Motions Concepts enda skyldighet och din enda förmån under denna garanti är begränsade till sådana reparationer och/eller utbyten.

För garantiservice, kontakta återförsäljaren du köpte din Invacare/Motion Concepts-produkt från. Om du inte blir nöjd med garantiservicen kan du skriva direkt till Invacare/Motion Concepts på adressen på baksidan. Ange återförsäljarens namn, adress, modellnumret, datum för inköp, felets natur samt produktens serienummer om den har ett sådant.

Invacare Corporation/Motion Concepts kommer att godkänna en retur. Den felaktiga enheten eller delarna måste returneras för garantiinspektion med motsvarande serienummer om sådant finns, inom trettio (30) dagar från returgodkännandet. Returnera INTE produkter till vår fabrik utan att ha fått sådan information tidigare. Frakt med postförskott kommer inte att lösas ut, se till att fraktkostnader är betalda i förskott.

BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG: DENNA GARANTI GÄLLER INTE FÖR PROBLEM SOM UPPSTÅR VID NORMALT SLITAGE ELLER P.G.A. ATT DE MEDFÖLJANDE INSTRUKTIONERNA INTE FÖLJS. DESSUTOM GÄLLER GARANTIN INTE FÖR SERIENUMMERMÄRKTA PRODUKTER OM SERIENUMRET HAR TAGITS BORT ELLER SKADATS, PRODUKTER SOM INTE TAGITS HAND OM, VARIT MED OM OLYCKOR, FELAKTIGT HANDHAVANDE, UNDERHÅLL ELLER FÖRVARING, ELLER PRODUKTER SOM MODIFIERATS UTAN INVACARES/MOTION CONCEPTS UTTRYCKLIGA SKRIFTLIGA TILLÅTELSE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: MODIFIKATIONER VIA ANVÄNDNING AV EJ GODKÄNDA DELAR ELLER TILLBEHÖR: PRODUKTER SKADADE AV REPARATIONER PÅ KOMPONENTER UTAN INVACARES/MOTION CONCEPTS UTTRYCKLIGA TILLSTÅND, PRODUKTER SKADADE AV OMSTÄNDIGHETER SOM STÅR UTANFÖR INVACARES/MOTION CONCEPTS KONTROLL. PRODUKTER SOM REPARERATS AV NÅGON ANNAN ÄN EN AV INVACARES/MOTION CONCEPTS ÅTERFÖRSÄLJARE, SÅDAN UTVÄRDERING UTFÖRS ENDAST AV INVACARE/MOTION CONCEPTS.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR EVENTUELLA ANDRA SPECIFIKA GARANTIER, INKLUSIVE IMPLICITA KONSUMENTGARANTIER OCH GÄLLER FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL. DEN GÄLLER INTE UTÖVER TIDSBEGRÄNSNINGEN FÖR DENNA UTTRYCKTA GARANTI OCH FÖRMÅNERNAS FÖR IMPLICIT GARANTI ÄR BEGRÄNSADE TILL REPARATIONER ELLER UTBYTE AV DEN DEFEKTA PRODUKTEN I ENLIGHET MED DESSA VILLKOR. INVACARE/MOTION CONCEPTS KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA INDIREKTA SKADOR ALLS.

DENNA GARANTI KAN ENDAST FÖRLÄNGAS FÖR ATT FÖLJA STATENS/PROVINSENS LAGAR OCH BESTÄMMELSER.