



Yes, you can.[®]

Invacare[®] Sonnet Dual

Bruksanvisning (SE)



Manual Sonnet Dual

Sängbordet är utvecklat för hemvård och sjukhus. Sängbordet har flera funktioner som är speciellt utformade för områdena hemvård och sjukhus.



Fig. 1.

Vik ut mat- och läsbordsdelen genom att lyfta skivan helt upp och sedan sänka ner den till horisontalläge.

Fäll in skivan genom att lyfta den och låt den sedan glida ner mot botten. Se fig 1.



Fig. 2.

Höjden på skivan kan justeras både i hopfällt läge och uppfällt läge. Justera höjden genom att trycka låstapparna uppåt.

Låstapparna är placerade på framsidan och baksidan. Båda låstapparna måste hållas intryckta för att kunna lyfta skivan. Då båda låstapparna hålls in kan man justera skivan. När man släpper låstapparna, låses skivan i sin nya position. Se fig 2.

Snedställ skivan genom att trycka in den närmsta tappen och styr skivan nedåt och bakåt. Det är också möjligt att trycka in den andra låstappen och lyfta skivan uppåt.

Mat- och läsbordsdelen fungerar nu utmärkt som bok- och tidningsstöd.

OBS! Kom ihåg att placera skivan i horisontalläge innan den fälls in.



Fig. 3.

Sängbordet kan placeras på båda sidor om sängen. För att byta sida: dra först ut lådan tills det tar stopp, lyft lådan uppåt och dra den sedan helt ut.

Tryck in fjädersprinten på baksidan och lossa baksidan. Se fig 3.

Manual Sonnet Dual



Fig. 4.

Lossa sedan bordsdörren genom att skruva bort det ena fästet. Se fig 4.

Montera tillbaka baksidan på motsatta sidan om sängbordet. Träpluggarna överst på baksidan måste sättas dit först, tryck sedan upp träpluggarna och placera baksidan i ramen.

Sätt tillbaka det borttagna fästet till dörren, i sängbordets fäste. Placera bordsdörren i det motsatta fästet och sänk ner dörren till horisontalläge. Ta bort det lösa fästet i bordsdörren.

Sätt tillbaka lådorna.



Fig. 5

För att underlätta vid rengöring, ta bort de två lådorna och skivan och spola ren sängbordet. Se fig 5.

Dra ut lådan tills det tar stopp, lyft lådan uppåt och dra ut den. Lyft ur innerlådan.



Fig. 6

Täckskivan är fäst med låsfästen. Lyft täckskivan för att skruva bort låsfästena på sidan av sängbordet. Se fig 6.

Sätt tillbaka täckskivan och skjut in lådorna efter rengöringen.

Använd vanligt rengöringsmedel. Använd svamp, trasa eller en mjuk borste vid rengöring av sängbordet. Var noga med att torka torrt efter avslutad rengöring.

Använd inte sura rengöringsmedel eller lösningsmedel typ aceton och thinner.

De borttagbara plastdelarna kan handdiskas eller diskas i diskmaskin. Undvik högtryckstvätt.

De rörliga delarna i sängbordet behöver inte smörjas. De behöver bara hållas rena för att fungera tillfredsställande. Sonnet Dual ska förvaras i 10-80% luftfuktighet och med rumstemperatur på 0 - 50°.

Rummet måste vara frostsäkert.

Under transport ska mat- och läsbordsskivan vara infälld. Bordsdörren ska vara stängd och lådorna inskjutna.



Yes, you can.®

Kundservice och Service

Denmark

INVACARE A/S

Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Phone: +45 36 90 00 00
Fax: +45 36 90 00 01
www.invacare.dk
denmark@invacare.com

Sweden & Finland

INVACARE AB

Fagerstagatan 9
S-163 91 Spånga
Phone: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
www.invacare.se
sweden@invacare.com

Storbritannien & Irland

INVACARE LTD

Pencoed Technology Park
Pencoed
UK-Bridgend, CF35 5AQ
Phone: +44 1 656 776 200
Fax: +44 1 656 776 201
www.invacare.co.uk
uk@invacare.com
ireland@invacare.com

Germany

INVACARE GmbH

Alemannenstrasse 10
D-88316 Isny
Phone: +49 75 62 7 00 0
Fax: +49 75 62 7 00 66
www.invacare.de
kontakt@invacare.com

Nederländerna

INVACARE B.V.

Celsiusstraat 46
NL-6716 BZ Ede
Phone: +31 318 695 757
Fax: +31 318 695 758
www.invacare.com
nederland@invacare.com
csede@invacare.com

Belgium & Luxemburg

INVACARE N.V.

Autobaan 22
B-8210 Loppem, Brügge
Phone: +32 50 83 10 10
Fax: +32 50 83 10 11
www.invacare.be
belgium@invacare.com

Frankrike

INVACARE Poirier S.A.S

Route de St. Roch
F-37230 Fondettes
Phone: +33 2 47 62 64 66
Fax: +33 2 47 42 12 24
www.invacare.fr
contactfr@invacare.com

Österrrike

INVACARE AUSTRIA GmbH

Herzog Odilostrasse 101
A-5310 Mondsee
Phone: +43 6232 5535 0
Fax: +43 6232 5535 4
www.invacare-austria.at
info-austria@invacare.com

Schweiz

INVACARE AG

Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Phone: +41 61 487 70 80
Fax: +41 61 487 70 81
www.invacare.ch
switzerland@invacare.com

Ident. no.: 913912

Version: 03

Date: 10.2011

Manufacturer:

INVACARE Rea AB

Växjövägen 303, box 200
S-343 75 Diö