



Invacare® **Transportvogn/Sängvagn**



Manual/Bruksanvisning

Invacare® EC-Høng AIS
Ident. nr./Art nr: 1417886
Version 01 12.2001



Invacare® Transportvogn/Sängvagn

Tillykke

med Deres valg af Invacare®'s Transportvogn til Invacare®'s Bedco senge.

Transportvognen er beregnet til nem transport af Invacare®'s Bedco senge.

Læs hele brugsanvisningen igennem, inden Transportvognen tages i brug.

Al angivelse af højre og venstre forudsætter, at man ligger på ryggen i sengen.

Vær opmærksom på, at der i denne brugsanvisning kan forekomme afsnit, der ikke er relevant for Deres Transportvogn, idet brugsanvisningen er gældende for alle (på udgivelsestidspunktet) eksisterende modeller.



Invacare® EC-Høng påtager sig intet ansvar, hvis produktet anvendes, forandres eller sættes sammen på anden vis end som angivet i denne brugsanvisning.

Invacare® EC-Høng er certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001/EN 46001. Dette sikrer vore kunder, at produkter produceret hos Invacare® EC-Høng altid leveres i en ensartet kvalitet.

Hvis produktet ikke lever op til Invacare® EC-Høng's fastsatte kvalitetskrav, vil produktet blive kasseret.

Skulle der mod forventning opstå problemer med det leverede produkt, bedes henvendelse rettet til Invacare® leverandøren.

Brug af Invacare®'s Transportvogn

1)

Brems alle 4 hjul på Transportvognen.
Transportvognen lægges ned, selerne foldes ud og Transportvognen skubbes ind under sengen.



2)

Transportvognen spændes fast under sengen ved hjælp af de 2 seler.




3)

Netledning og betjeningsboks spændes fast til overrammen sammen med ryglænet ved hjælp af lille strop.



4)

Bendel spændes fast til overrammen ved hjælp af lille strop.

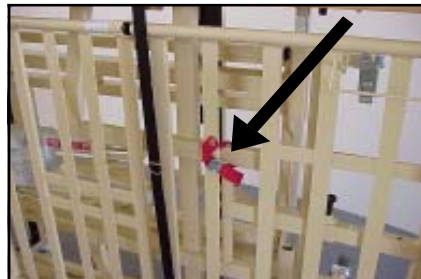

5)

Nu kan Transportvognen med fastspændt seng rejses op til lodret af een person.



6)

Hjulene låses op – og nu kan sengen transporteres afsted.



Lycka till

med ert val av Invacare® :s Sängvagn.

Sängvagnen är avsedd för att underlätta transport av Invacare® :s Bedco-sängar.

Läs igenom hela bruksanvisningen, innan Sängvagnen tas i bruk.

Alla höger- eller vänsterangivelser utgår ifrån, att man ligger på rygg i sängen.

Observera, att här kan finnas avsnitt som inte är relevanta för er Sängvagn, eftersom denna bruksanvisning gäller för alla (vid utgivningstidpunkten) existerande modeller.



Invacare® EC-Høng påtar sig inget ansvar, om produkten används, förändras eller monteras ihop på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Invacare® EC-Høng är certifierad enligt DS/EN ISO 9001/EN 46001. Detta garanterar våra kunder att produkter tillverkade hos Invacare® EC-Høng alltid levereras med enhetlig kvalitet.

Om produkten inte motsvarar Invacare® EC-Høng:s fastställda kvalitetskrav, så kasseras den.

Om det mot förväntan skulle uppstå problem med den levererade produkten, v g vänd Er till Invacare® .

Användning av Invacare®:s Sängvagn

1)

Bromsa alla 4 hjulen på sängvagnen. Skjut in sängvagnen under sängen eller lägg den ovanpå sängen och vik ut banden.



2)

Spänn fast sängvagnen med de båda banden.




3)

Se till att lösa delar (t ex manöverdosa) är fastsatta på sängbotten.



4)

Kontrollera att rörliga delar är fastsatta.

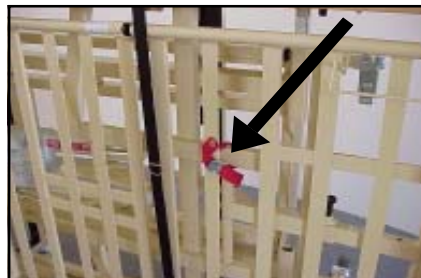

5)

Nu kan sängvagnen med fastspänd säng resas upp till vertikalläge av en person.



6)

Lås upp hjulen, sängen kan nu transporteras.

