

Brugsanvisning for Caresit 2 kamre

Tillykke med din nye Caresit pude !

Caresit puden forebygger tryksår ved at forme sig efter kroppen og fordele brugerens vægt på en større flade.

Caresit puden er velegnet til at forebygge tryksår for brugere i lavrisiko gruppen.

2-kammer puden kan foruden trykaflastning også benyttes til at øge siddestabiliteten hos brugeren.

Caresit puden leveres fyldt med korrekt luftmængde, passende til den enkelte pudestørrelse.

Caresit kan bruges på begge sider.

Caresit leveres i følgende fire størrelser:

Produkt nr.:	Str.:	Vægt:		Produkt nr.:	Str.:	Vægt:
601MFE2	40x40 cm	0,4 kg		603MFE2	45x45 cm	0,8 kg
602MFE2	45x40 cm	0,5 kg		604MFE2	50x45 cm	1,0 kg

Rengøring:

Caresit puden:

Normal rengøring: Vask puden med vand og sæbe.

Desinfisering af pudens overflade, blodpletter (hepatitB)

- Hypoklorit	25%	30 min
- Kloramin	5%	30 min
- Virkon (produkt navn)	1%	30 min

Det anbefales ikke at autoklavere Caresit puden, da materialet begynder at smelte ved 120°C.

Teknisk information

Materiale, pude	Blød PVC folie
Materiale, betræk	100% Trevira CS
Fyld	Luft
Brandhæmmende	Ja
Risikogruppe	Lavrisiko
Tåler urin	Ja
Tåler kulde	Ja
Tåler varme	Ja
Vasketemperatur	90°
Garantiperiode	2 år
Maksimum brugervægt	150 kg

Producent:

Care Product A/S

Bergkrystallen 25

2818 Gjøvik

Forhandles i Danmark af:



Invacare A/S

Sdr. Ringvej 39, 2605 Brøndby

Tlf: 3690 0000 - Fax: 3690 0001

www.invacare.dk

denmark@invacare.com

