


Client :
N° Client :
Téléphone :

Correspondant :
Commission :
Numéro de série :

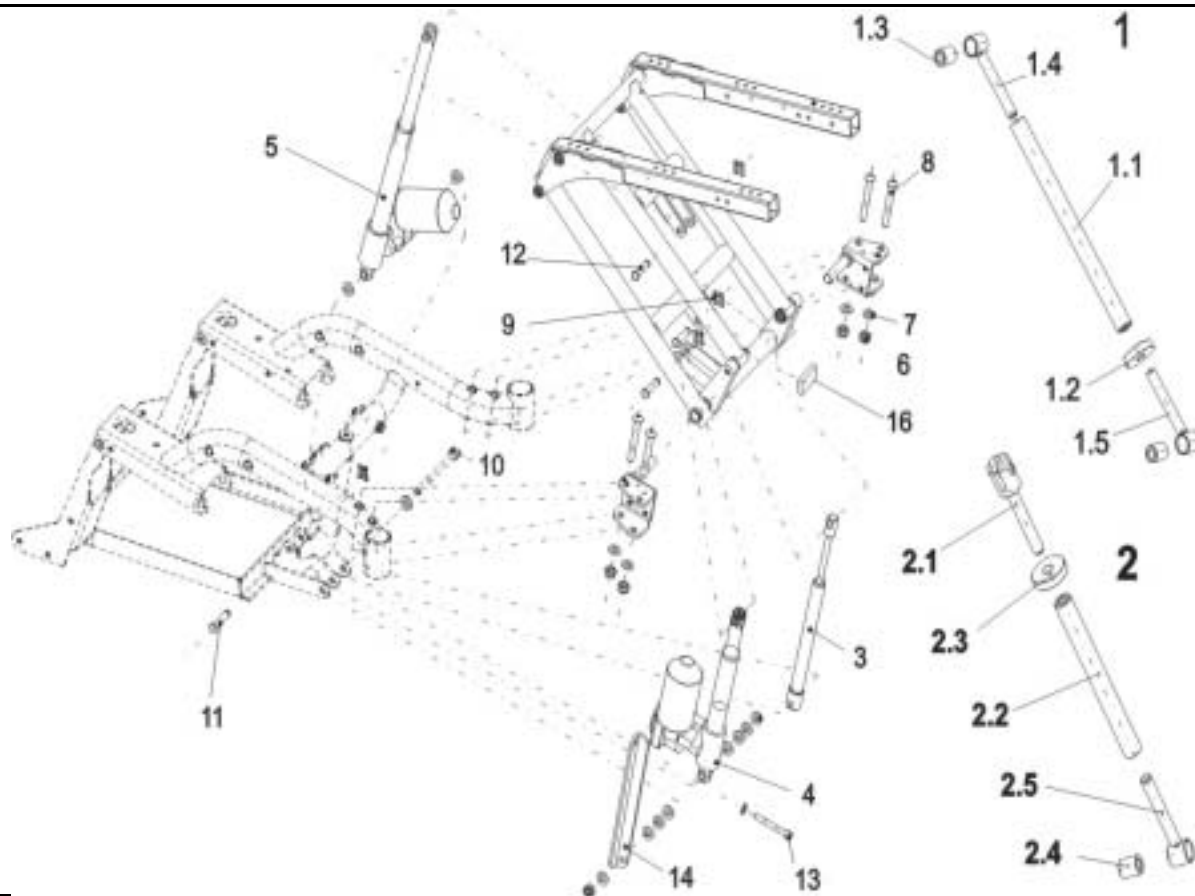

Rep	Qté	Code	Désignation
1	1	1420003	REGLAGE DE LA HAUTEUR DE SIEGE PREMONTE
1.1	1		CARTER DE BROCHE
1.2	1		ECROU MOLETE
1.3	2		DOUILLE RONDE 18 X 3,9 X 22
1.4	1		BROCHE G
1.5	1		BROCHE D
2	1	1420004	REGLAGE DE L'ANGLE D'ASSISE PREMONTE
2.1	1		BROCHE FILETEE AVEC FOURCHE
2.2	1		CARTER DE BROCHE
2.3	1		ECROU MOLETE
2.4	1		DOUILLE RONDE 18 X 3,9 X 22
2.5	1		BROCHE G
-	1		LIFTER PREMONTE
3	1	SP1419237	RESSORT PNEUMATIQUE
4	1	1418526	MOTEUR LA30.1L-50-24-001
4	1	1434425	MOTEUR LA30.1L-50-24-001 AV. FREIN VERIN D'ASSISE
5	1	1419400	MOTEUR LA30.1S-150-24-002 VERIN DE LIFT
6	4		ECROU HEXAGONAL M10 INDESSERRABLE
7	4		RONDELLE 10,5 X 21 X 2
8	4		VIS A TETE PLATE AV. SIX PANS CREUX M8*16 10.9
9	5	K32395	RONDELLE D'ARRET SL 10 MM
10	1	1423490	VIS M10 X 125 DIN 912
11	3	1419941-0003	BOULON DE SECURITE 44,5 MM
12	1	1419943-0003	BOULON DE SECURITE 52,5 MM
13	1	5824318	VIS M8 X 65 DIN 912

Storm 3




REGLAGE DE LA HAUTEUR DE SIEGE PREMONTE
REGLAGE DE L'ANGLE D'ASSISE PREMONTE
LIFTER PREMONTE

Edition
05 / 2003
Chapitre 12
Page 1

Client :
N° Client :
Téléphone :

Correspondant :
Commission :
Numéro de série :

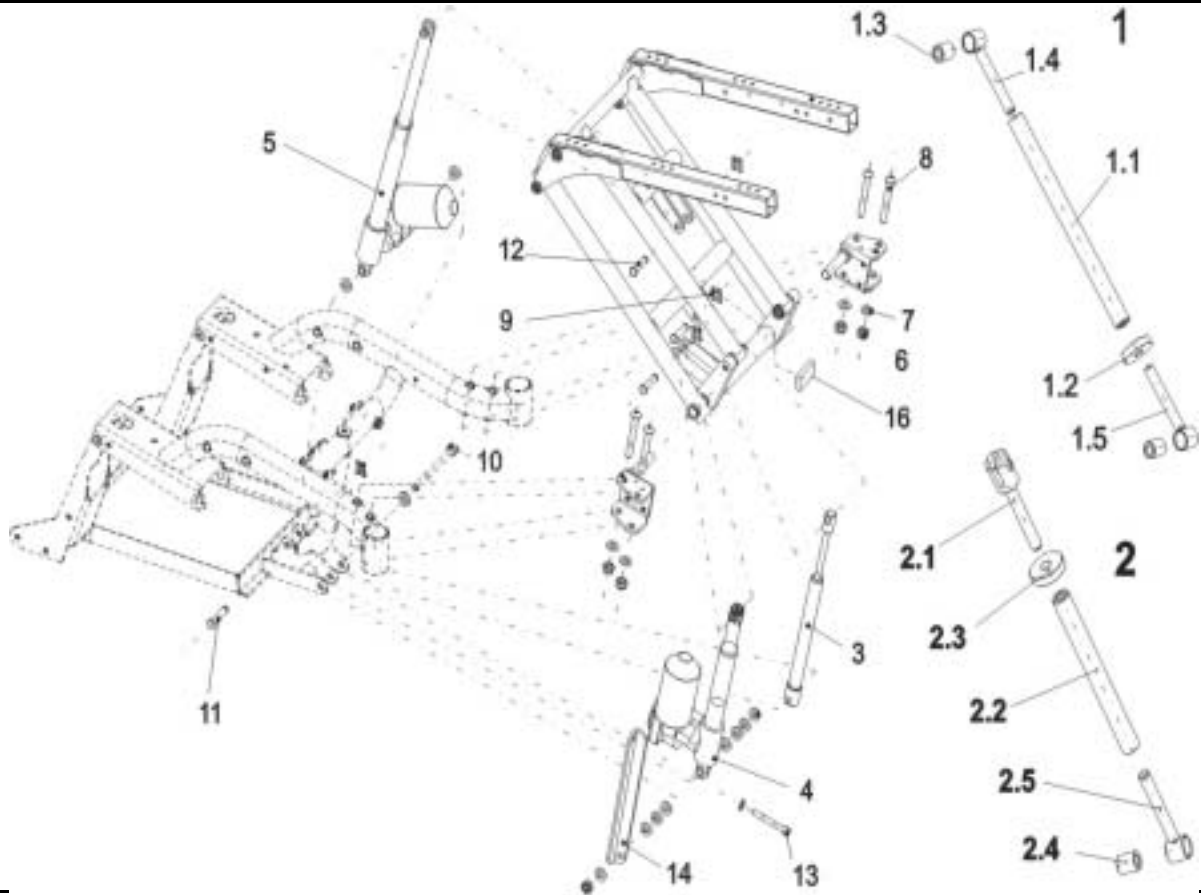

Rep	Qté	Code	Désignation
14	1	1423440-9005	TRAVERSE ANGULAIRE
15	1	1426296	ELEMENT D'ECARTEMENT 10,5 X 21 X 12
16	1	1426297	ELEMENT D'ECARTEMENT 10,5 X 21 X 16
17	1	1429559	AIMANT

Storm 3




REGLAGE DE LA HAUTEUR DE SIEGE PREMONTE
REGLAGE DE L'ANGLE D'ASSISE PREMONTE
LIFTER PREMONTE

Edition
05 / 2003
Chapitre 12
Page 2

Client :
 N° Client :
 Téléphone :

Correspondant :
 Commission :
 Numéro de série :

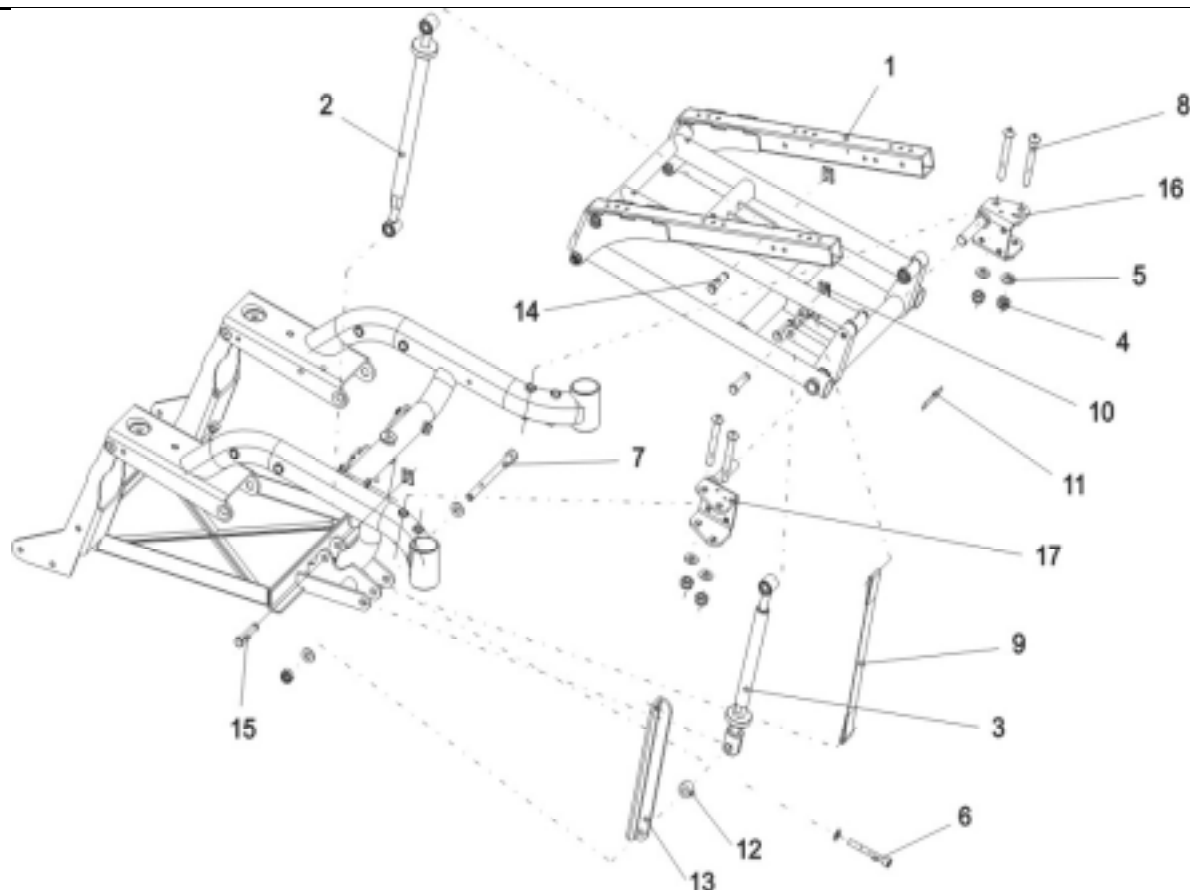

Rep	Qté	Code	Désignation
-	1	1430167	UNITE LIFTER MANUELLE CPL
1	1	1418527	UNITE LIFTER PREMONTEE
2	1	1420003	REGLAGE DE LA HAUTEUR DE SIEGE PREMONTE
3	1	1420004	REGLAGE DE L'ANGLE D'ASSISE PREMONTE
4	5		ECROU HEXAGONAL M10 INDESSERRABLE
5	6		RONDELLE 10,5 X 21 X 2
6	1		VIS M8 X 65 DIN 912
7	1		VIS M10 X 125 DIN 912
8	4		VIS M10 X 75 DIN 7380
9	1	1430121	BANDE DE GARDE 25 MM
10	4		RONDELLE D'ARRET SL 10 MM
11	1	1429559	AIMANT
12	1	1426296	ELEMENT D'ECARTEMENT 10,5 X 21 X 12
13	1	1423440-9005	TRAVERSE ANGULAIRE
14	3	1419941-0003	BOULON DE SECURITE 44,5 MM
15	1	1419943-0003	BOULON DE SECURITE 52,5 MM
16	1	1418547-9005	TOLE DE PALIER G
17	1	1418544-9005	TOLE DE PALIER D

Storm 3

UNITE LIFTER MANUELLE CPL;



Edition
 05 / 2003
 Chapitre 12
 Page 3