


Client :  
N° Client :  
Téléphone :

Correspondant :  
Commission :  
**Numéro de série :**

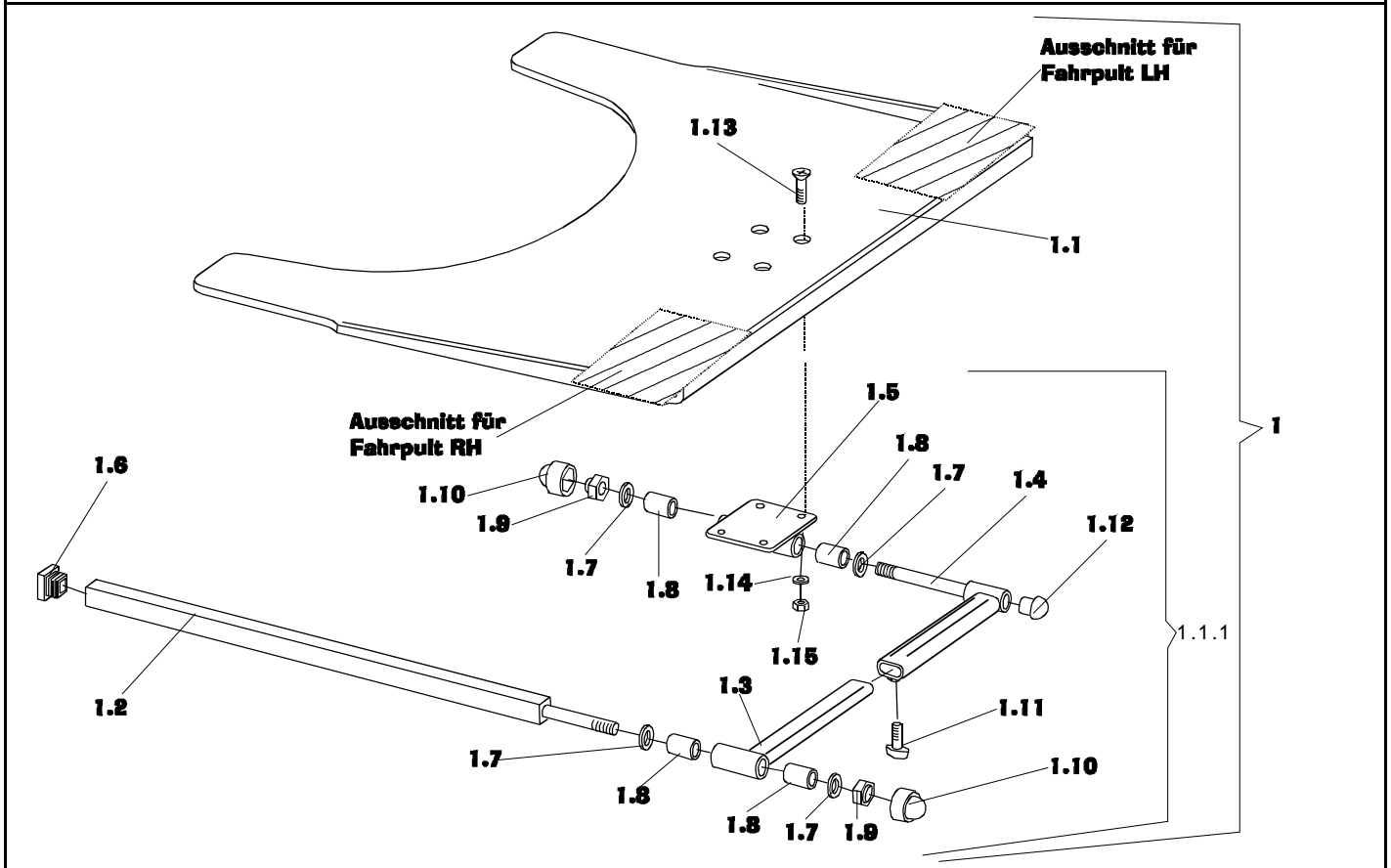

Rep	Qté	Code	Désignation
1	1	SP1422952	TABLETTE PIVOT. P. COMM. G CPL.
1	1	SP1422953	TABLETTE PIVOT. P. COMM. D CPL.
1.1	1	Z177017	PLAQUE DE TABLETTE EN VERRE ACRYLIQUE AVEC ENCOCHE GAUC...
1.1	1	Z177016	PLAQUE DE TABLETTE EN VERRE ACRYLIQUE AVEC ENCOCHE DROI...
1.1.1	1	SPZ177011	<b>GROUPE DE MONTAGE MECANIQUE PIVOTANTE P. TABLE</b>
1.2	1		GUIDAGE P. COMMANDE CENTRALE / TABLETTE
1.3	1		BRAS PIVOTANT
1.4	1		RALLONGE P. BRAS PIVOTANT
1.5	1		LOGEMENT P. TABLETTE ACRYLIQUE
1.6	1		EMBOUT 15 X 15
1.7	4		RONDELLE 13 X 24 X 2,5
1.8	4		DOUILLE RONDE 19 X 3,5 X 25
1.9	2		ECROU HEXAGONAL M12 INDESSERRABLE
1.10	2		CACHE SKS 12 P. ECROU M12
1.11	1	L31001	VIS A PAPILLON M6 X 10
1.12	1		CURSEUR SL 22
1.13	4		VIS A TETE GOUTTE-DE-SUIF ET EMPREINTE CRUCIFORME M6 X ...
1.14	4		RONDELLE 6,4 X 12,5 X 1,6
1.15	4		ECROU BORGNE HEXAGONAL M6 INDESSERRABLE

### Storm 3



TABLETTE PIVOT. P. COMM. G CPL.  
TABLETTE PIVOT. P. COMM. D CPL.

Edition  
05 / 2003  
Chapitre 15  
Page 1