

Kontrollera lyftselen varje dag och särskilt efter tvätt!

Lyftselsens storlek är märkt med en färgad etikett eller med färgat kantband.


Etikett som visar produkten, instruktionsanvisning, tillverkningsdatum/år samt individuellt serienummer.

A. Kantband

kontrollera att de inte är skadade.

B. Sömmar

kontrollera att det inte är några lösa trådar.

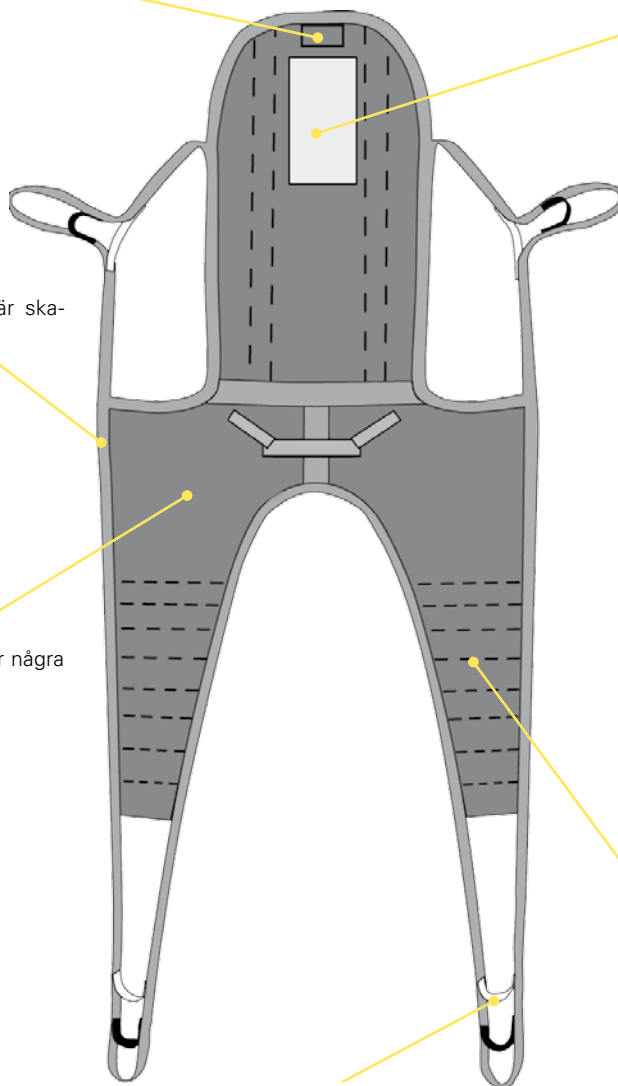

D. Stegband/lyftband



Kontrollera att text och märkning är läsbara på etiketten.

C. Tyg

kontrollera att det inte finns några hål, revor eller att den är nött.

E. Kontrollera eventuellt fixlock/låsanordning

OBS! Laga aldrig en lyftsela - trasiga lyftselar kasseras!

Besikttningsprotokoll för lyftselar enligt EN10535:2006 finns på www.invacare.se

INVACARE® AB
 Box 66 – 163 91 Spånga
 Kundservice: 08-761 70 90
 Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

© 2011 Invacare International Sarl. Alla rättigheter är reserverade för Invacare®.

All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare® förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

Kontroll av lyftselar - SE - 05/2011



Yes, you can.®

