

Assembly Headrest



Aquatec® Orca


Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar el montaje

1. COMPONENTES ENVIADOS :

Reposabezas Aquatec *Fortuna/Beluga/Orca*

Consta de :

4 fijaciones (pieza plástica)	Pieza 1	Referencia : 15407
4 tornillos de cabeza plana medida 4 x 20 (VA)	Pieza 2	Referencia : 13091
1 Soporte - acero reforzado medida 8 (VA)	Pieza 3	Referencia : 15446
1 Funda - cobertura con adhesivo de velcro	Pieza 4	Referencia : 15466

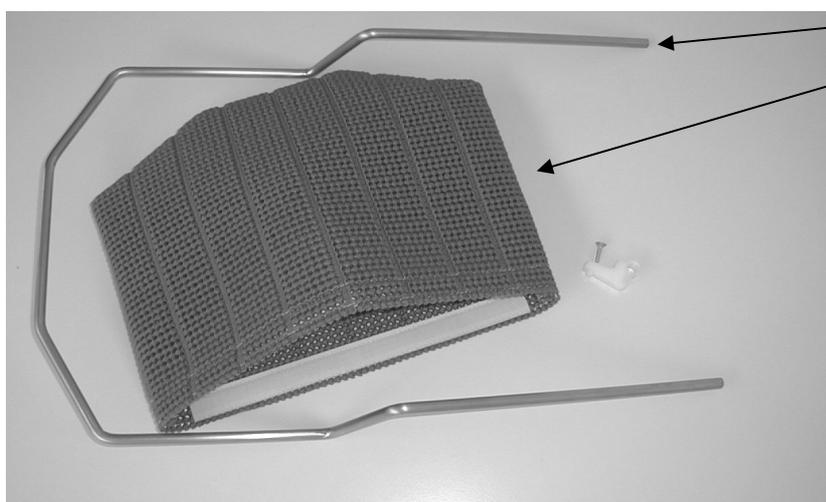

4 X Pieza 1 + 2

2. PREPARACION :

Para el respaldo con agujeros para montar el reposacabezas :
(4 agujeros para tornillos de cabeza plana y 4 agujeros para sujeciones)

1. tener un destornillador estrella talla 2
2. retire la funda del respaldo

Para el respaldo sin agujeros para montar realice los siguientes pasos como reparación :

Herramientas adicionales requeridas : Taladro eléctrico (o de baterías), broca 10X90°, broca 4.2 y 5.1 mm.


3. TRABAJO :

1. Utilice el diagrama adjunto para perforar los 4 agujeros marcados (a) con la broca 4,2mm
2. Utilice el diagrama adjunto para perforar los 4 agujeros marcados (b) con la broca 5,1 mm
3. Profile los cuatro agujeros con 4.2mm (a) con la broca de perfilación **en la parte delantera** a 8,5mm (para tornillos 4X20)
4. Quitar los filos (alisar) con la broca de alisamiento en los dos lados.

4. TRABAJO SEGURO

Es necesario que usted observe todas las regulaciones sobre prevención de accidentes, especialmente de las herramientas y máquinas utilizadas. Cuando realice los agujeros con el taladro, tenga cuidado de no lastimar sus dedos. Utilice una base cuando perforo, ej. una base de madera. Confirme que las brocas estén en el ángulo correcto con respecto a la superficie.

Diagrama para perforaciones

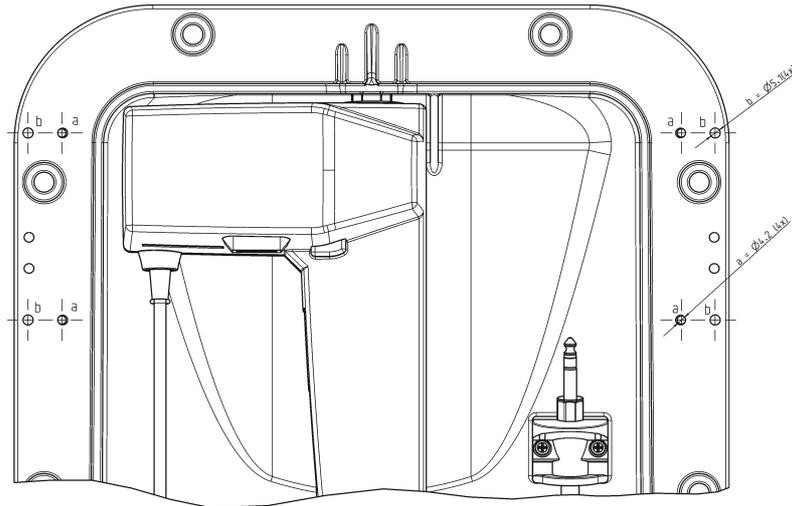

5. MONTAJE

1. Atornille las fijaciones (piezas 1) en la parte trasera del respaldo con los tornillos de cabeza plana.
2. Cubra el respaldo nuevamente con la funda
3. Si no ha ensamblado anteriormente la funda del reposacabezas, cúbralo ahora, tirando hacia abajo (pieza 4) sobre el soporte (pieza 3) y cierre con la tira de velcro.
4. Inserte el soporte (pieza 3) en las sujeciones atornilladas.

El ajuste de altura del reposacabezas considerando el tamaño de la persona que se sentará, se realiza, tirando o presionando el soporte completo con funda (piezas 3 y 4) en las sujeciones (pieza 1).

Fotografía 1 (desde arriba)

