

Montageanweisung [Mounting instruction]

Ulrich Alber GmbH + Co. KG
Vor dem Weißen Stein 21
D . 72461 Albstadt
Telefon: +49 7432 . 20 06 0
Internet: www.ulrich-alber.de




Artikelnummer [Article number]: VK335002

Rollstuhl: Bediengeräthalterung Etac Cross
[Wheelchair:]

Anbauvorschlag; die Lieferung enthält eventuell Material für verschiedene Anbauvarianten.
Die Halterung kann geringfügig von der Abbildung abweichen.
[Mounting suggestion; consignment may contain material for different mounting variants.]
[Please note that the bracket may slightly differ from the drawing.]

e-fix / VK 335002.00
Bediengerät [Control Unit]

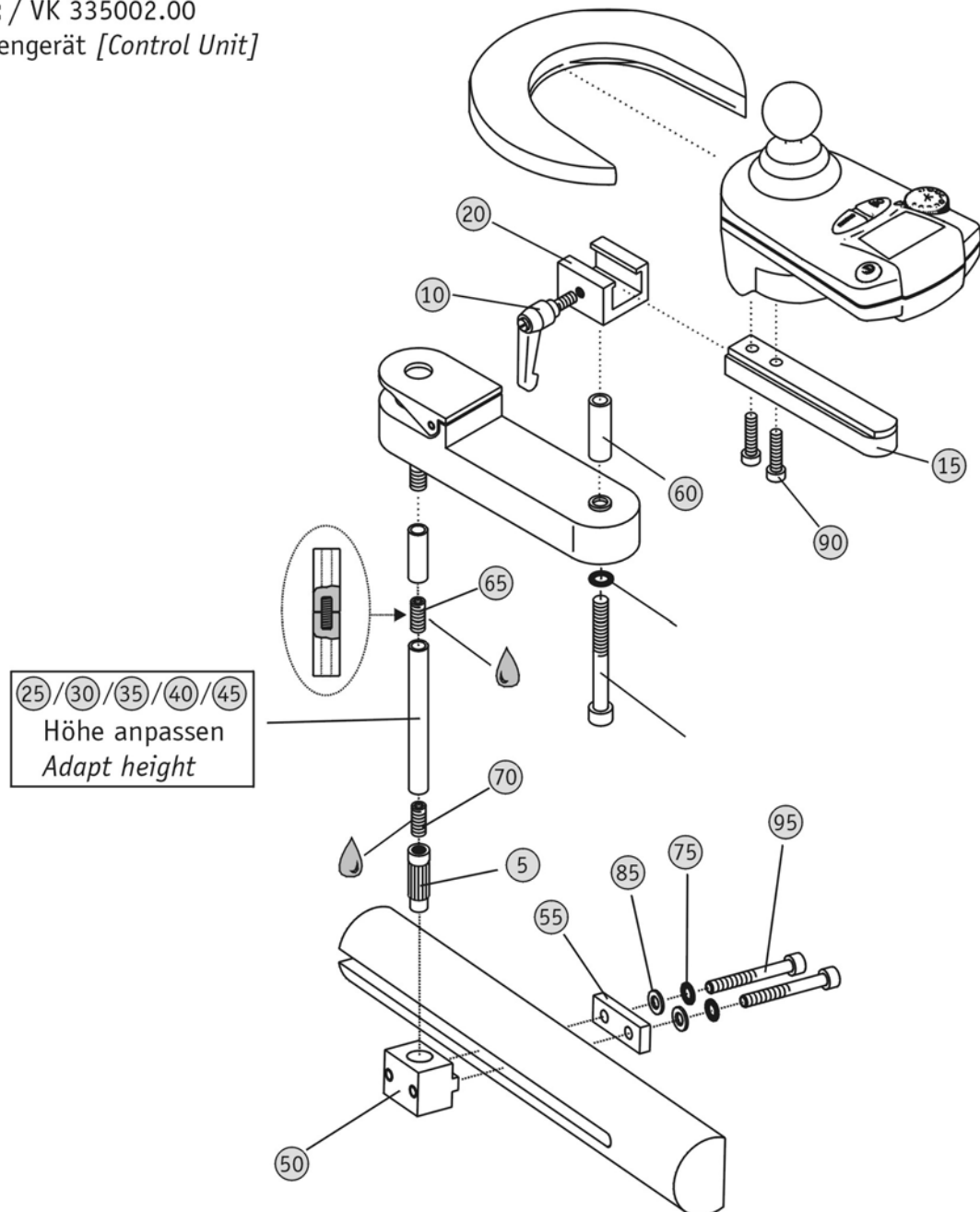

Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[**Caution**, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]



Montageanweisung [Mounting instruction]

Ulrich Alber GmbH + Co. KG
 Vor dem Weißen Stein 21
 D . 72461 Albstadt
 Telefon: +49 7432 . 20 06 0
 Internet: www.ulrich-alber.de



Artikelnummer [Article number]: VK335002

Pos. [Pos.]	Menge [Quantity]	Einheit [Unit]	Art.-Nr. [Art.-No.]	Lagerplatz/Alber [Stock/Alber]	Bezeichnung [Description]	i.O. [O.K.]
5	1	Stück [Stück]	200240.0	304/09/05	Verzahnungsteil Messing e-fix, komplett verzahnt	
10	1	Stück [Stück]	090011.0	304/09/12	Klemmhebel m. Außengewinde M6 x 10 e-fix	
15	1	Stück [Stück]	203326.0	304/09/06-	Führungsleiste, verchromt	
20	1	Stück [Stück]	200046.0	304/09/09-	Verschiebeteil e.fix, verchromt Gleitstück für Bediengerätaufnahme	
25	1	Stück [Stück]	200371.0	304/08/05	Verbindungsrohr 25 mm, verchromt	
30	1	Stück [Stück]	200235.0	304/08/06	Verbindungsrohr 50 mm, verchromt	
35	1	Stück [Stück]	200236.0	304/08/07	Verbindungsrohr 70 mm, verchromt	
40	1	Stück [Stück]	200234.0	304/08/08	Verbindungsrohr 80 mm, verchromt	
45	1	Stück [Stück]	200237.0	304/08/09	Verbindungsrohr 100 mm, verchromt zur Bedienkonsole mit Madenschraube	
50	1	Stück [Stück]	200365.0	304/07/06	Verzahnungsteil für Bremsleiste, verchromt und verzahnt	
55	1	Stück [Stück]	200243.0	304/07/08	Klemmplättchen, verchromt	
60	1	Stück [Stück]	200388.0	305/09/05	Buchse Meyra 2.800, verzinkt	
65	4	Stück [Stück]	010110.0	PROD	DIN 913 - M8 x 25 - 45H Gewindestift	
70	1	Stück [Stück]	010109.0	PROD	DIN 913 - M8 x 20 - 45H Gewindestift	
75	2	Stück [Stück]	010007.0	PROD	Sicherungsscheibe S - 5 - FSt Schnorr	
80	1	Stück [Stück]	010355.0	PROD	Sicherungsscheibe S - 8 - FSt Schnorr	
85	2	Stück [Stück]	010029.0	PROD	DIN 134 - 5,3 - St vz Scheibe	
90	2	Stück [Stück]	010407.0	PROD	DIN 7984 - M 6 x 20 - A2 Zylinderschraube	
95	2	Stück [Stück]	010070.0	PROD	DIN 912 - M 5 x 30 - 8.8 vz Zylinderschraube	
100	1	Stück [Stück]	010098.0	PROD	DIN 912 - M 8 x 60 - 8.8 vz Zylinderschraube	
105	1	Stück [Stück]	030017.0	305/09/06	Stopfen Para-Swing D = 18 mm Kapsto GPN 910/2179	

Bearbeiter [assembler]: _____
 Geprüft [inspected]: _____

Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !

[Caution, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]