

Rollstuhl
[Wheelchair]


Akkuaufnahme Viaplus V12
Battery fixture viaplus V12



47

Anbauvorschlag; die Lieferung enthält eventuell Material für verschiedene Anbauvarianten.
Die Halterung kann geringfügig von der Abbildung abweichen.
[Mounting suggestion; consignment may contain material for different mounting variants.]
[Please note that the bracket may slightly differ from the drawing.]

1520147.01
Montage am Azalea-Rollstuhl
Mounting at the Azalea Wheelchair

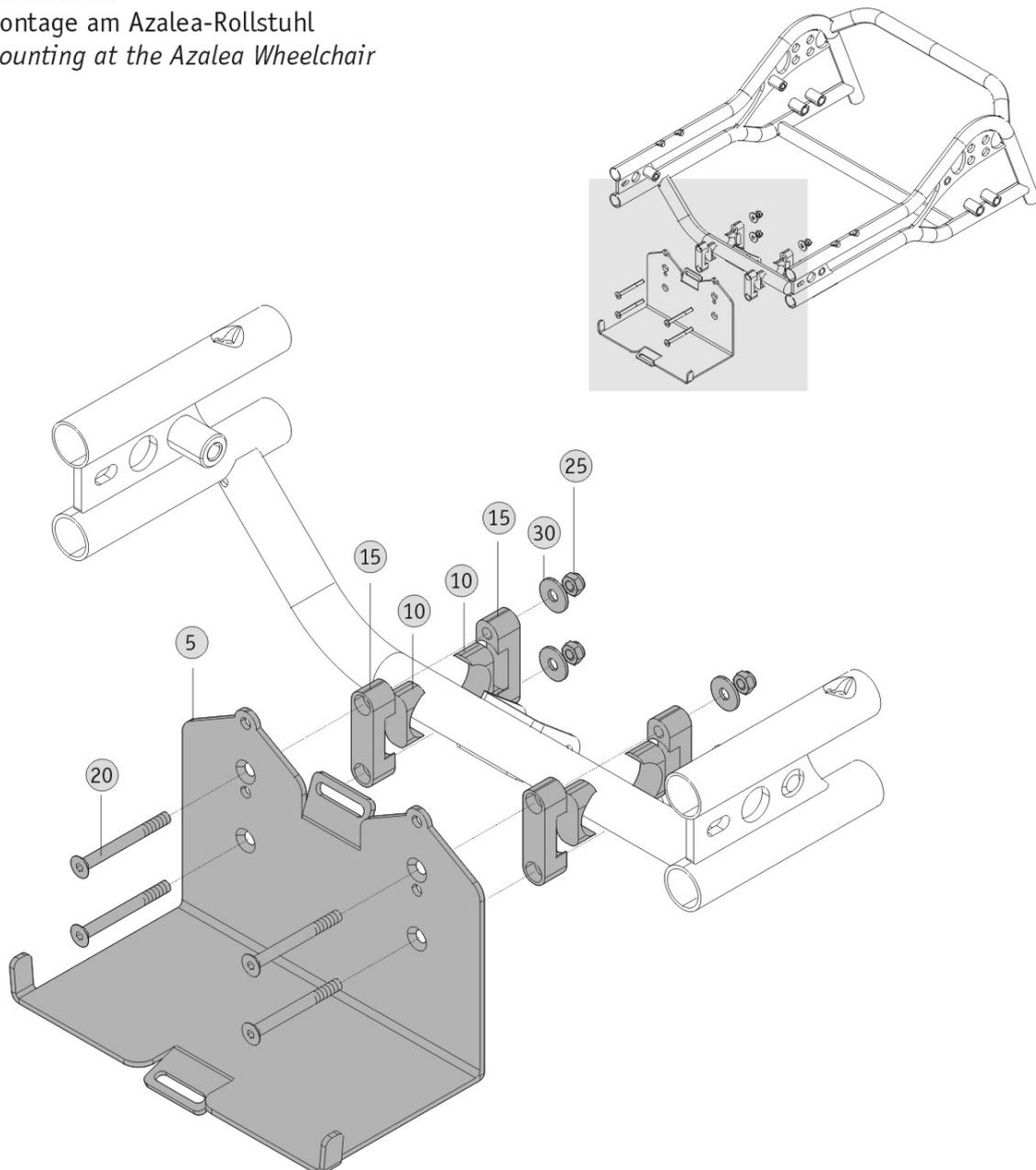

! Bitte beachten Sie die auf Seite 5 aufgeführten Hinweise zum Kleben der Schrauben und Muttern
Please follow the instructions to stick together screws and screw nuts at page 5



Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[**Caution**, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]



Rollstuhl
[Wheelchair]

Akkuaufnahme Viaplus V12
Battery fixture viaplus V12




47

1520147.01

Montage am Azalea-Rollstuhl

Mounting at the Azalea Wheelchair

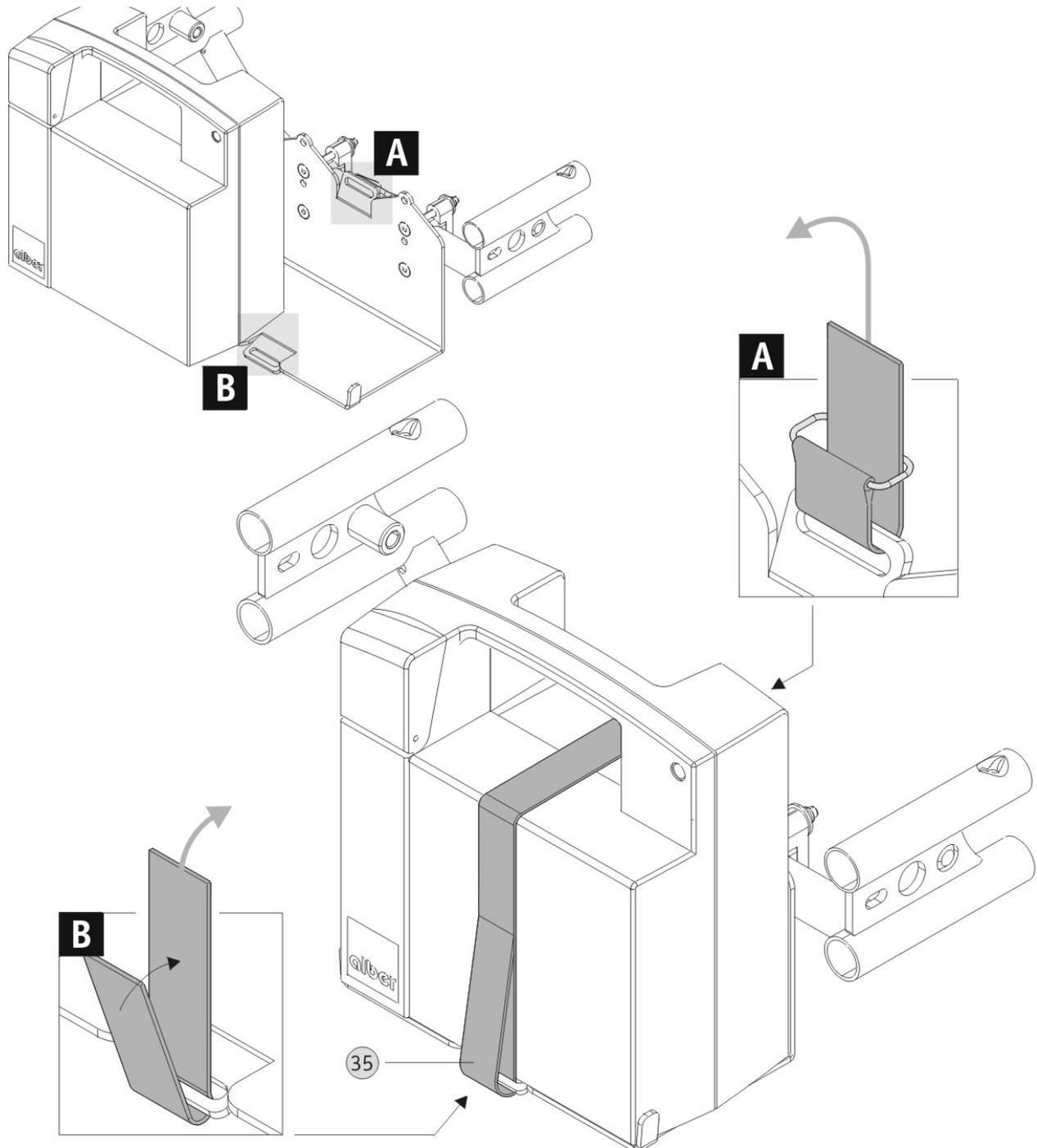

! Bitte beachten Sie die auf Seite 5 aufgeführten Hinweise zum Kleben der Schrauben und Muttern
Please follow the instructions to stick together screws and screw nuts at page 5



Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[Caution, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !



Rollstuhl
[Wheelchair]

Akkuaufnahme Viaplus V12
Battery fixture viaplus V12





47

1520147.01

Montage am Clematis-Rollstuhl

Mounting at the Clematis Wheelchair

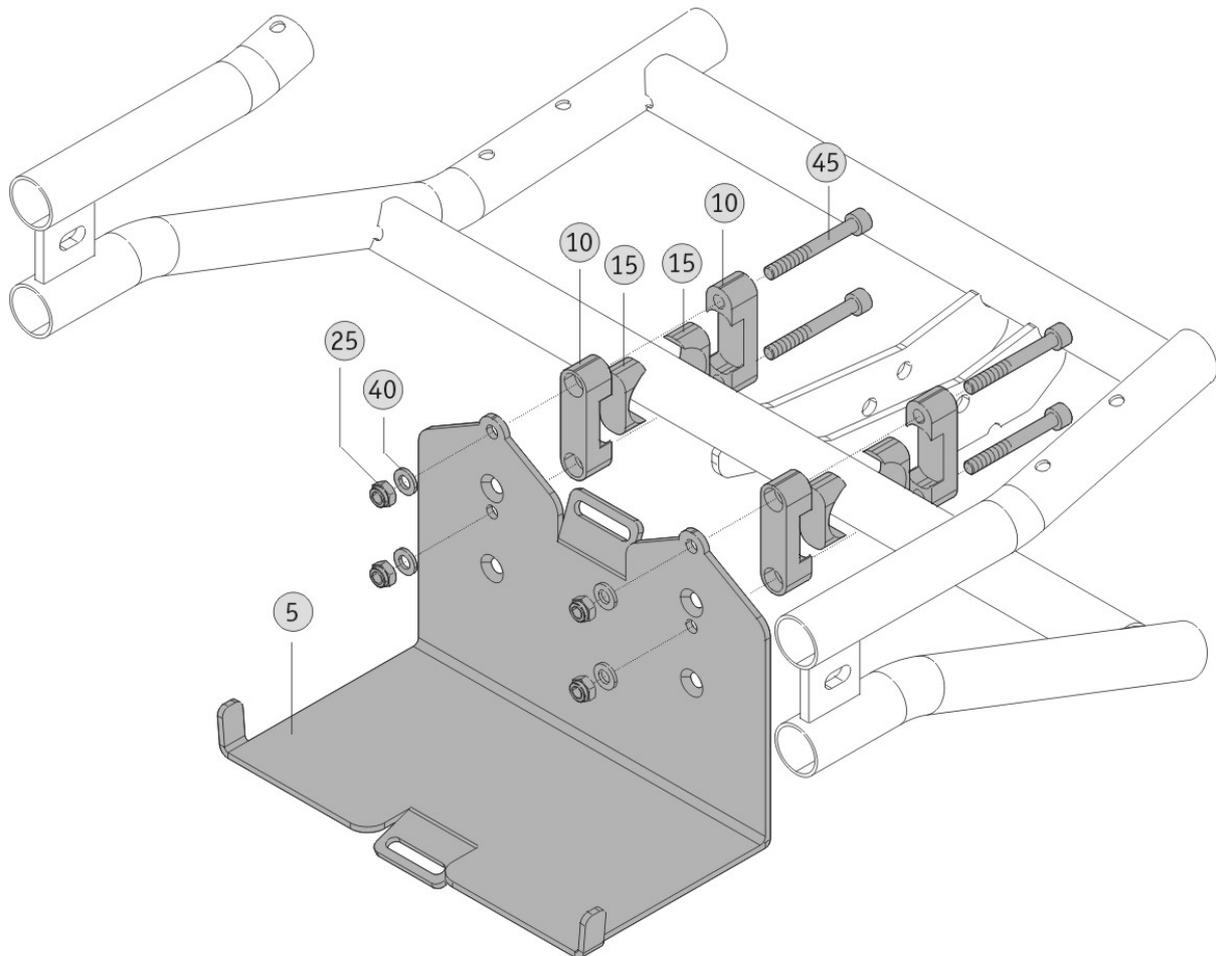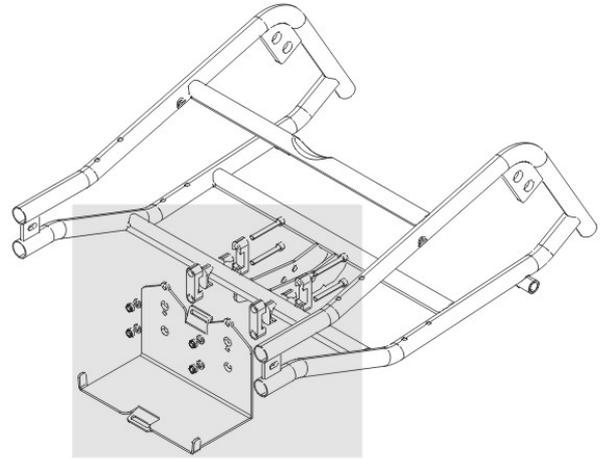

! Bitte beachten Sie die auf Seite 5 aufgeführten Hinweise zum Kleben der Schrauben und Muttern
Please follow the instructions to stick together screws and screw nuts at page 5



Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[Caution, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]






Sicherung der Schrauben und Muttern

Sofern in der Montageanweisung nicht anders angegeben, sind alle Schraubverbindungen ohne Sicherungsscheibe mit Schraubensicherungen zu versehen (siehe Bilder). Verwenden Sie hierzu WEICON AN 302-43 (blau) / LOCTITE 243 für das Sichern der Adapterhülsen und Schraubverbindungen, sowie WEICON AN 306-01 (grün) / LOCTITE 601 für das Sichern der Verbindungselemente am e-fix Bediengerät.

Locking of screws and screw nuts

If there is no other specification in our mounting instruction: Save all screw fittings which have no locking washer with screw locking adhesive (see pictures below). Use WEICON adhesive AN 302-43 (blue) / LOCTITE 243 adhesive to stick adapter sockets and screws. Use WEICON adhesive AN 306-01 (green) / LOCTITE 601 adhesive to stick the mechanical fasteners of the e-fix control-unit.

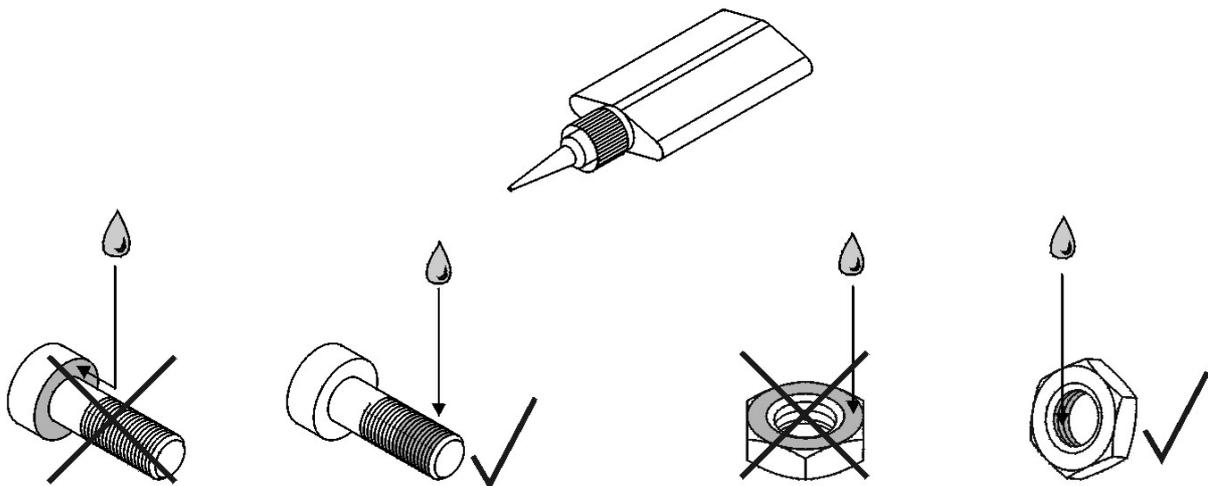

Anzugsmomente für Schraubverbindungen

Fastening torques for screw fittings

Sofern nicht anders angegeben sind Schraubverbindungen wie folgt anzuziehen:
Unless otherwise noted, seize the screw fittings as shown in the following table:

Schraubverbindungen / Screw fitting

Gewinde/Thread	Anzugsmoment/Fastening torque
M3	1,1 Nm
M4	3 Nm
M5	5 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Adapterhülsen / Adapter sockets

Gewinde/Thread	Anzugsmoment/Fastening torque
M16x1	30 Nm



Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[Caution, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]



Montageanweisung [Mounting instruction]

Artikelnummer [Article number] 1520147

Ulrich Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 21
D - 72461 Albstadt
Telefon +49 7432 2006-0
Internet www.alber.de



Rollstuhl [Wheelchair] **Akkuaufnahme Viaplug V12**
Battery fixture viaplug V12



47

WICHTIGER HAFTUNGSHINWEIS

Eine Kombination der von der Ulrich Alber GmbH (Alber) in Verkehr gebrachten Halterungssysteme mit anderen als den von Alber hergestellten Zusatzantrieben, ist von Alber nicht autorisiert und entspricht nicht dem nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) zu definierenden bestimmungsgemäßen Gebrauch und führt daher zur Nichtkonformität gemäß MPG.

Die Ulrich Alber GmbH lehnt vorsorglich jedwede Haftung hinsichtlich Garantieleistungen oder eventuell entstehenden Sach- und Personenschäden bei einer Kombination von Alber Halterungssystemen mit Fremdfabrikaten ab.

Important Liability Note

A combination of the mounting systems introduced by Ulrich Alber GmbH (Alber) together with auxiliary drives not manufactured by Alber is not authorized by Alber. Such combination does not comply with the intended use to be defined in accordance with the medical device directive (MDD) and therefore constitutes non-conformity according to the MDD.

By way of precaution, Ulrich Alber GmbH rejects any liability regarding warranty services or possibly resulting property damages and personal injuries due to a combination of Alber mounting systems with third party brands.

Pos. [Pos.]	Menge [Quantity]	Einheit [Unit]	Art.-Nr. [Art.-No.]	Lagerplatz/Alber [Stock/Alber]	Bezeichnung [Description]
05	1	St [St]	1520142	PROD	Akku-Aufnahme viaplug V12
10	4	St [St]	1467018	721/03/004-005	Einlegeprofil 25 mm, farblos
15	4	St [St]	1467022	718/04/016-017	Klemmstück, gleitgeschliffen und trowalisiert
20	4	St [St]	1460877	350/01/045	DIN 7991 - M6 x 60 - 8.8 vz Senkschraube
25	4	St [St]	1456204	350/01/061	DIN 985 - M 6 - 8 vz Sechskantmutter
30	4	St [St]	1461239	350/01/088	DIN 9021 - A 6,4 - 100 HV vz Scheibe
35	1	St [St]	1489290	720/04/011	Klettband 500 mm verstärkt, schwarz für Akkutasche E25
40	4	St [St]	1456183	350/01/002	Scheibe DIN 125 - A 6,4
45	4	St [St]	1459361	350/01/041	DIN 912 - M 6 x 50 - 8.8 vz Zylinderschraube

Bitte bei Erhalt auf Vollständigkeit prüfen! [Please check completeness upon receipt!]

 **Achtung**, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[Caution, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !] 