

SE

Innehåll

- 1.0 Verktyg som behövs
- 2.0 Innehåll i sats med monteringsmaterial
- 3.0 Inställning och justering före montering
 - 3.1 Justering av monteringsklämma och platta
- 4.0 Montering av MaTRx-ryggstöd
 - 4.1 MaTRx PB (Posture Back) och MaTRx PB-Deep
 - 4.2 MaTRx PB-Heavy Duty (kraftigt) och MaTRx PB HD-Deep
 - 4.3 MaTRx PB-Elite

1.0 Verktyg som behövs

Skiftnyckel (22 mm): (tillhandahålls)
Torx-nyckel (T25): (tillhandahålls)
Insexnyckel(2 mm): (tillhandahålls)
Kökskniv/sax
Stjärnskruvmejsel
Måttband/linjal

2.0 Innehåll i sats med monteringsmaterial

2.1 Sats med rörklämmor/monteringsmaterial


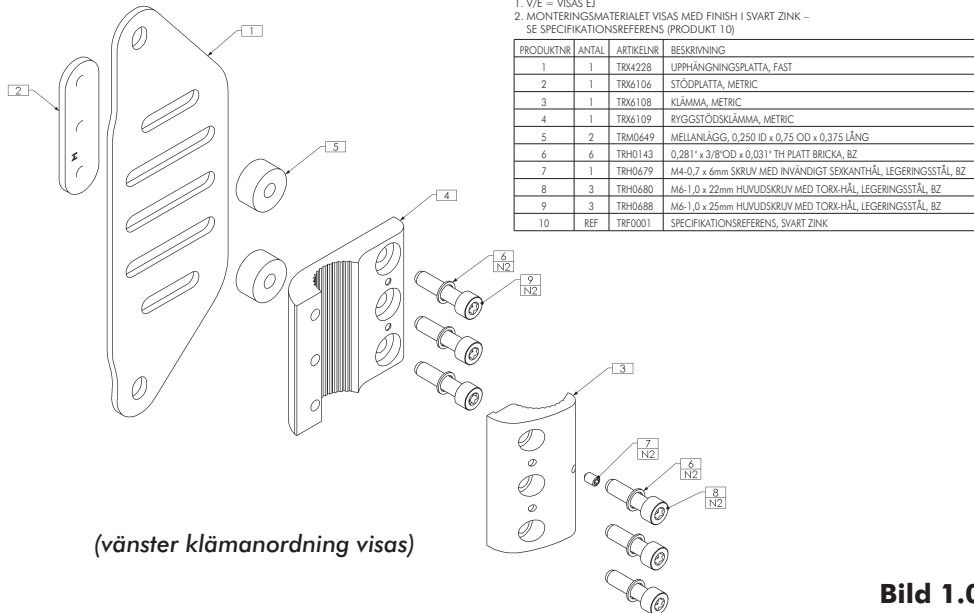


Bild 1.0

Bild 1.0 ovan ger en överblick över satsen med mellanlägg för rörklämmor för montering av MaTRx ryggstödsdynor på ryggstödsrören på en rullstol (vänster klämanordning visas). Varje sats med monteringsmaterial innehåller extra monteringsmaterial (dvs. skruvar/mellanlägg/brickor) för att korrekt centrerung av MaTRx-ryggstödet mellan ryggstödsrören och monteringsplattorna ska kunna erhållas.

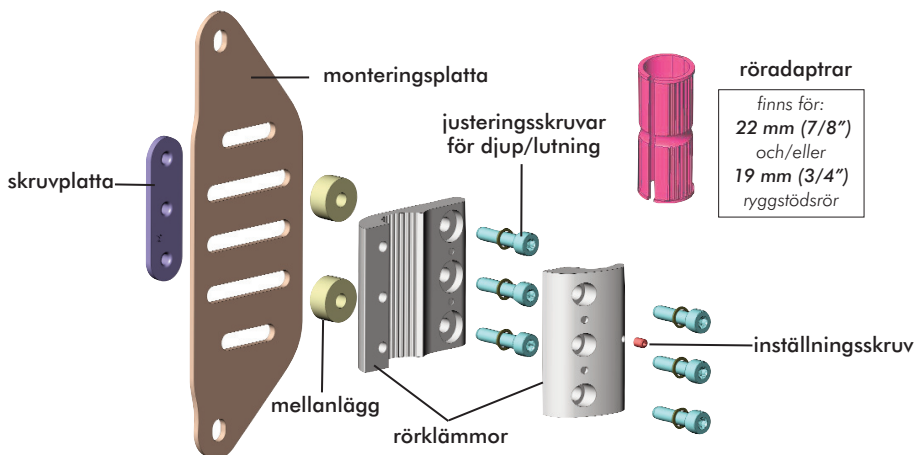

3.0 Inställning och justering före montering

3.1 Justering av monteringsklämma och platta:

i) JUSTERING AV SITTDJUP:

Sats med rörlämmor kan monteras i riktning *framåt* eller *bakåt* på ryggstödsrören. Satsen med rörlämmor har monterats på fabriken i *bakåtriktad* konfiguration - se **bild 3A** nedan. Monteringsplattan är utformad med spår vilket ger en justering framåt och bakåt på upp till 38 mm (1,5") i förhållande till rörlämmorna.

Den bakåtriktade rörlämskonfigurationen ger ett maximalt sittdjup i rullstolen (upp till maximalt 64mm (2,5") förskjutning bakåt i förhållande till ryggstödsrören).

Genom att *invertera* rörlämmorna på ryggstödsrören kan anordningen konfigureras om för att ge en *framåtriktad* monteringsposition i förhållande till ryggstödsrören* (upp till en maximal förskjutning framåt på 64 mm (2,5")) - se **bild 3B** nedan.

***Obs!** I den framåtriktade positionen måste monteringsplattorna också tas bort och monteras om i korrekt riktning – enligt nedan.

! OBSERVERA

När monteringspositionen för MaTRx-ryggstödet fastställs ska du se till att rullstolens stabilitet inte påverkas.

När ryggstödet positioneras framåt och bakåt justeras ändras brukarens tyngdpunkt i rullstolen. En position långt bak kan minska rullstolens stabilitet bakåt betydligt. Likaså kan en position längre fram minska rullstolens stabilitet framåt.

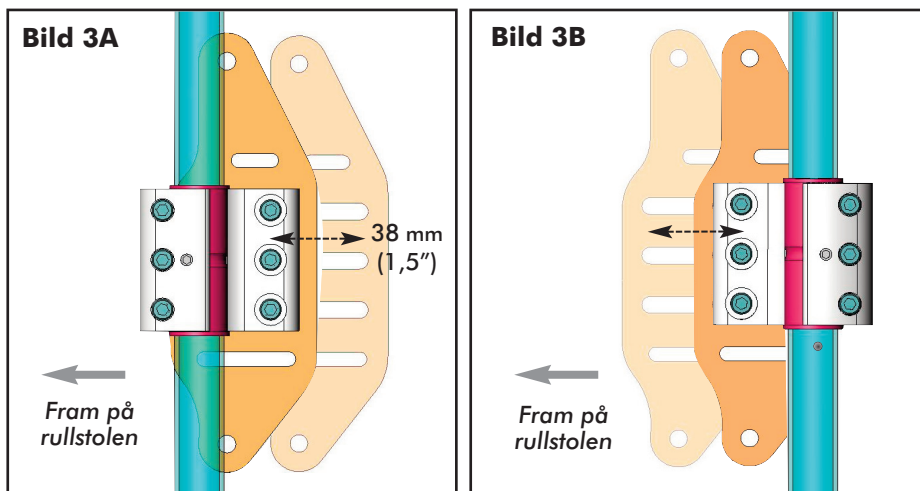


Bild 3A
Monteringsplattan placerad så att ryggstödet hamnar så långt **bak** som möjligt (maximalt sittdjup).

Bild 3B
Monteringsplattan placerad så att ryggstödet hamnar så långt **fram** som möjligt.


3.0 Inställning och justering före montering

3.1 Justering av monteringsklämma och platta *forts.:*

ii) JUSTERING AV RYGGSTÖDSHÖJ- DEN:


Monteringsklämmornas höjd (ryggstödsdynan) kan justeras längs ryggsstödsrören genom att lossa monteringsmaterialet till klämman och skjuta hela anordningen uppåt eller nedåt till önskad höjd – se **bild 3** till höger.

(Obs! Monteringsplattorna/klämmorna måste monteras på samma höjd på båda ryggsstödsrören för att säkerställa korrekt inställning).

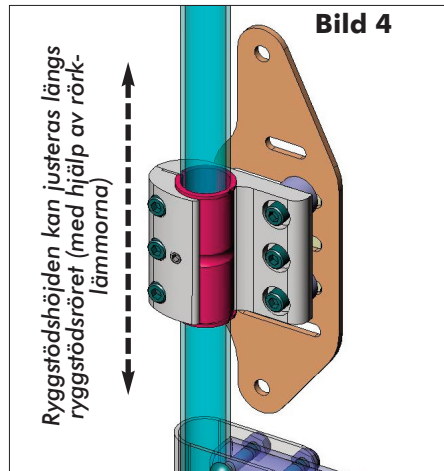

iii) JUSTERING AV RYGGSTÖDSVIN- KELN:

Monteringsplattorna med spår är också utformade för att möjliggöra enkel justering av ryggsstödsvinkeln för MaTRx-ryggstödet. Genom att lossa på monteringsmaterialet kan plattorna roteras för att ändra ryggsstödsvinkeln och bättre anpassa den till brukarens behov (se **bild 4** till höger).

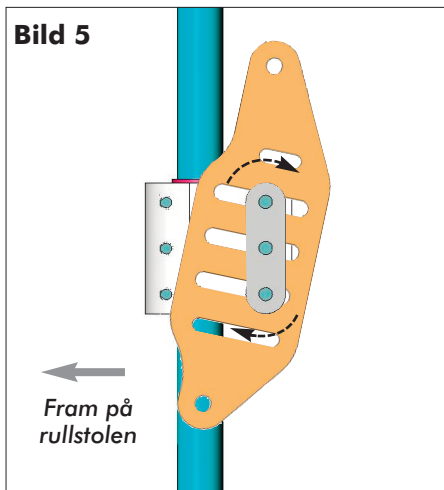

Justering av ryggsstödsvinkeln på en rörlämsanordning.

4.0 Montering av MaTRx-ryggstöd

i Viktigt! Före montering ska du se till att vänster och höger monteringsplattor sitter ordentligt på ryggstödsrören på samma höjd.


i Viktigt! Alla MaTRx-ryggstöd ska centreras mellan ryggstödsrören för att de ska fungera effektivt och ge korrekt stöd.

I följande avsnitt finns referensdiagram för montering för de olika typerna av MaTRx-ryggstöd. Använd monteringsmaterialet för mellanlägg som tillhandahålls för att bestämma den uppsättning monteringsmaterial som behövs (dvs. skruvar/mellanlägg/brickor) för att centrera och montera MaTRx-ryggstödet korrekt på monteringsplattorna.

Obs! För att uppnå korrekt inställning kan monteringsmaterialet som behövs variera något från bilderna nedan.

4.1 MaTRx-PB och MaTRX-PB Deep

MONTERING AV MELLANLÄGG* FÖR MATRX-PB OCH PB-DEEP

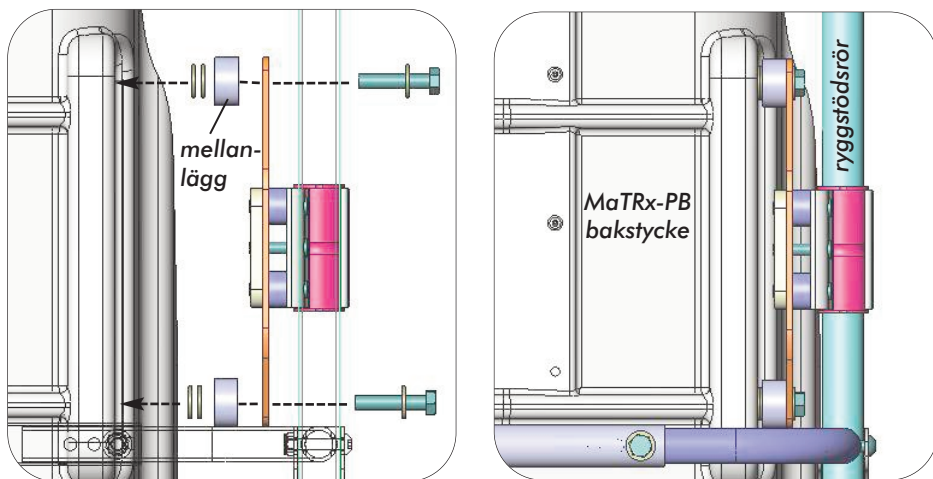


Observera: Monteringsmaterialet som behövs kan variera beroende på ryggstödet's storlek och bredden på ryggstödsröret – **bilder är endast som referens.**

4.0 Montering av MaTRx ryggestöd


4.2 MaTRx-PB HD (kraftigt) och PB HD-Deep

MONTERING AV MELLANRULÄGG* FÖR MATRIX PB-HD OCH HD-DEEP

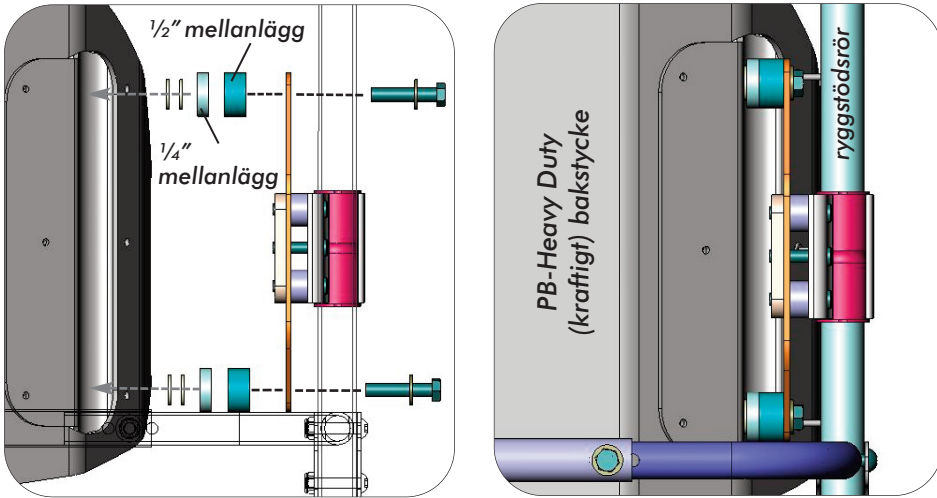

4.3 MaTRx-PB Elite

MONTERING AV MELLANRULÄGG* FÖR MATRIX-PB ELITE

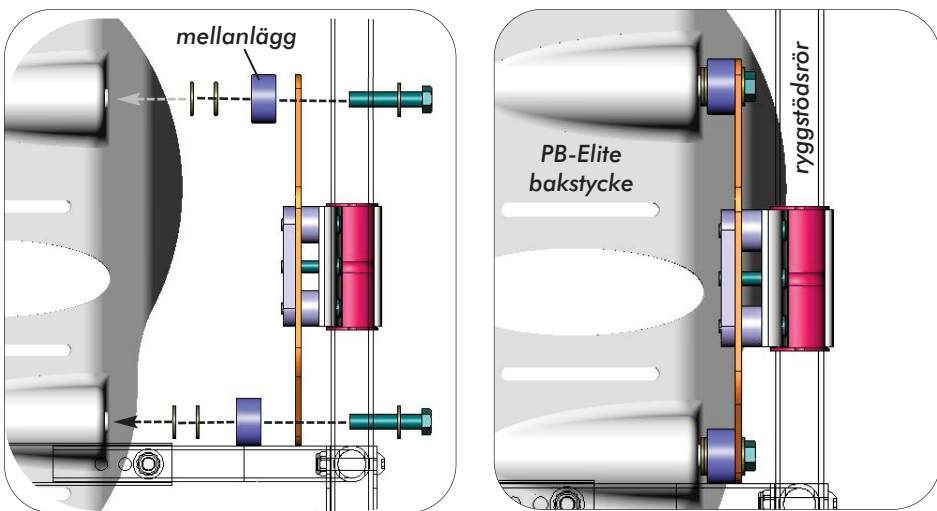

***Observera:** Monteringsmaterialet som behövs kan variera beroende på ryggestödetts storlek och bredden på ryggestödsrören – bilder är endast som referens.