


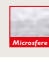



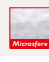



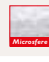





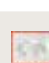




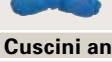



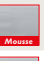




Invacare | Positioning

Invacare propone un'ampia gamma di cuscini che consentono di alternare la posizione posturale per un'importante azione preventiva delle piaghe da decubito.

Composti da materiali di alta qualità e rivestiti in Dartex®, questi prodotti possono essere un valido supporto per tutti quei pazienti che sono a rischio di piaghe da decubito.

Guida alla scelta dei cuscini antidecubito

	Codice prodotto	Descrizione	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso	Composizione
Cuscino antidecubito in microsfere							
	PC100B	Invacare cuscino universale	600 mm	500 mm	150 mm	0,8 Kg	
	PC150B	Invacare cuscino universale 40 x 25	400 mm	250 mm	80 mm	0,19 Kg	
	PC200B	Invacare cuscino cervicale	470 mm	380 mm	Ø 14	0,5 Kg	
	PC300B	Invacare cuscino antidecubito	2000 mm		Ø 18	1,5 Kg	
	PC400B	Invacare cuscino mezza luna	880 mm	880 mm	Ø 20	1,6 Kg	
	PC600B	Invacare cuscino antidecubito arti inferiori	700 mm		Ø 15	0,4 Kg	
	PC700B	Invacare trapezio di posizionamento	500 mm	130 mm	250 mm	0,36 Kg	
Cuscini antidecubito in visco elastico							
	PC100	Invacare cuscino universale	600 mm	500 mm	200 mm	1,3 Kg	mousse viscoelastica 60 Kg/m ³ 
	PC300	Invacare antidecubito laterale	1600 mm	200 mm	200 mm	1,6 Kg	mousse viscoelastica 60 Kg/m ³ 
	PC400	Invacare cuscino mezza luna	2000 mm	200 mm	200 mm	2,3 Kg	mousse viscoelastica 60 Kg/m ³ 
	PC600	Invacare cuscino antidecubito arti inferiori	900 mm	300 mm	300 mm	0,9 Kg	mousse viscoelastica 60 Kg/m ³ 
Cuscini antidecubito in mousse / gel							
	OSW100/BALT	Invacare cuneo Odstock	850 mm	570 mm	110 mm	1,5 Kg	mousse HR 40 Kg/m ³ 
	HP50 HP100	Invacare Hellpad	480 mm	320 mm 620 mm	50 mm	1,5 Kg 3 Kg	mousse HR 40 Kg/m ³  
	MLT/S MLT/M MLT/L	Invacare talloniera	510 mm 610 mm 660 mm		200 mm	0,7 Kg 0,75 Kg 0,8 Kg	mousse HR 40 Kg/m ³ 

Importanti regole per una postura corretta:

- Per un decubito dorsale sollevare il busto e le gambe e formare un angolo di 30°.
- Per un decubito laterale a destra e sinistra è preferibile posizionare il paziente a 30°.
- Le gambe devono essere flesse al minimo livello delle anche e delle ginocchia.
- La gamba superiore deve essere posizionata più indietro dell'altra gamba con una flessione di 30° a livello delle anche e di 35° a livello del ginocchio.
- Il perineo non deve essere a contatto con il materasso.

INVACARE
Yes, you can.®

I materiali



Microsfere

Microsfere

Microsfere di poliuretano espanso molto leggere e facili da modellare.

Ampia scelta di cuscini e materiali.



Visco

Mousse viscoelastica

Il cuscino avvolge in modo eccellente il corpo, assicurando un'ottima prevenzione delle piaghe da decubito. E' molto confortevole per il paziente, specie per lunghi trattamenti.



Mousse

Mousse

Favorisce un posizionamento stabile. Molto comodo.



Gel

Gel

Il cuscino ben si adatta alla parte interessata.

Cuscini per il posizionamento



Cuscino antidecubito

Particolarmente utile per il posizionamento semi - laterale a 30° in posizione allungata e per assicurare una buona prevenzione a livello del dorso, della zona sacrale e del tallone. Consente di posizionare il paziente lateralmente fornendo un buon sostegno lungo tutto il tronco.



Cuscino mezza luna

Offre un supporto stabile della testa e dei gomiti. E' consigliato in caso di traumi e può essere utilizzato in combinazione con la talloniera **Hellpad** e **Odstock**.



Cuneo

Odstock è un cuneo in mousse che consente di mantenere piegate le gambe del paziente. Il supporto sotto le cosce riduce il rischio di scivolare sul letto e, grazie alla posizione assunta dalle pelvi, riduce il rischio di lordosi lombare, diminuendo le forze di frizione sul sacro.



Hellpad

Hellpad è costituito da elementi combinati di gel e mousse studiati appositamente per ridurre la pressione sui talloni grazie agli inserti in gel. Fodera traspirante e idrorepellente.



Cuscino universale

Ottimo per il controllo del collo e degli arti inferiori.

Norme :

Resistente al fuoco secondo EN NF 597 parte 1 e 2. Impermeabile secondo ISO 1420. Biocompatibili secondo EN NF 10993-5



Cuscino cervicale

Ideale per offrire un buon sostegno cervicale e scaricare le forze a livello sacrale. Utilizzo combinato con il cuscino antidecubito arti inferiori per scaricare le forze a livello dei malleoli e del femore.



Cuscino antidecubito arti inferiori

Ideale per scaricare il peso a livello dei talloni e del tronco. Se usato in combinazione con il cuscino cervicale, è un'ottima soluzione per ridurre le forze esercitate a livello dei condili femorali e dei malleoli, dando sostegno anche alla testa. Possibile il posizionamento semi laterale 30° per le persone di bassa statura.



Talloniera

L'utilizzo della talloniera permette di tenere le gambe in una buona posizione e di favorire un buono flusso venoso. Disponibile in tre taglie : S (**MLT/S**), M (**MLT/M**) e L (**MLT/L**). Le due cinghie in dotazione consentono di mantenere le gambe ben alloggiato. Questo tipo di ausilio consente inoltre di ridurre il rischio di lussazione in caso di protesi all'anca.



Nr. Repertorio DM:
108277/R Invacare **Positioning**
89249/R Invacare **Hellpad**