


# Snelstartgids

## VENDLET V5 VENDLET V5+




De powerknop   
fungeert ook als  
noodstop




VENDLET dient te  
worden gemonteerd  
zoals beschreven in  
de handleiding.



### Indien de VENDLET V5 of VENDLET V5+ als zijhek wordt gebruikt

1. Het ligvlak moet horizontaal zijn.
2. Verwijder de plastic zijhekken en hang ze aan de tussenstang.
3. Dubbelklik op  om de het VENDLET-systeem te activeren. Een akoestisch signaal klinkt en het groene lampje boven het power-symbool gaat branden. Als de handbediening gedurende 90 seconden niet is gebruikt, schakelt het VENDLET-systeem weer uit.
4. Omdraaien / hanteren van de bedlegerige persoon is gemaakt met behulp van de functionaliteit van de handset.



5. Indien de motorrollen tijdens de behandeling van de patiënt omlaag gezet zijn, kunnen deze nu weer in de hoge stand gezet worden
6. Monteer de plastic zijhekken - 2 aan iedere zijde. Raadpleeg, indien nodig, onze gebruikershandleiding zijhekken. 

**Let op de patiënt tijdens het keren.**

Leverancier:

Invacare B.V.

Tel: +31 (0)318 69 57 57

[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)




# Snelstartgids


VENDLET V5  
VENDLET V5+



Indien VENDLET V5 of VENDLET V5+ **NIET** als zijhek wordt gebruikt

1. Het ligvlak moet horizontaal zijn.
2. Zet de motorrollen aan beide zijden omhoog.
3. Dubbelklik op  om de het VENDLET-systeem te activeren. Een akoestisch signaal klinkt en het groene lampje boven het power-symbool gaat branden. Als de handbediening gedurende 90 seconden niet is gebruikt, schakelt het VENDLET-systeem weer uit.
4. Omdraaien / hanteren van de bedlegerige persoon is gemaakt met behulp van de functionaliteit van de handset.



De powerknop  fungeert ook als noodstop



5. Zet de motorrollen aan beide zijden omlaag wanneer de bedlegerige persoon in bed wordt achter gelaten.



**Let op de patiënt tijdens het keren.**

Leverancier:

Invacare B.V.

Tel: +31 (0)318 69 57 57

[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)



VENDLET dient te worden gemonteerd zoals beschreven in de handleiding.

