

# Rekonditioneringsanvisning

## INVACARE ROLLATORER

### Instruktioner för rekonditionering av INVACARE rollatorer P452E/2 Spatio and P452E/3 Banjo

Följande punkter skall gås igenom och kontrolleras vid rekonditionering av ovanstående rollatorer.

#### ALLMÄNT

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentarer:	OK
1	Samtliga skruvförband är åtdragna.	Byt tut låsmutterna och drag åt skruvarna.		

#### HJUL

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentarer:	OK
1	Hjullagret ej är skadat.	Om hjulet inte snurrar lätt skall det bytas ut.	Ny låsmutter skall användas.	
2	Slitbanan ej är skadad.	Hjulet byts ut.	Ny låsmutter skall användas.	
3	Hjulbultar är ordentligt åtdragna.	Drag åt skruvarna.	Ny låsmutter skall användas.	
4	Framhjulscaffeln är åtdragen i stativet.	Drag åt framcaffeln i stativet med 60 Nm.		
5	Framhjulscaffeln ej har några skador.	Byt framcaffel.		

#### BROMSAR

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentarer:	OK
1	Bromsklacken ej är sliten.	Byt bromsklack.		
2	Bromsklack går tillbaka efter användning av färbroms	Byt bromsklack, alternativt wirar och höljen.		
3	Bromsvajer löper lätt i vajerhöljen.	Byt vajer ev. hölje vid behov.		

# Rekonditioneringsanvisning

## INVACARE ROLLATORER

4	Full bromseffekt erhålls.	Justera spänning av vajer så att full bromseffekt uppnås.		
5	Ändavslutningarna på vajerhöljen ej är skadade.	Byt vajerhölje.		
6	Bromshuset/handtag ej är skadat.	Byt bromshandtag.		

## FÄLLMEKANISM

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentarer:	OK
1	Rollatorn låser och stannar i utfällt läge.	Byt fällspärren.		

## HANDTAGSGREPP

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentarer:	OK
1	Handtagsgrepp ej är skadade.	Byt ut handtagsgreppet/en.		
2	Handtagsgreppen ej enkelt kan vridas.	Ersätt med nya handtagsgrepp. Rengör noggrant innan montering av nya grepp. Använd fettlösande medel utan tillsatser av oljeprodukter (ej avfettningemedel eller liknande), spolarvätska fungerar bra.		

## HANDTAGSLÅSNING

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentarer:	OK
1	Låsspakarna låser handtagsrören riktigt.	Byt ut låsspakarna.		

# Rekonditioneringsanvisning

## INVACARE ROLLATORER

---

### STATIV

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentarer:	OK
1	Inga mekaniska skador har uppstått på stativet.	Kassera rollatorn.		
2	Handtagsrören inte är böjda.	Kassera rollatorn.		

### SITS

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentarer:	OK
1	Sitsen är oskadd.	Byt sits.		

**KONTROLL AV ROLLATORN ENLIGT SKÖTSELROUTINER OVAN SKA UTFÖRAS REGELBUNDET.  
FREKVENSEN SKA AVGÖRAS AV I VILKEN GRAD ROLLATORN HAR ANVÄNTS OCH VILKA PÅFRESTNINGAR DEN UTSATTS FÖR .**

Rollatormodell: \_\_\_\_\_

LOT-nummer: \_\_\_\_\_

**Kontroll utförd av:**

Namn: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Sign: \_\_\_\_\_