



TOP END[®] *force-2*[™]

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Ferramentas que necessita



- 1/2" Chave estrela
- 10mm Chave estrela
- Conjunto de chaves Allen

O que vem na caixa?



chassi Force-2



O que vem na caixa?



Hardware - Componentes



Frame to fork connector plate

Front wheel skewer

Rear wheel axles

Rear wheel axle caps

Fork connection clamps

Placa de ligação forqueta - chassi

Eixo roda dianteira

Eixos rodas traseiras

Tampas p/ eixos das rodas traseiras

Abraçadeiras forqueta

O que vem na caixa?



Forqueta e 2 rodas traseiras



O que vem na caixa?



Patim e faixa x 2



O que vem na caixa?



Barra Protecção Traseira



O que vem na caixa?




Protector de perna e 2 abraçadeiras plásticas



O que vem na caixa?



Protector de corrente, bandeira de segurança e suporte

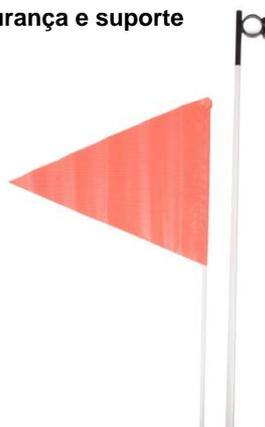

O que vem na caixa?



Almofada de encosto e assento



- Cinto de tronco
- Almofada de encosto e assento

Passo 1



- Apertar as abraçadeiras do tubo de camber, antes da montagem das rodas traseiras.

Passo 2



- Inserir o eixo na roda traseira.
- Repetir para a outra roda.

Passo 3



- Fixe cada roda traseira ao chassi através de uma chave de 6 mm.
- Apertar até não se notar nenhuma folga.

Passo 4



- Posicione o chassi com as rodas traseiras montadas, sobre uma mesa estável, com a almofada a suportar a parte dianteira do chassi.



Passo 5



- Aperte a placa de ligação ao amortecedor de borracha, apertando o parafuso.

Passo 6



- Coloque a abraçadeira da forqueta ligeiramente solta, sobre a parte inferior da forqueta.

Passo 7



- Deslize a metade inferior da abraçadeira sobre a parte inferior frontal do chassi.

Passo 8



- Coloque a segunda abraçadeira sobre a zona superior do chassi e placa de ligação.

Passo 9



Aperte ambas as abraçadeiras



- Aperte firmemente ambas as abraçadeiras.
- Assegure que ambas as abraçadeiras têm a mesma orientação.

Passo 10




- Aperte vagamente o parafuso do amortecedor para segurar a forqueta no sítio.
- Aperte de novo após ter a roda dianteira alinhada – observe o passo 11.

Passo 11



- Para centrar a roda dianteira, com o parafuso do amortecedor ligeiramente solto, aperte o conjunto de parafusos situados na parte lateral da placa do amortecedor.
- Por fim, aperte o parafuso do amortecedor.

Passo 12

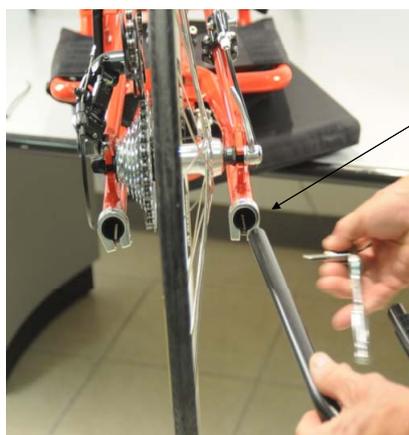

- Desaperte a abraçadeira do tubo do patim, se necessário.
- Deslize o patim dentro do tubo da forqueta.

Passo 13



Fixe a faixa de acordo com a imagem abaixo



4" (aprox. 10 cm) de sobreposição de faixas de velcro é necessário

Passo 14



- Coloque o protector de perna contra o chassi, alinhado com os velcros.

Passo 15



- Fixe com uma abraçadeira plástica.
- Corte cuidadosamente o excesso de fita.

Passo 16



- Retire a película de protecção da banda adesida dos velcros da almofada do encosto.

Passo 17



- Alinhe a almofada de encosto com a placa do encosto.
- Pressione cuidadosamente a almofada contra a placa de modo a que fita adesiva do velcro fixe.

Passo 18




- Coloque a almofada de assento sobre a base, conforme a imagem.
- Os velcros irão fixar sobre a tela de assento.

Passo 19



- Para fixar o protector de corrente, use a chave Allen 5 mm para desapertar a abraçadeira.

Passo 20

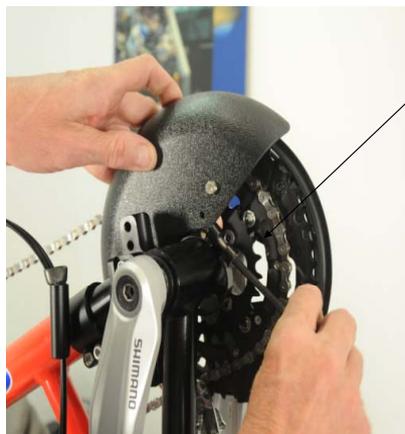

- Coloque a abraçadeira e aperte conforme imagem.

Passo 21




- Aperte a abraçadeira do lado esquerdo
- Assegure que não toca na corrente.

Passo 22



- Retire do chassi, a barra de suporte do encosto.
- É muito mais simples aplicar primeiro esta barra no topo do encosto.

Passo 23

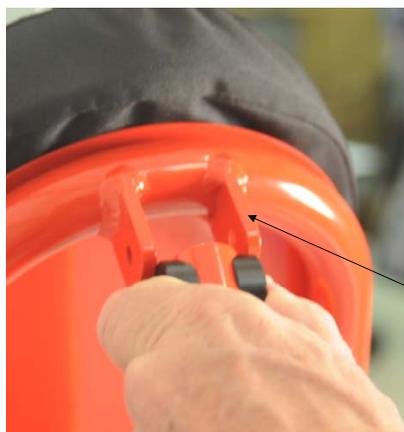

- Retire o parafuso, anilha e porca.
- Segure os espaçadores curvos junto da barra e coloque no espaço conforme a imagem ao lado.
- Poderá ter de forçar um pouco.

Passo 24



- No final da aplicação, deverá alcançar este resultado.

Passo 25




- Use uma pequena chave para alinhar os furos.
- Coloque a anilha no parafuso e deslize o parafuso pelo furo.
- Aperte a porca no parafuso.

Passo 26




- Aperte devidamente no encosto, a barra de suporte, usando uma chave inglesa de 5 mm e uma chave estrela de 10 mm.

Passo 27

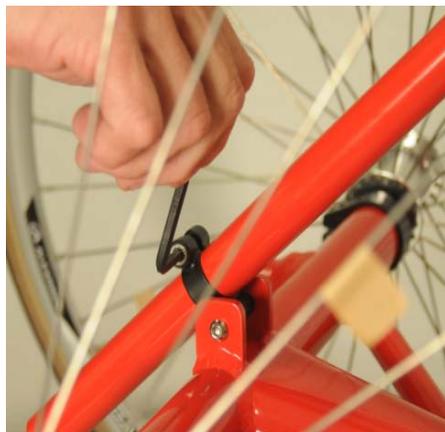

- Deslize o tubo de suporte do encosto pela anilha do chassi.
- Aperte com uma chave Allen 5 mm.
- Ajuste o ângulo de encosto para uma posição confortável antes de usar.

Passo 28

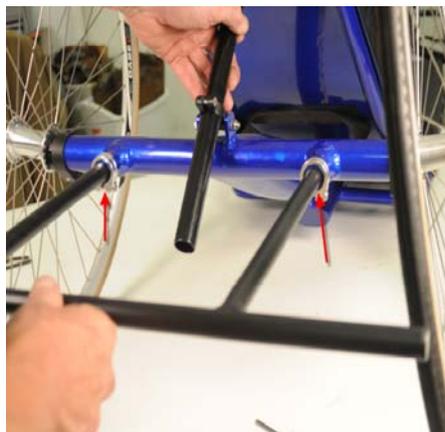


- Remova a abraçadeira do encaixe da Barra de Proteção de Choques do lado esquerdo.

Passo 29



- Coloque o suporte da Bandeira de Segurança no local onde acabou de remover a abraçadeira anterior.
- Deslize o a Barra de Proteção de Choques no tubo e aperte com uma chave inglesa de 4 mm.

Passo 30

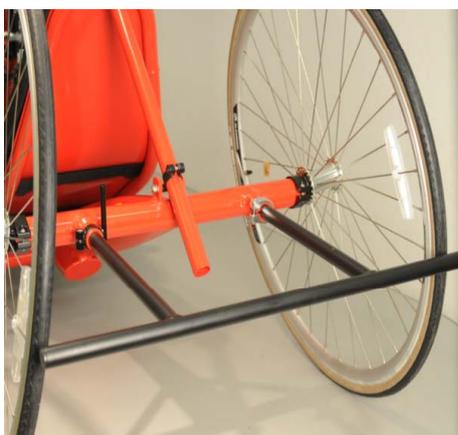

- Quando terminar o aspecto deverá ser o indicado na figura ao lado.
- Insira a bandeira.

Passo 31

**MUITO IMPORTANTE**

- Aperte o suporte da manivela (crank) com uma chave Allen.

Passo 32



- Ajuste os apoios de pés/pernas
- Aperte em seguida com uma chave 5mm
- Assegure que está devidamente apertado para evitar que o suporte rode.

Passo 33



- Coloque as tampas a tapar os eixos das rodas traseiras.
- Terminou!
- Não use a Handcycle até ter lido o manual de utilizador, especialmente as instruções de uso.
- Qualquer dúvida, contacte a Invacare Portugal.