



**Yes, you can.**

## Bruksanvisning Taklyft Invacare® Robin™

### Allmänt

- Förflytta lyften med hjälp av lyftbanden. **Manöverdosans sladd eller nödsänkningssnöre får ej användas för detta ändamål.**
- Manövrering av lyften sker med knapparna på manöverdosan.
- Då lyften körs upp eller ned obelastad måste lyftbanden hänga fritt.
- Vid användning av lyften tänds den blå indikatorlampan och lyser i ca 30 sekunder efter avslutad användning av lyftmotorn.
- Blinkande indikatorlampa och ljudsignal betyder låg batterispänning – sätt omgående lyften på laddning - reserv finns för ca 5 lyft.

### Lyft och förflyttning

- Applicera selen genom att koppla lyftselens ryggband först till vardera lyftbandskrok och därefter benbanden till vardera lyftbandskrok. Läs även bruksanvisningen som medföljer varje lyftsele.
- Sträck banden, kontrollera hur lyftselen sitter på brukaren samt att banden sitter rätt i lyftbandskrokarna.
- Lyft brukaren eller sänk sängen.
- Förflytta brukaren.
- Återställ lyftmotorn till parkeringsläget och placera manöverdosan i laddningshållaren efter varje användning av lyften.

### Nödstopp och nödsänkning

- För **Nödstopp**, dra lätt i snöret på lyftmotorns undersida.
- Återställ nödstoppet genom att trycka in den röda knappen vid snöret.
- För **Nödsänkning**, dra vidare från nödstopp och sänkningen påbörjas. För att avbryta nödsänkning släpp nödsänkningssnöret.
- Knapparna på lyftmotorn kan användas för höjning/sänkning om manöverdosan har skadats.
- **OBS.** Manöverdosan och laddning fungerar ej om nödstoppet är aktiverat.

### Våtutrymmen

- När lyftmotorn används i våtutrymmen skall lyftmotorn förflyttas bort från duschutrymmet när den inte används.

### Frilyft (fristående lyftställning)

- Vid arbete med Frilyft, tänk på tipprisen. Förflyttning skall alltid utföras rakt under skenan.

### Övrigt

- Läs noggrant igenom bifogade manual till lyftmotorn och lyftselen.
- Kontrollera dagligen lyftselarna samt lyftmotorns lyftband. Skadade lyftselar skall kasseras.

### Invacare AB

Fagerstagatan 9 / Box 66, S-163 91 Spånga, Tlf.: 08-761 70 90 – Fax: 08-761 81 08  
E-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se

Ident. nr.: 1451452  
Version 02 05.2005

