

Viktigt säkerhetsmeddelande

gällande vårsäng *Invacare*[®] **SB400**

Datum: januari 2012

Invacare refnr: FSN6302

Råd vid användningen av vårsäng

Denna information gäller för alla *Invacare* **SB400/440** vårsängar.

Med tanke på säkerheten för våra kunder vill vi göra er uppmärksamma på ny säkerhetsinformation i bruksanvisning för sängen **SB400/440**.

Bruksanvisningen har förbättrats med information om försiktighetsåtgärder som måste vidtas när brukaren har liten kroppsstorlek, är spastisk, orolig eller förvirrad; dessa varningar står angivna på sidan 6 i bruksanvisningen.

I bruksanvisningen presenteras ett tillbehör, Grindskydd för Extra säkerhet (utöver standardgrindskydd), för de fall sängen används av en spastisk och orolig brukare. Grindskydd för Extra säkerhet ska monteras för att undvika att brukaren fastnar mellan grinden och sängbotten. Att inte följa dessa råd kan leda till att brukaren skadas.

Dessa ändringar presenteras i bruksanvisningen till *Invacare* SB400, version 9, 2011-02. Utdrag ur bruksanvisningen medföljer detta Säkerhetsmeddelande.

- Den ändrade bruksanvisningen kan laddas ner från *Invacare*s hemsida.
- Den kan också beställas från *Invacare* AB.

Åtgärder som skall vidtas av mottagaren i detta Säkerhetsmeddelande är att undersöka om det finns ett behov av att ompröva riskanalysen för de brukare som använder denna sängmodell.

Senaste versionen av bruksanvisningen kan laddas ner från *Invacare*s hemsida – www.invacare.se. Alternativt kan du kontakta Kundservice, där du kan beställa en kopia av den senaste versionen av manualen till din SB400.

Försäkra er om att denna information görs tillgänglig för all berörd personal inom er organisation.

Myndigheterna har informerats om detta ärende.

Om du har frågor eller önskar mer information, vänligen kontakta Kundservice:

Tel. 08-761 70 90

Fax. 08-761 81 08

E-post: sweden@invacare.com

1.1 Säkerhet och varningar



Sängen uppfyller alla krav på avstånd mellan olika delar i sängen. Men, om sängen används vid vård av brukare med små kroppsmått kan det finnas risk att brukaren kan glida genom eller fastna mellan sänggrinden ribbor, mellan grindens nedersta ribba och sängbotten eller mellan andra delar.



Sängen är inte avsedd för personer under 12 års ålder eller personer med en kroppsstorlek jämförbar med en normalväxt 12-åring.



Sängen, i kombination med sidogrindar bör inte användas av brukare med en kroppsvikt under 45 kg eller en kroppslängd på under 150 cm eller av personer som är oroliga, förvirrade, har spasmer om inte:

- en dokumenterad individuell utprovning/riskanalys har gjorts eller
- att korrekt monterade grindskydd finns eller vid osäkerhet att grindskydd för extra säkerhet finns.

Grindskydd

Grindskydd polstrat till grind Britt III/Lilly	1449412
Grindskydd till Scala Basic metall	1449423
Grindskydd nät till grind Britt III/Lilly	1449413
Grindskydd polstrat förlängt +16 cm till Britt III	1493565
Grindskydd nät förlängt +16 cm till Britt III	1449415
Grindskydd Extra säkerhet polstrat till Britt III, IV/Lilly	1511890
Grindskydd Extra säkerhet polstrat till Britt III +16 cm	1511892